



PRODUKTY NETTI



TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA
LUB ETYKIETĄ.



Uczenie się, zdobywanie nowej wiedzy — wydajnie, szybko i trwale

MYCampus to centrum kompleksowego szkolenia i praktycznej pomocy w zakresie mobilności, obejmujące zarówno manualne, jak i elektryczne wózki inwalidzkie marki MEYRA. Jest ono przeznaczone dla specjalistów z branży medycznej.



Szkolenia przez całą dobę

Ucz się kiedy i gdzie chcesz



Nauczanie mieszane

E-learning połączony z webinariami i seminariami dla osiągnięcia optymalnych rezultatów nauki



Potwierdzenie sukcesu w nauce

Sprawdzanie wiedzy online i certyfikacja

MYCAMPUS

Education on a higher level

Nowa era nauki



[www.meyra.de/
mycampus](http://www.meyra.de/mycampus)

Szkolenia specjalistyczne

Na naszej stronie znajdują Państwo kalendarz szkoleń stacjonarnych i internetowych. Dzięki nim, pod okiem renomowanych ekspertów, poszerzą Państwo swoją wiedzę. Ponadto, nasi wykładowcy – zarówno wewnętrzni, jak i zewnętrzni – zaprezentują Państwu innowacyjne koncepcje.

- **Podstawy zaopatrywania w wózki inwalidzkie**
- **Szkolenia techniczne**
Serwis i naprawy,
Szkolenia produktowe,
Siedzenie i pozycjonowanie



my-netti-tv.de

Filmy instruktażowe

Korzystajcie Państwo również z naszych krótkich i zwięzłych filmów instruktażowych (How-To Videos) jako szybkich przewodników do drobnych napraw lub regulacji w naszych wózkach inwalidzkich.

O nas

Netti to norweska marka wózków inwalidzkich, należąca do grupy MEYRA. Od 35 lat jest pionierem w dziedzinie siedzenia i pozycjonowania, tworząc rozwiązania dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Historia Netti rozpoczyna się pod koniec lat 80, na zachodnim wybrzeżu Norwegii, kiedy grupa przyjaciół doszła do wniosku, że „można to zrobić lepiej”. Jeden z nich poruszał się na wózku inwalidzkim, a on i jego rodzina codziennie borykali się z wyzwaniami. Razem zaczęli opracowywać zupełnie nowy wózek ze sprytnymi opcjami regulacji, koncentrując się na poprawie pozycji siedzącej. Dzięki wzajemnej pomocy oraz inspiracjom i pomysłom rodziny, stworzono wózek z innowacyjnymi rozwiązaniami.

Wózek zapewniał użytkownikowi niezbędne wsparcie i ulgę, co znacznie poprawiło jego samopoczucie. Efekt był tak przełomowy, że w 1989 roku zdecydowano o założeniu firmy Alu Rehab, aby umożliwić to samo innym użytkownikom wózków.

Od tamtej pory naszym głównym celem jest „joy of life” (radość życia), a wszystkie produkty są projektowane tak, aby umożliwić lub poprawić mobilność użytkownika oraz ułatwić mu udział w codziennych aktywnościach. Chodzi o zaspokajanie podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie, picie, mycie, komunikacja, a także o łagodzenie bólu. Oczywiście, kluczowe jest tu również umożliwienie samodzielnego i niezależnego życia.

Jako jeden z nielicznych dostawców, oprócz ogólnych zagadnień dotyczących siedzenia i pozycjonowania, prezentujemy naszą fachową wiedzę w dziedzinie „siedzenia dynamicznego” oraz w złożonym obszarze rozwiązań dla osób z poważnymi schorzeniami.

SIEDZENIE I POZYCJONOWANIE

Geriatrya
Neurologia
Siedzenie dynamiczne
Bariatrya



SPIS TREŚCI

Rodziny wózków Netti w pigułce

8

NETTI V

Dla idealnego dopasowania

W serii Netti V połączono zalety wózka aktywnego z zaletami wózka komfortowego. Pozwala to na uzyskanie doskonałych właściwości jezdnych.

Seria składa się z:

Netti V
Netti V Base
Netti V EL



18

NETTI ADAPTPRO

Nowy standard zdrowego siedzenia

Seria Netti AdaptPro obejmuje szereg zupełnie nowych, opatentowanych innowacji, które zapewniają wyższą jakość siedzenia.

Seria składa się z:

Netti AdaptPro
Netti Dynamic AdaptPro



24

NETTI 4U

Proste i łatwe rozwiązania

Asortyment serii Netti 4U obejmuje modele dla początkujących oraz zaawansowane wózki komfortowe.

Seria składa się z:

Netti 4U CE
Netti 4U CE Plus
Netti 4U CED
Netti 4U CED XL
Netti 4U Base



36

NETTI III

Najwyższy poziom adaptacji dla indywidualnego komfortu

Seria Netti III oferuje rozwiązania, które spełniają nawet najbardziej złożone wymagania i wytrzymują duże obciążenia.

Seria składa się z:

Netti III
Netti III EL
Netti III HD
Netti III XHD
Netti III XXHD



48

NETTI DYNAMIC

Komfort dla użytkowników z zaburzeniami ruchu

Netti Dynamic System to wysoce zaawansowany i opatentowany system wspomagania ruchu, przeznaczony dla użytkowników cierpiących na przykład na porażenie mózgowe lub dystonię.

Seria składa się z:

Netti Dynamic Base
Netti Dynamic CED
Netti Dynamic III HD
Netti Dynamic AdaptPro



54

NETTI CUSTOMIZED

Indywidualne rozwiązania dla optymalnego dopasowania

W przypadkach, gdy nasze standardowe produkty i akcesoria nie spełniają potrzeb użytkownika, nasz zespół może dostosować wózek lub akcesoria w sposób indywidualny.

Przykłady rozwiązań indywidualnych:

Indywidualne konstrukcje na zamówienie
Netti Bed
Netti Bariatric



AKCESORIA


Indywidualizacja dzięki dużemu wyborowi akcesoriów.

64

SYSTEMY SIEDZISK I OPARĆ

Zapewnia dobry rozkład nacisku, stabilność i odpowiedni mikroklimat.

90

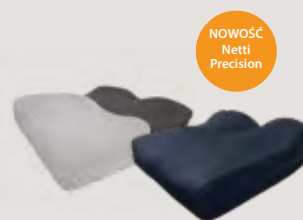

Wybierz właściwy wózek inwalidzki na podstawie obrazu klinicznego choroby.

Jest szczególnie ważne, aby wybrać wózek inwalidzki, który spełnia indywidualne potrzeby użytkownika. Odpowiednio dobrany wózek zapewnia zdrową postawę nawet po wielu godzinach spędzonych w pozycji siedzącej.

	Netti V Allround	Netti V	Netti V Base	Netti V EL	Netti AdaptPro	Netti III	Netti III EL	Netti III HD	Netti III XHD + XXHD	Netti 4U CE	Netti 4U CE Plus	Netti 4U CED	Netti 4U CED XL	Netti 4U Base
Ograniczona mobilność/słabość geriatryczna	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Hemiplegia ¹⁾	+	+		+	+	+	+				+	+		
Stwardnienie rozsiane	+	+		+	+	+	+				+	+		
ALS		+		+	+	+	+					+		
Chorea Huntingtona		+		+	+	+	+					+		
Użytkownik o większej wadze							+	+	+				+	
Porażenie mózgowe	+	+		+	+	+	+				+	+		
Zaopatrzenie w siedzisko kubelkowe			+											+
Mimowolne ruchy		+			+	+		+				+	+	
Młodzi użytkownicy ²⁾	+	+									+	+		
Transport sprzętu medycznego		+					+	+	+					
Bardzo wysoki użytkownik (> 195)	+	+		+				+	+					
Bardzo niski użytkownik (< 150)	+	+		+							+	+		

Jest to jedynie rekomendacja oparta na doświadczeniu.

Powyższe zestawienie służy wyłącznie jako orientacja i nie zastępuje indywidualnej oceny każdego przypadku.

Aby uzyskać dalsze informacje lub w przypadku konkretnych pytań, chętnie pozostajemy do Państwa dyspozycji. W bardziej złożonych przypadkach oferujemy również osobiste konsultacje na miejscu.



Bardzo zalecany



Zalecany

¹⁾ Niska wysokość siedziska jest niezbędna, aby umożliwić napędzanie wózka rękami i/lub stopami.

²⁾ Mała szerokość i głębokość siedziska są niezbędne, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie do użytkownika.



Wybierz wózek dopasowany do akcesoriów, których potrzebujesz

W wielu przypadkach akcesoria pasują do wszystkich wózków Netti. W ten sposób można w sposób ekonomiczny i prosty dostosować wózek do potrzeb nowego użytkownika. Poniżej znajduje się lista akcesoriów, które są przeznaczone do konkretnych produktów. Chętnie doradzimy Państwu także osobiście. Prosimy o kontakt telefoniczny.

	Netti V	Netti V Base	Netti V EL	Netti AdaptPro	Netti III	Netti III EL	Netti III HD	Netti III XHD + XXHD	Netti 4U CE	Netti 4U CE Plus	Netti 4U CED	Netti 4U CED XL	Netti 4U Base
Opaska do unieruchomienia głowy	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Rączki do pchania z regulacją wysokości	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ogranicznik kąta siedziska	+	+			+	+	+		+	+	+	+	+
Blokada kąta siedziska	+	+			+		+						
Uniwersalny uchwyt na urządzenia	+	+	+			+	+	+					
Hamulec jednoręczny	+	+	+		+	+	+						
Aluminiowe oparcie	+	+	+		+	+	+	+			+	+	
Szelki	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	
Dynamic System				+			+				+		+
Netti Dynamic akcesoria	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+
Wzmocniony stolik terapeutyczny	+	+	+		+	+	+	+	+	+			
Podłokietnik dla hemiplegików	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+
Podpórka dla osób po amputacji	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+
Podnózek	+	+	+	+	+	+	+				+	+	+

 Dostępne

Wybrane akcesoria można, w ramach specjalnej konstrukcji, dostosować również do modeli niewymienionych na liście.

high five!



Jak ustawić swój
wózek inwalidzki
Netti V



NETTI V

Multifunkcyjny wózek inwalidzki dostosowuje się do indywidualnych potrzeb, także w perspektywie długoterminowej.

Strona 14



NETTI V BASE (JUŻ OD 2026)

Idealny do indywidualnie dopasowanego siedziska.
Może być używany jako baza/podstawa siedziska.

Strona 16



NETTI V EL (JUŻ OD 2026)

Elektryczna regulacja oparcia, siedziska i podnóżków, obsługiwana zarówno przez użytkownika, jak i przez opiekuna.

Strona 17



Netti V – dla idealnego dopasowania

Netti V łączy w sobie cechy wózka aktywnego i wielofunkcyjnego, co pozwala na komfortowe wycieczki zarówno osobom samodzielnym, jak i tym korzystającym z pomocy opiekuna. Dzięki dużemu zakresowi przechyłu siedziska można zrelaksować się w ciągu dnia. Konstrukcja wózka ułatwia jego dostosowanie do zmieniających się potrzeb lub nowych użytkowników, często bez konieczności kupowania dodatkowych akcesoriów. Ta elastyczność sprawia, że jest to ekonomiczne i praktyczne rozwiązanie.

Dla idealnego dopasowania



regulacja
wysokości
siedziska



regulacja
szerokości
siedziska



regulacja
głębokości
siedziska



regulowane,
aby pasowały
do różnych
kształtów
tułowia



abdukcja nogi na
stronę



regulacja środka
ciężkości



ELASTYCZNA WYSOKOŚĆ SIEDZISKA - ZGŁOSZENIE PATENTOWE W TOKU

Wózek inwalidzki, który towarzyszy w każdej chwili

Nieskomplikowana regulacja wysokości siedziska pozwala dostosować wózek do poziomu aktywności i stanu zdrowia użytkownika. Niezależnie od tego, czy użytkownik napędza go samodzielnie za pomocą ciągów „spaceruje” nogami, czy też jest prowadzony przez opiekuna, wysokość siedziska można łatwo dostosować za pomocą kilku ruchów. Ponieważ ten sam wózek może być używany przez dłuższy czas — a w razie potrzeby łatwo dostosowany do kolejnego użytkownika — przekłada się to na niskie koszty eksploatacji.

Regulacja wysokości siedziska

- Elastyczna wysokość siedziska 70 mm dzięki zastosowaniu adaptera wysokości siedziska.
- Elastyczna wysokość siedziska 100 mm przy jednoczesnej zmianie pozycji kół.
- Elastyczna wysokość siedziska 169 mm przy zmianie rozmiaru kół.



System regulacji wysokości
zgłoszony do opatentowania.

Dostępne 3 modele: Netti V, Netti V Base, Netti V EL

WÓZEK INWALIDZKI DLA ASYMETRYCZNYCH POZYCJI SIEDZĄCYCH

Zmienne boczne ustawienie zagłówka, asymetryczna pozycja rur oparcia oraz zintegrowana abdukcja nóg równoważą asymetrię.



Wózek inwalidzki wspiera różne kształty pleców: kształt A, V i H dla optymalnego dopasowania.



Odwiedzenie nóg (abdukcja)
Zintegrowana, płynna abdukcja nóg do 25 mm na każdą stronę.



Możliwe asymetryczne ustawienie zagłówka
Bocznie regulowany adapter zagłówka można łatwo przesunąć na tylnej barierce.

JEDYNA W SWOIM RODZAJU STABILNOŚĆ I RÓWNOWAGA

Regulowany środek ciężkości i rozstaw kół dla optymalnych właściwości jezdnych i zwrotności. Wyjątkowa konstrukcja ramy z możliwością regulacji środka ciężkości i powierzchni styku kół z podłożem zapewnia optymalne właściwości jezdne. Prowadzi to do uzyskania najlepszej możliwej pozycji kół dla aktywnego użytkownika, który samodzielnie napędza wózek ręcznie. Optymalne ustawienie środka ciężkości sprawia również, że wózek jest łatwy do przechylania, nawet dla osób, które samodzielnie obsługują tę funkcję.



Powierzchnia styku kół z podłożem
Koła napędowe można regulować w zakresie 110 mm, aby zapewnić optymalną stabilność.



Równowaga
Siedzisko można płynnie regulować na ramie, aby idealnie wyważyć wózek.



Regulacja oparcia
Oparcie można przesunąć o 25 mm do tyłu/do przodu, jeśli potrzebna jest dodatkowa korekta.



	Netti V	Netti V BASE	Netti V EL
Szerokości siedziska	350, 400, 450, 500	350, 400, 450, 500	350, 400, 450, 500
Regulacja szerokości siedziska	+2 x 25 mm między boczками -2 x 25 mm		
Maks. obciążenie	135 kg		
Szerokość całkowita	SB + 190 mm	SB + 195 mm	SB + 190 mm
Głębokości siedziska	375 – 550 mm		
Wysokości siedziska ze standardową kombinacją kół	SH 386-486 mm		
Kąt siedziska	-3° do +30°		
Kąt oparcia	85° do 130°	85° do 130°	90° do 118°
Jednostka oparcia	Stały rzep Regulowany rzep jako opcja	Stały rzep Regulowany rzep jako opcja	Stały rzep Regulowany rzep jako opcja
Poduszka oparcia	Netti Uno Back Wiele opcji poduszek	Wiele opcji poduszek	Netti Uno Back Wiele opcji poduszek
Boczki	Wyjmowane		
Poduszka siedziska	Standard: Netti Uno Seat Opcja: Poduszki na siedzisko Netti Sit, Netti Precision oraz Ride® Designs dostępne jako opcja do szerokości siedziska 500 mm.	Wiele opcji poduszek	Standard: Netti Uno Seat Opcja: Poduszki na siedzisko Netti Sit, Netti Precision oraz Ride® Designs dostępne do szerokości siedziska 500 mm.
Tapicerka	Oddychający pokrowiec 3D Higieniczny pokrowiec łatwy w pielęgnacji Easy Care dostępny jako opcja		
Uchwyty do pchania	Uchwyty do pchania z regulacją wysokości Pałak do pchania jako opcja	Pałak do pchania Uchwyty do pchania z regulacją wysokości jako opcja	Uchwyty do pchania z regulacją wysokości Pałak do pchania jako opcja
Regulowane elementy wysuwane	Możliwość regulacji o 25 mm na zewnątrz z każdej strony		
Podnóżki	Standardowe, regulowane kątowno (dla długości podudzia 320-680 mm). Uniwersalne, dynamiczne lub podnóżki Grandis dostępne jako opcja.	Standardowe, regulowane kątowno (dla długości podudzia 320-680 mm). Uniwersalne, dynamiczne lub podnóżki Grandis dostępne jako opcja.	Standardowe, regulowane kątowno dla długości podudzia 320-680 mm. Elektryczne, uniwersalne, dynamiczne lub podnóżki Grandis dostępne jako opcja.
Hemiplegia	Podłokietnik oraz poduszka pod rękę		
Zagłówek	Dostępnych wiele opcji		
Elektryczna regulacja	Możliwy upgrade	Możliwy upgrade	Kąt siedziska, regulacja oparcia i podnóżki. Dostępne także pojedynczo.
Opcje dynamiczne	Tak, komponenty są możliwe.		
Platforma urządzeń medycznych	Opcja		
Krótki opis	Netti V ma wiele możliwości regulacji, co pozwala na idealne dopasowanie — często bez dodatkowych akcesoriów.	Netti V Base, jako podstawa pod siedzisko kubełkowe, ma wiele możliwości regulacji, co pozwala na idealne dopasowanie — często bez dodatkowych akcesoriów.	Netti V EL oferuje elektryczną regulację siedziska, oparcia i podnóżków, a także taką samą elastyczność jak Netti V.

NETTI V FAMILIE

Idealne dopasowanie na piątkę –
nawet gdy zmieniają się potrzeby
i sprawność użytkownika



NETTI V

Regulowany wózek inwalidzki dostosowuje się do indywidualnych potrzeb, także w perspektywie długoterminowej..



NETTI V BASE

Idealny do indywidualnego dopasowania siedziska. Możliwy do zastosowania jako podstawa siedziska.



NETTI V EL

Elektryczna regulacja oparcia, kąta siedziska i podnóżków ułatwia zmianę pozycji siedzącej.

ŁATWE DOSTOSOWANIE DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ POTRZEB

Netti V można dostosować do zmieniających się wymiarów ciała i/lub poziomu sprawności użytkownika. Oznacza to, że nie ma potrzeby przesiadania się na inny wózek inwalidzki.

- regulowana wysokość siedziska
- regulowana szerokość i głębokość siedziska
- doskonały punkt równowagi

NETTI V

Elastyczny wózek inwalidzki dostosowuje się do indywidualnych potrzeb, także w perspektywie długoterminowej.



ZMIENIA SIĘ RAZEM Z TOBĄ

Wyjątkowe możliwości regulacji pozwalają na dostosowanie wózka do potrzeb i sprawności użytkownika, często bez konieczności użycia dodatkowych części. Dzięki temu wózek inwalidzki Netti V może służyć przez długi czas. Łatwo dostosujesz go do różnych sytuacji życiowych, gdy zmienia się stan zdrowia lub wymiary ciała. Liczne opcje regulacji oraz szeroki asortyment akcesoriów umożliwiają łatwą modyfikację wózka, a także jego bezproblemowe dostosowanie dla innych użytkowników o różnych wymaganiach w przypadku ponownego użycia.

Profil użytkownika:

- Asymetrie, takie jak skolioza
- Użytkownicy z tułowiem w kształcie litery A lub V
- Użytkownicy, którzy chcą samodzielnie napędzać wózek
- Wysokie wymagania dotyczące komfortu i możliwości dostosowania
- Potrzeba wsparcia pozycji, stabilizacji i korekcji postawy
- Użytkownicy z porażeniem połowicznym (hemiplegią)
- Użytkownicy, którzy potrzebują uniwersalnego uchwytu na sprzęt medyczny
- Brak lub ograniczenia stabilności tułowia i ciała
- Choroby reumatyczne
- Urazy czaszkowo-mózgowe
- Osoby po amputacji nóg
- Ograniczona mobilność lub siła mięśni
- Młode osoby, które wciąż rosną




350-500 mm

szerokość
siedziska



375-550 mm

głębokość
siedziska

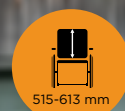

515-613 mm

wysokość
oparcia



345-514 mm
bez poduszek

wysokość
siedziska



-3° - +30°

kąt siedziska



85° - 130°

kąt oparcia



135 kg

Max. obciążenie



35 kg
bez poduszek

Waga



Crashtest
Max. 135 kg



Rozwiązanie
indywidualne



DYNAMIC

NETTI V BASE

Idealny dla indywidualnie dopasowanego rozwiązania siedziska



350-500 mm

szerokość
siedziska



375-550 mm

głębokość
siedziska



515-613 mm

wysokość
oparcia



345-514 mm
bez poduszki

wysokość
siedziska



-3° - +30°

kąt siedziska



85°-130°

kąt oparcia



135 kg

Max. obciążenie



35 kg
bez poduszki

waga



Crashtest
Max. 135 kg



DYNAMIC



MOŻLIWY DO ZASTOSOWANIA JAKO PODSTAWA SIEDZISKA

Netti V Base to idealne rozwiązanie do stworzenia niestandardowego siedziska. Posiada dwie poprzeczki do montażu siedzisk kubelkowych lub systemów oparć. Podobnie jak Netti V, model Base to innowacyjne rozwiązanie o wyjątkowej elastyczności.

Zadbaliśmy o to, aby wózek mógł być dopasowany do użytkownika, a nie na odwrót — najczęściej bez konieczności użycia dodatkowych części. Netti V Base zapewnia wyjątkową stabilność dzięki regulowanemu środkowi ciężkości i rozstawowi kół, co gwarantuje optymalne właściwości jezdne oraz doskonałą zwrotność.

Profil użytkownika

- Użytkownicy potrzebujący siedziska kubelkowego lub innych systemów siedzeniowych
- Asymetrie, takie jak skolioza
- Użytkownicy z tułowiem w kształcie litery A lub V
- Użytkownicy, którzy chcą samodzielnie napędzać wózek
- Wysokie wymagania dotyczące komfortu i możliwości adaptacji
- Potrzeba wsparcia pozycji, stabilizacji i korekcji postawy
- Użytkownicy, którzy potrzebują uniwersalnego uchwytu na sprzęt medyczny
- Użytkownicy z porażeniem połowicznym (hemiplegią)
- Brak lub ograniczona stabilność tułowia i ciała
- Choroby reumatyczne
- Urazy czaszkowo-mózgowe
- Osoby po amputacji nóg
- Ograniczona ruchomość lub siła mięśni
- Młode osoby, które wciąż rosną

Idealne dopasowanie — z funkcjami elektrycznymi



Elektryczne
podnóżki

Elektryczna
regulacja
kąta oparcia

Elektryczna
regulacja
siedziska



350-500 mm

szerokość
siedziska



375-550 mm

głębokość
siedziska



515-613 mm w

wysokość
oparcia



345-514 mm
bez poduszki

wysokość
siedziska



-3° - +30°

kąt siedziska



90° - 118°

kąt oparcia



135 kg

Max. obciążenie



35 kg
bez poduszki

waga



Specjalna
konstrukcja
indywidualne
rozwiązanie



Crashtest
Max. 135 kg

ELEKTRYCZNE DOSTOSOWANIE POZYCJI SIEDZĄCEJ

Netti V EL oferuje użytkownikowi i personelowi opiekunczemu możliwość elektrycznej regulacji kąta siedziska, oparcia oraz podnóżków, co sprawia, że częsta zmiana pozycji nie stanowi problemu.

Elastyczność ramy pozostaje taka sama. Netti V EL został zaprojektowany z myślą o idealnym dopasowaniu, zgodnie z zasadą, że to wózek ma być dostosowany do użytkownika, a nie odwrotnie.

Profil użytkownika

- Użytkownicy potrzebujący częstej zmiany pozycji
- Użytkownicy, którzy mogą samodzielnie zmieniać pozycję siedzącą za pomocą funkcji elektrycznych
- Użytkownicy potrzebujący uniwersalnego uchwytu na sprzęt medyczny

Zdrowe siedzenie

Kjeragbolten to skalny płaskowyż na górze Kjerag w południowo-zachodniej części Norwegii. Sama skała to mierzący 5 m³ osad lodowcowy, który jest zaklinowany w szczelinie lodowcowej.

Norweski artysta ekstremalny, Eskil Rønningsbakken, prezentuje niesamowity pokaz równowagi na naszym wózku Netti Dynamic AdaptPro. Nagranie przedstawia cztery ważne elementy siedzenia dla użytkowników wózków inwalidzkich.



Pozycjonowanie | Stabilność | Różnorodność | Ochrona skóry



zobacz
film

NETTI ADAPTPRO

Niezawodny, wielofunkcyjny wózek inwalidzki – bez kompromisów w jakości siedzenia.

Strona 20

NETTI DYNAMIC ADAPTPRO

Redukuje niekontrolowane zmiany pozycji siedzącej, a tym samym potrzebę repozycjonowania użytkownika z mimowolnymi ruchami.

Strona 22



Nowy standard zdrowego siedzenia

Wprowadzenie Netti AdaptPro oraz Netti Dynamic AdaptPro pozwoliło nam przenieść koncepcję zdrowego siedzenia na wyższy poziom. Te wielofunkcyjne wózki inwalidzkie zostały zaprojektowane z myślą o długim siedzeniu, by zapewnić użytkownikom możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu codziennym. Koncentracja na czterech kluczowych aspektach siedzenia pozwoliła nam zadbać zarówno o komfort, jak i zdrowie użytkowników.



Zminimalizowane siły tarcia i ścinania



20% niższe wartości szczytowe nacisku



Wyjątkowo stabilny w pozycji przechyłu



Łatwa zwrotność i mały promień skrętu

Najlepszy wielofunkcyjny wózek inwalidzki — bez kompromisów w kwestii jakości siedzenia

Rodzina Netti AdaptPro to szereg nowych, opatentowanych innowacji, które zapewniają wyższą jakość siedzenia.

**ZOPTYMALIZOWANY DO
DŁUGOTRWALEGO
SIEDZENIA**



350-500 mm

szerokość
siedziska



głębokość siedziska
SB 350-400 = 355-455
SB 430-500 = 405-505



515-625 mm

wysokość
oparcia



417-447 mm
bez poduszki

wysokość
siedziska



-3° - +30°

kąt siedziska



87° - 133°

kąt oparcia



135 kg

Max.
obciążenie



50,5-53,5 kg

waga



Rozwiązanie
indywidualne



ISO
7176-19

Crashtest
Max. 135 kg



DYNAMIC


ROZWIĄZANIA STANDARDOWO ZAWARTE W ZESTAWIE:

- Zintegrowane przedłużenie oparcia w ramie oparcia
- Elementy mocujące do pasów przytrzymujących wózek w pojeździe
- Szyna montażowa do pasów miedniczych
- Hamulec bębnowy dla osoby towarzyszącej
- Płyta siedziska o właściwościach redukujących nacisk
- Łatwe w obsłudze uchwyty do pochylania, regulacji oparcia, uchwytów do pchania, podłokietników i podnóżków
- Regulowany na wysokość uchwyt do pchania, zajmujący niewiele miejsca
- Dodatkowa stabilność wózka – do 90 mm dłuższa powierzchnia styku kół z podłożem w stanie pochylonym
- Ergonomiczne punkty obrotu minimalizujące siły ścinające i ruchy zsuwania się
- Biomechaniczny podłokietnik zapewniający maksymalne wsparcie, gdy wózek jest pochylony
- Stabilne, łatwe w regulacji podnóżki Netti Grandis z opatentowanym rozwiązaniem ułatwiającym montaż i demontaż


Profil użytkownika:

- Utrata kontroli postawy
- Asymetrie
- Utrata stabilności
- Skłonność do zsuwania się
- Potrzeba odciążenia nacisku
- Potrzeba rozluźnienia w wózku
- Stwardnienie rozsiane
- Urazy czaszkowo-mózgowe
- Choroby neurologiczne
- Wysokie porażenie poprzeczne rdzenia kręgowego

Dzięki przeprojektowanej, wyprofilowanej płycie siedziska, guzy kulszowe mogą się głębiej zapadać, co rozkłada nacisk na większą powierzchnię. Dodatkowo, nacisk przesuwany się bardziej do przodu, na mniej wrażliwe obszary, z dala od guzów kulszowych i kości ogonowej.

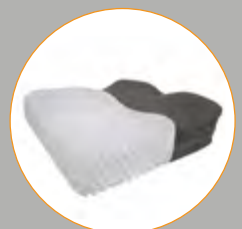

NOWOŚĆ: Netti Precision
Poduszka na siedzisko
Strona 94

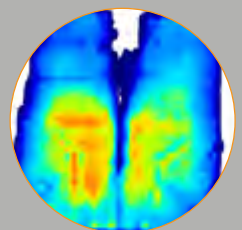

NETTI ADAPTPRO



Opatentowany uchwyt na podnóżki i konstrukcja ramy

 **Netti AdaptPro**

 **Netti Dynamic AdaptPro**

NETTI DYNAMIC ADAPTPRO

Zoptymalizowane pozycjonowanie i rozkład nacisku



350-450 mm

szerokość
siedziska



głębokość siedziska
SB 350-400 = 355-455
SB 430-450 = 405-505



515-625 mm

wysokość
oparcia




417-447 mm
bez poduszki

wysokość
siedziska



-0° - +30°

kąt siedziska

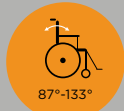

87°-133°

kąt oparcia



135 kg

Max.
obciążenie



50,5-53,5 kg

Waga



Rozwiązanie
indywidualne



Crashtest
Max. 135 kg

Dzięki nawet 6 dynamicznym funkcjom, użytkownicy wózka Netti Dynamic AdaptPro doświadczają znacznie wyższego komfortu siedzenia. Funkcje dynamiczne umożliwiają mimowolne ruchy i zapewniają, że użytkownik może utrzymać zdrową i stabilną pozycję siedzącą. Użytkownik może zachować funkcjonalną pozycję przez cały dzień, co jednocześnie gwarantuje optymalny rozkład nacisku na siedzisku i stopniowo redukuje patologiczne wzorce ruchowe (spastyczność).

Netti Dynamic AdaptPro redukuje niekontrolowane zmiany pozycji siedzącej, a tym samym potrzebę repositionowania użytkownika z mimowolnymi wzorcami ruchowymi.



Opatentowany uchwyt
na podnóżki



Opatentowany system
dynamiczny



Opatentowana
konstrukcja ramy

ZNANE EFEKTY SIEDZENIA DYNAMICZNEGO:

- Zmniejszenie ryzyka odleżyn
- Mniej bólu
- Lepsza funkcja płuc
- Utrzymanie prawidłowej postawy
- Ograniczone zsuwanie się do przodu
- Zminimalizowanie siły i nacisku generowanego przez użytkownika, co przekłada się na mniejsze zużycie wózka.

Netti AdaptPro


Najlepszy wózek wielofunkcyjny — bez kompromisów w kwestii jakości siedzenia.
Strona 20

NETTI DYNAMIC ADAPTPRO




Dynamiczna jednostka oparcia

Wspiera stabilność tułowia w aktywnej pozycji, nawet przy wzmożonym napięciu mięśni. Umożliwia ruchy zgodne z patologicznymi wzorcami ruchowymi i prowadzi użytkownika z powrotem do pozycji wyjściowej. Zapobiega to siłom ścinania oraz niepożądanym zmianom pozycji (zsuwanie się z wózka).

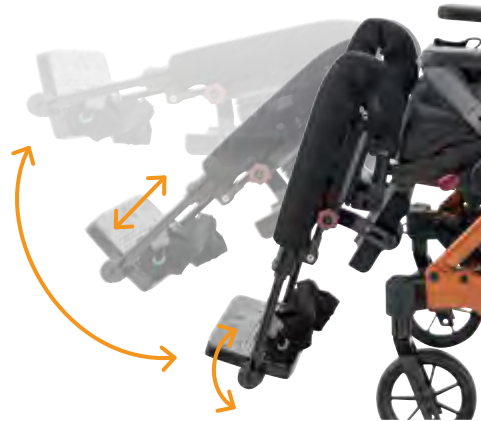

Dynamiczne podparcie nóg

Dynamika podparć nóg została zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić mimowolne ruchy nóg i stóp, jednocześnie kierując je we właściwą, fizjologiczną stronę. Dynamika podnóżka pozwala na ruchy wzdłuż podparcia, a także w stawie kolanowym i skokowym.

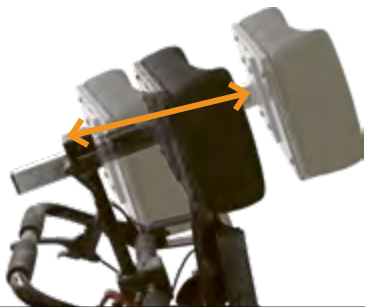

Dynamiczny zagłówek

Dystoniczne wzorce ruchowe głowy są często bardzo silne. Dynamiczny zagłówek Netti absorbuje i amortyzuje te siły, co zapobiega urazom głowy i szyi. Jednocześnie wspiera głowę i szyję, zapewniając odciążającą pozycję.



Dynamiczna jednostka siedziska

Dynamika jednostki siedziska pozwala użytkownikowi na pełne wyprostowanie bioder, co mimowolnie ma miejsce przy silnych, patologicznych wzorcach wyprostnych, a następnie prowadzi użytkownika z powrotem do prawidłowej pozycji siedzącej. W ten sposób optymalnie minimalizuje się szczytowe wartości nacisku i siły ścinające, które są głównymi czynnikami powodującymi odleżyny.

DLA KOGO ODPOWIEDNI JEST NETTI DYNAMIC ADAPTPRO?

Netti Dynamic AdaptPro to w pełni dynamiczny, wielofunkcyjny wózek inwalidzki przeznaczony dla osób z różnymi schorzeniami.

Netti Dynamic AdaptPro jest szczególnie odpowiedni dla użytkowników z następującymi problemami:

- mimowolne ruchy (niekontrolowane ruchy)
- niepokój (pobudzenie)
- tendencja do zsuwania się z siedziska (zsuwanie się)
- potrzeba zmniejszenia nacisku (odciążenie)
- płasawica Huntingtona
- pacjenci po urazach czaszkowo-mózgowych
- choroba Parkinsona
- schorzenia neurologiczne
- porażenie mózgowe

Lekki i wąski

Całkowita szerokość wózka 4U jest tylko o 180 mm większa niż szerokość siedziska – o 195 mm w przypadku hamulca bębnowego – a sam wózek jest lekki.

Wszystkie wózki z rodziny 4U są łatwe w obsłudze, ponieważ wszystkie punkty obsługi są oznaczone kolorem czerwonym. Ponadto wszystkie wózki 4U posiadają składany do przodu hamulec kolanowy, co sprawia, że wsiadanie i wysiadanie z wózka jest jeszcze bezpieczniejsze.

*inspire
joy of life*



NETTI 4U CE

Łatwy w obsłudze wielofunkcyjny wózek inwalidzki dla początkujących, łatwy w konserwacji i obsłudze — optymalny do użytku w geriatrici.

Strona 28

NETTI 4U CE PLUS

Multifunkcyjny wózek inwalidzki z bogatą ofertą akcesoriów, duża elastyczność w zakresie szerokości siedziska dla geriatrici. Wózek dla początkujących w przypadku chorób neurologicznych.

Strona 30

NETTI 4U CED

Atrakcyjny wizualnie (wzorniczo) wózek wielofunkcyjny z wieloma opcjami, o szerokości siedziska do 600 mm. Stanowi funkcjonalną bazę dla systemu Netti Dynamic.

Strona 32

NETTI 4U BASE

Stabilna podstawa dla indywidualnych siedzisk profilowanych (siedzisk skorupowych) lub systemów siedziska i oparcia Ride®. Funkcjonalna podstawa dla systemu Netti Dynamic.

Strona 34





	Netti 4U CE	Netti 4U Plus	Netti 4U CED + CED XL	Netti 4U Base
Szerokość siedziska	400, 450, 500 mm	350, 400, 450, 500 mm	350, 400, 430, 450, 500, 550, 600 mm	350, 400, 450, 500 mm
Regulacja szerokości siedziska	2 x -20 mm	2 x +10 lub 20 mm 2 x -20 mm	2 x +12 mm 2 x -15 mm	
Max. obciążenie	135 kg	135 kg	160 kg	135 kg
Szerokość całkowita	22" lub 24" Koła standardowe: SB + 180 mm Koła standardowe: SB + 195 mm 12" lub 16" Räder : SB + 170 mm			
Głębokość siedziska	425-500 mm	425-500 mm standard 375-450 mm opcja	CED: 425-500 mm CEDS: 375-450 mm	425-500 mm
Wysokości siedziska / koła	24+7" = 465 lub 500 mm Opcjonalnie: 22+6" = 440 lub 475 mm 12/16"+7" = 465 mm	24+7" = 465 lub 500 mm Opcjonalnie:: 22+6" = 440 lub 475 mm 12/16"+7" = 465 mm	24+7" = 465 lub 500 mm Opcjonalnie:: 22+6" = 440 lub 475 mm 12/16+7" = 465 mm	24+7" = 465 lub 500 mm 16+7" = 465 mm
Wysokość oparcia	500 mm	500 mm standard 600 mm opcja	500 mm standard 600 mm opcja	500 mm
Opcjonalne przedłużenie oparcia	Nie	Tak	Tak	Nie
Kąt siedziska	-5° do +20°			
Kąt oparcia	92° do +137°	90° do +135°		92° do +137°
Jednostka oparcia	Zapięcie na rzep zamknięte	Zapięcie na rzep zamknięte Regulowany rzep jako opcja	Regulowany rzep Oparcie aluminiowe jako opcja	Przygotowany pod obudowę oparcia Oparcie aluminiowe i poduszka Netti jako opcja
Poduszka na oparcie	Netti Uno Back Easy Care	Netti Uno Back standar Wiele opcji poduszek Netti i Ride® Java Back.	Oparcie Netti Uno Back Standard Wiele opcji poduszek Netti oraz oparcie Ride® Java Back.	Standardowo bez poduszki. Wiele opcji poduszek Netti i oparcie Ride® Java Back.
Podłokietnik	Zdejmowany	Zdejmowany (obsługa jedną ręką).	Zdejmowany (obsługa jedną ręką).	
Poduszka siedziska	Netti Uno Easy Care Standard. Wiele opcji poduszek — Netti i Ride® Designs		Netti Uno Standard. Wiele opcji poduszek — Netti i Ride® Designs	Standardowo bez poduszki. Wiele opcji poduszek — Netti i Ride® Designs.
Tapicerka	Higieniczna, łatwa w pielęgnacji Easy Care.	Higieniczna, łatwa w pielęgnacji Easy Care. Oddychający materiał 3D opcja	Oddychający materiał 3D Higieniczna, łatwa w pielęgnacji Easy Care - opcja	
Uchwyty do pchania	Prosty uchwyt Uchwyt z regulacją kąta nachylenia, jako opcja.	Uchwyty z regulacją wysokości w standardzie. Pałak do pchania jako opcja	Pałak do pchania z regulacją kąta nachylenia Uchwyty do pchania jako opcja	Prosty uchwyt Pałak z regulacją kąta nachylenia, jako opcja
Regulowane elementy wysuwane	Nie		Tak (np. interesujące w przypadku skręcenia miednicy)	
Podnóżki	Standardowa regulacja kąta - USL 320-680 mm Podnóżki uniwersalne jako opcja		Podnóżki uniwersalne, dynamiczne lub Grandis jako opcja	
Hemiplegia-	Możliwość zastosowania podparcia ramienia i poduszki			
Zagłówek	Standardowy zagłówek typu A Dostępnych wiele opcji.			
Opcje dynamiczne	Nie		Tak wszystkie lub pojedynczo	
Platforma dla urządzeń medycznych	Nie	Nie	Tak	
Krótki opis	Prosty, podstawowy wózek wielofunkcyjny, łatwy w obsłudze i konserwacji - optymalny dla geriatry i lekkich przypadków neurologicznych	Wózek inwalidzki z bogatym wyborem akcesoriów, możliwość samodzielnego dopasowania dla geriatry + urządzenie dla początkujących w przypadku schorzeń neurologicznych.	Wielofunkcyjny wózek z wieloma opcjami. Podstawa dynamicznego, pełnego systemu.	Ekonomiczna podstawa do siedziska kubelkowego, stabilna baza dla systemu dynamicznego Netti, rozwiązanie zindywidualizowane.

Szczegół tkwi w różnicy!



NETTI 4U CE

Podstawowy

- Ekonomiczny wózek inwalidzki zapewniający komfort
- Wysokość oparcia 500 mm
- Oparcie Netti Uno Back z 100 mm prowadnicami bocznymi
- Higieniczna tapicerka Easy Care



NETTI 4U CE PLUS

Więcej indywidualności:

- Liczne warianty poduszek oparcia o wysokości do 600 mm
- Regulowane napięcia oparcia na pasach rzepowych jako opcja
- Możliwość zastosowania 5 szerokości siedziska w jednej ramie (80 mm elastyczności szerokości siedziska)
- System podłokietników obsługiwanych jedną ręką
- Uchwyty do pchania o regulowanej wysokości
- Higieniczna tapicerka Easy Care w standardzie, oddychająca tapicerka 3D jako opcja



NETTI 4U CED

Liczne opcje akcesoriów

- Oparcie z poduszką o regulowanej wysokości, zapewniające idealną stabilizację.
- Regulowane napięcia oparcia na pasach rzepowych w standardzie.
- Podnoszone podłokietniki z regulacją głębokości, umożliwiające użytkownikowi siedzenie bliżej stołu.
- Łatwo regulowany pałak do pchania.
- Możliwość zastosowania kompletnego systemu Netti Dynamic.
- Możliwość wyboru komponentu Netti Dynamic.



NETTI 4U BASE

Do siedzisk skorupowych

- Dla indywidualnych siedzisk profilowanych (siedzisk skorupowych) oraz innych systemów siedzeń i oparc.
- Może być również wyposażony w poduszki siedzisk i oparc Netti lub Ride® Designs.
- Możliwość zastosowania kompletnego systemu Netti Dynamic.
- Możliwość wyboru komponentu Netti Dynamic.

NETTI 4U CE

Wstęp do wielofunkcyjnego zaopatrzenia

Netti 4U CE to ekonomiczna wersja modelu CE PLUS o tej samej wadze i minimalnych wymiarach zewnętrznych. Posiada dobre i solidne oparcie Netti Uno Back z podparciem lędźwiowym oraz 100 mm prowadnicami bocznymi.

COMPACT - KOMPAKTOWY
EASY-TO-USE - ŁATWY W UŻYCIU



HIGIENICZNA TAPICERKA EASY CARE

Jest dostarczany z higieniczną tapicerką Easy Care, która jest łatwa do czyszczenia. Dzięki temu wózek idealnie nadaje się do użytku w szpitalach i placówkach, gdzie często zmieniają się użytkownicy.

ELASTYCZNA GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

W wózku Netti 4U CE głębokość siedziska można łatwo regulować bez konieczności wymiany żadnych części. Każdy wózek można regulować w zakresie 75 mm poprzez proste dostosowanie zawiasów oparcia.

WBUDOWANE PODPARCIE ŁĘDŹWIOWE

Poduszka oparcia ma ergonomiczny kształt, a wbudowana stabilizacja boczna zapewnia podparcie tułowia.

ZMIENNA POZYCJA SIEDZĄCA

Regulacja kąta nachylenia oparcia do 45° oraz pochylenie siedziska do 20° dają dużą swobodę w zakresie zmiany pozycji siedzącej. W celu ułatwienia transferu, siedzisko można pochylić do przodu o 5°.



400-500 mm

szerokość
siedziska




425-500 mm

głębokość
siedziska



500 mm

wysokość
oparcia

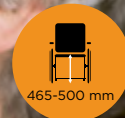

465-500 mm

wysokość
siedziska



-5° - +20°

kąt
siedziska



92°-137°

kąt
oparcia



135 kg

Max
obciążenie



28-32 kg

Waga



Crashtest
Max. 135 kg



Designed in Norway

NETTI 4U CE PLUS

Większa indywidualność i łatwość użytkowania

Netti 4U CE Plus łączy w sobie ekonomiczność i indywidualność na najwyższym poziomie.

Dzięki konstrukcji ramy i bogatemu programowi akcesoriów, ten wózek inwalidzki może sprostać licznym potrzebom użytkownika.

Większa indywidualność.

COMPACT
EASY-TO-USE
PLUS



OPARCIE LIBERTAS

Dzięki oparciu Libertas użytkownik siedzący na wózku inwalidzkim może wykonywać drobne ruchy prostujące tułowia, co pozwala mu na samodzielne zaspokojenie naturalnej potrzeby zmiany pozycji siedzącej. W ten sposób znacznie zmniejsza się tendencja do zsuwania się z wózka do przodu.



NETTI 4U CE PLUS



80 mm elastyczności szerokości siedziska

5 szerokości siedziska w jednej ramie, z możliwością regulacji szerokości o +/- 20 lub 40 mm. Zmniejsza to koszty magazynowania i zwiększa elastyczność w kontakcie z klientem. „Przyjdź raz, a użytkownik już siedzi“.



System boczków obsługiwany jedną ręką

Boczek CE Plus zapewnia maksymalną stabilność i większą łatwość użytkowania. Łatwy montaż i demontaż jedną ręką.



Higieniczna tapicerka Easy Care

Netti 4U CE Plus jest dostarczany z higienicznym obiciem Easy Care, które jest łatwe w czyszczeniu. Dzięki temu wózek doskonale nadaje się do użytku w szpitalach i placówkach, gdzie użytkownicy często się zmieniają. Pokrowce z tkaniny, przeznaczone do użytku domowego, są dostępne jako wyposażenie dodatkowe



Elastyczne rozwiązanie oparcia pleców

Dzięki stałemu oparciu pleców z rzepem w modelu Netti 4U CE Plus mogą Państwo wybrać spośród naszej szerokiej gamy poduszek na plecy. To naprawdę dobre rozwiązanie pozwalające na indywidualne dopasowanie do konkretnego użytkownika. Regulowane napięcie oparcia pleców oraz przedłużenie oparcia również są dostępne jako opcje w tym wózku inwalidzkim.



350-500 mm

szerokość
siedziska



S: 375-450 mm
425-500 mm

głębokość
siedziska



500 mm
(600 mm)

wysokość
oparcia



465-500 mm

wysokość
siedziska



-5° - +20°

kąt
siedziska




90-135°

kąt
oparcia



135 kg

Max.
obciążenie

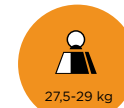

27,5-29 kg

waga



ISO
7176-19

Crashtest
Max. 135 kg

NETTI 4U CED

Wielofunkcyjny wózek z wieloma opcjami

Wózek zapewnia dobre rozwiązania ergonomiczne i jest przyjazny dla użytkownika.
Stanowi funkcjonalną bazę dla systemu Netti Dynamic System.

COMPACT
EASY-TO-USE
DESIGN



ERGONOMICZNA UCHWYT DO PCHANIA

Dzięki ergonomicznemu uchwytowi do pchania z regulacją kąta osoba towarzysząca może znajdować się blisko ciała użytkownika. Uchwyt do pchania ma szybką i łatwą regulację wysokości, dzięki czemu można go dostosować do wzrostu osoby towarzyszącej.

MOŻLIWA KRÓTKA GŁĘBOKOŚĆ SIEDZENIA

Głębokość siedzenia 375 mm możliwa dla małych osób. Głębokość siedzenia może być regulowana o 75 mm bez konieczności zmiany komponentów.

REGULOWANA SZEROKOŚĆ SIEDZISKA

Dzięki zestawowi do poszerzania siedziska szerokości siedzisk 350, 400, 430 i 450 mm można zwiększyć o +12/24 mm. Wszystkie szerokości siedziska można zmniejszyć o -15/30 mm za pomocą poduszek redukujących.

REGULOWANE OPARCIE PLECÓW NA RZEPY

Netti 4U CED standardowo wyposażony jest oparcie pleców z regulowaną napiętością na 6 taśmach rzepowych.

NETTI 4U CED



Regulowany boczek

Boczek można odchylić i schować za oparciem, gdy nie jest używany. Pozycję podłokietnika można zmienić za pomocą przycisku, aby uzyskać optymalne ustawienie – niezależnie od tego, czy siedzisz na wózku, przy stole, czy chcesz wstać..



Również w pełni dynamiczny

Dzięki systemowi Netti Dynamic, wózek inwalidzki Netti 4U CED jest idealny dla użytkowników z zaburzeniami ruchowymi. Wózek dopasowuje się do użytkownika i jest poddany mniejszemu naciskowi podczas skurczu lub spastyki. Zagłówek, oparcie, siedzisko oraz podnóżki dopasowują się i amortyzują ruchy rozszerzania.



Uniwersalny kosz transportowy

Umożliwia elastyczne stosowanie w przypadku różnych urządzeń medycznych lub innych transportowanych przedmiotów.



BOX na stopy dla niespo-kojnych użytkowników

Polecana dla niespo-kojnych użytkowników. Wyściełana pianką i pokryta wytrzymałym materiałem Skai, który jest łatwy do czyszczenia. Dzięki zastosowaniu klamer zamykających, skrzynkę na stopy można łatwo zamontować i zdjąć.



Wkładki wysuwane do kompensacji różnicy długości nóg

Zalecane w przypadku asymetrii bioder lub rotacji miednicy. Możliwość wysunięcia do przodu do 100 mm.



Sztywne oparcie

Dla użytkowników, którzy potrzebują mocniejszego podparcia pleców, dostępne jest aluminiowe oparcie o wysokości 500 mm lub 600 mm. .



Dostępny w rozmiarze XL

Aby zapewnić wyjątkowy komfort również wysokim osobom, wózek Netti 4U CED XL jest dostępny w szerokościach siedziska 550 i 600 mm. Niewielka waga i kompaktowa konstrukcja sprawiają, że wózek jest łatwy do pchania i napędzania..



szerokość siedziska



głębokość siedziska



Wysokość siedziska



wysokość siedziska



kąt siedziska



kąt oparcia



Max obciążenie



waga



Crashtest Max. 160 kg



DYNAMIC

NETTI 4U BASE

Dla wstępnie uformowanych siedzisk z zaletami wózka wielofunkcyjnego Netti

Wózek Netti 4U Base został zaprojektowany tak, aby zapewnić optymalne rozwiązania dla różnych systemów siedzeń, w tym dla sztywnych siedzisk. Rury oparcia są skonstruowane w taki sposób, że większość systemów siedzeń, w tym poduszki Netti, można łatwo na nich zamontować.



350-500 mm

szerokość
siedziska



425-500 mm

głębokość
siedziska



500 mm

wysokość
oparcia



465-500 mm
bez poduszki

wysokość
siedziska



-5° - +20°

kąt siedziska



92° - 137°

kąt oparcia



135 kg

Max.
obciążenie



28-29,5 kg
bez poduszki

waga



Crashtest
Max. 135 kg



DYNAMIC

NETTI 4U BASE

Konstrukcja oparcia pozwala na wiele rozwiązań - zarówno sztywne siedziska, jak i poduszki Netti i Ride®.



Wiele opcji siedziska

Wózek Netti 4U Base został zaprojektowany, aby umożliwić zastosowanie indywidualnych i specjalistycznych systemów siedzeń i oparc, co gwarantuje użytkownikowi optymalne wsparcie. Oprócz sztywnych siedzisk wykonywanych na zamówienie, można w nim z powodzeniem użyć również sprawdzonych poduszek siedziska i oparcia Netti. Dodatkowo, innowacyjną i spersonalizowaną opcją jest wykorzystanie poduszek siedziska i systemów oparcia Ride®.



Regulowane boczki

Boczki można złożyć i schować za oparciem. Podłokietnik można przesunąć do przodu i do tyłu za pomocą przycisku, co pozwala na optymalne ułożenie ramienia dla użytkownika — niezależnie od tego, czy siedzi na wózku, przy stole, czy chce wstać.



Przygotowany pod sztywne siedziska

Okrągłe rurki oparcia o standardowej średnicy zapewniają możliwość zamontowania każdego rodzaju niestandardowego systemu siedzenia.



Również w pełni dynamiczny

Dzięki systemowi Netti Dynamic, wózek inwalidzki Netti 4U Base staje się idealny dla użytkowników doświadczających ruchów wyprostnych. Wózek dopasowuje się do użytkownika i jest poddany mniejszemu naciskowi podczas spastyki lub skurczu. Zagłówek, oparcie, siedzisko oraz podnóżki dopasowują się i absorbują ruchy wyprostne.



Najwyższy poziom adaptacji dla indywidualnych rozwiązań

Dopasowanie wózka wielofunkcyjnego wiąże się z licznymi wyzwaniami. Stawiane są specyficzne wymagania przez użytkownika wózka, członków rodziny lub opiekunów i terapeutów. Dzięki dużej różnorodności wózków Netti, sprzęt można dostosować indywidualnie do każdego wymagania.

*inspire
joy of life*



NETTI III

Podstawa dla indywidualnych rozwiązań

Strona 40



NETTI III EL

Elektryczne sterowanie wszystkimi funkcjami

Strona 42



NETTI III HD

Dla specjalnych rozwiązań -
bardzo wytrzymały

Strona 44



NETTI III XHD

Wyjątkowo wytrzymały - do szerokości siedziska 600 mm

Strona 46



NETTI III XXHD

Wyjątkowo wytrzymały - do szerokości siedziska 750 mm

Strona 46





	Netti III	Netti III EL	Netti III HD	Netti III XHD	Netti III XXHD
Szerokość siedziska	350, 380, 400, 430, 450, 500 mm	350, 380, 400, 430, 450, 500, 550, 600 mm	350, 380, 400, 430, 450, 500, 550, 600 mm	500, 550, 600 mm	650, 700 und 750 mm
Regulacja szerokości siedziska	Zestaw do rozbudowy SB 350-450 mm: 12 mm/stronę. Redukcja o poduszki boczne 25 mm na każdą stronę		szerokości siedziska 350-450 mm: 12 mm na stronę. Redukcja przez poduszki boczne: 25 mm na stronę.	Redukcja o 25 mm na stronę za pomocą poduszek bocznych	
Max. obciążenie	135 kg	160 kg	160 kg	200 kg	
Szerokość całkowita	SB +220 mm Bei 12"/16" SB +210 mm		SB +220 mm Bei 12"/16" SB +210 mm	SB +240 mm Bei 12" SB +210 mm	
Głębokość siedziska	400-500 mm	400-500 mm do 575 mm możliwy		400-500 mm	
Wysokości siedziska / kółka	24+7" = 460 lub 490 mm			24+8" = 475 mm 12+7" = 450 mm	
	405-530 mm	435-500 mm	480-530 mm		
Wysokość oparcia	Standard: 500 mm Opcja: 600 mm				
Kąt siedziska	-9° do +16		Podwójne siłowniki gazowe -9° do +16° Opcja: -10° do +35°	Podwójne siłowniki gazowe -9° do +16°	
Kąt oparcia	86° do 133°			Podwójne siłowniki gazowe 86° do 133°	
Oparcie	Regulowany rzep (możliwa stała jednostka tylna)				
Poduszki oparcia	Standard: Netti Smart Opcja: Netti Stabil, Super Stabil, Kyphotic, Ride® Java Back			Standard: Netti Stabil Opcja: Netti Super Stabil	
Standardowa poduszka siedziska	Netti Uno Seat Opcja: Netti Sit, Netti Precision i Ride® Designs Kissen	Netti Uno Seat do szerokości siedziska 500 mm — Opcja: Netti Sit i Netti Precision Netti Sit dla szerokości siedziska 550 i 600 mm Poduszka Ride® Designs jako opcja do szerokości siedziska 500 mm		Netti Sit	
Płyta siedziska	Standardowe siedzisko przesuwne. Płyta komfortowa jako opcja			Wzmocniona płyta siedzenia	
Tapicerka	Tkanina 3D o właściwościach oddychających Łatwy w pielęgnacji higieniczny pokrowiec Easy Care jako opcja do szerokości siedziska 600 mm				Tkanina 3D o właściwościach oddychających
Uchwyty do pchania	Regulowane na wysokość ręczki Możliwość montażu pałaka o regulowanym kącie				Regulowane na wysokość ręczki
Elementy wysuwane	Tak (z. B. interessant bei Beckenverdreungen)				
Podnóżki	Standard: Podnóżki z regulacją kąta nachylenia Opcja: pozycjonujące podnóżki Grandis, podnóżki uniwersalne lub dynamiczne, podnóżki dla osób po amputacji, płyta pod stopy, pudło na stopy		Standard: Pozycjonujące podnóżki Grandis Opcja: z regulacją kąta nachylenia, uniwersalne lub dynamiczne, dla osób po amputacji, płyta pod stopy, pudło na stopy	Standard: Pozycjonujące podnóżki Grandis z płytami pod stopy Opcje (dla szerokości siedziska do 600 mm): Płyta pod stopy, Dynamiczne podnóżki, Pudło na stopy	Pozycjonujące podnóżki Netti Grandis z ciągłą (jednolitą) płytą pod stopy.
Hemiplegie	Armschale und Kissen möglich				
Zagłówki	Standard: bez Opcja: zagłówki Netti A-F i zagłówk Savant				
Elektryczna regulacja	Możliwy upgrade	Możliwa regulacja kąta siedziska, oparcia i podnóżków. Dostępne również pojedynczo.	Możliwy upgrade		
Opcje dynamiczne	Tak, Podnóżki, oparcie, zagłówki (Rozwiązania na zamówienie)		Tak, pojedyncze i system dynamiczny Netti: Siedzisko, oparcie, podnóżki, zagłówki (rozwiązania na zamówienie)	Tak, do SB 600 mm Podnóżki i zagłówki (Rozwiązania niestandardowe)	Nie
Platforma do urządzeń medycznych	Nie	Tak, do odsysarki, butli tlenowej, respiratora i podobnych.			
Krótki opis	Netti III przeznaczony dla osób z neurologicznymi. Możliwe różne ulepszenia, dobra baza przy postępującej chorobie.	Netti III EL - optymalny wózek uniwersalny (Multi) dla większej niezależności dzięki regulacjom elektrycznym.	Znacznie bardziej wytrzymały wózek wielofunkcyjny (Multi) z szerokimi możliwościami indywidualizacji, np. uniwersalnym uchwytem na sprzęt.	Możliwe większe obciążenie i większa stabilność, obszerne wzmocnienia w zestawie i kolejne możliwe. Zdrowe siedzenie również dla użytkowników XXL.	

NETTI III FAMILIE

Indywidualne potrzeby wymagają indywidualnych rozwiązań!



NETTI III

Podstawa dla indywidualnych rozwiązań

- Siedzisko przesuwne
- Regulowane wysokości siedziska dzięki dużemu wyborowi kół napędowych i kółek skrętnych
- Liczne warianty poduszek oparcia z wysokością do 600 mm
- Możliwość dostosowania szerokości siedziska
- Możliwość wyboru dynamicznych komponentów
- Bogaty program akcesoriów z niezliczonymi rozwiązaniami
- Niska waga, dzięki czemu wózek jest łatwy w prowadzeniu



NETTI III EL

Elektryczna regulacja:

- podłokietniki
- kąt siedziska
- kąt oparcia



NETTI III HD

Do specjalnych rozwiązań - wyjątkowo wytrzymały

- Obciążenie do 160 kg
- Do specjalnych rozwiązań, jak:
 - Urządzenia do tlenoterapii
 - Możliwy kąt nachylenia siedziska do 45°
- wysochy użytkownicy - głębokość siedziska do 575 mm
- Użytkownicy z zaburzeniami ruchowymi



NETTI III XHD

Wytrzymały na bardzo duże obciążenia

- Obciążenie do 200 kg
- Szerokość siedziska do 600 mm



NETTI III XXHD

Bardzo wytrzymały

- Obciążenie do 200 kg
- Szerokość siedziska do 750 mm

Podstawa unikalnej indywidualizacji

Rodzina Netti III posiada najwięcej opcji konfiguracyjnych ze wszystkich produktów Netti, a także bogaty program akcesoriów z niezliczonymi rozwiązaniami.



350-500 mm

szerokość
siedziska



400-500 mm

głębokość
siedziska



500 mm
(600 mm)

wysokość
oparcia



460+490 mm
(405-530)

wysokość
siedziska



-9° - +16°

kąt siedziska



86°-133°

kąt oparcia



135 kg

max
obciążenie



29,7-32,8 kg

waga



Crashtest
Max. 135 kg



Dynamiczne oparcie i dynamiczne podnóżki

Dzięki dynamicznym komponentom Netti III staje się idealnym wózkiem inwalidzkim dla niespokojnych użytkowników. Oparcie, zagłówek i podnóżki mogą być dynamiczne, wózek absorbuje w ten sposób ruchy wyprostne. Netti III HD jest dodatkowo dostępny z dynamiczną płytą siedziska.



Dostosowanie dla użytkownika

Netti III to wózek z największą liczbą dostępnych akcesoriów na rynku. Dzięki swojej elastycznej konstrukcji można go idealnie dopasować do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika.



Sztywne, aluminiowe oparcie

Jeśli potrzebujesz stabilniejszego podparcia pleców, możesz wybrać sztywne oparcie wykonane z aluminium, dostępne w dwóch wysokościach: 500 mm lub 600 mm.



Hamulec jednoręczny

Dla użytkowników, którzy mogą używać hamulca tylko jedną ręką, oferujemy hamulec bębnowy z linką, obsługiwany przez hamulec użytkownika. Na życzenie oferujemy także mechaniczny hamulec centralny.



Siedzisko ślizgowe lub płyta komfortowa

Siedzisko ślizgowe może być zalecane jako pomoc w łatwym przenoszeniu i pozycjonowaniu użytkownika. Płyta siedziska może być wysuwana i wsuwana, podczas gdy użytkownik siedzi na krześle. Gwarantuje to, że użytkownik siedzi na samym końcu krzesła.

Płyta komfortowa wspomaga działanie poduszki siedziska, która ma na celu zmniejszenie nacisku, i pozwala na głębsze zagłębienie się miednicy. Stabilizuje to pozycję siedzącą i zapobiega tendencji do zsuwania się do przodu.




Wyściełana skrzynka na stopy

Zalecana dla niespokojnych użytkowników. Wyłożona pianką z pokryciem z mocnej sztucznej skóry (Skai), która jest łatwa do czyszczenia. Dzięki zastosowaniu wsporników zamykających skrzynkę na stopy można łatwo zamocować i zdjąć.

 **Netti**® Customized

Indywidualna konstrukcja na zamówienie

Dzięki elastycznej konstrukcji Netti III umożliwia indywidualne dostosowanie do potrzeb. Netti III często służy jako podstawa do tworzenia spersonalizowanych rozwiązań dla użytkowników o specjalnych wymaganiach.

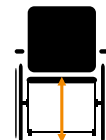

Zmienna wysokość siedziska

Dzięki dużemu wyborowi kół napędowych i kół skrętnych, wysokość siedziska można dostosować do potrzeb użytkownika. Możliwa jest wysokość siedziska od 405 mm do 530 mm.

NETTI III EL

Elektryczne rozwiązanie dla większej niezależności!

Netti III EL może być wyposażony w elektryczne sterowanie do regulacji siedziska, oparcia i podnóżków. Podobnie jak w przypadku standardowego modelu, wózek umożliwia optymalne, indywidualne dostosowanie.

ELEKTRISCH



elektryczne
podnóżki

elektryczna
regulacja
oparcia

elektryczna
regulacja kąta
siedziska





350-600 mm

szerokość
siedziska




400-500 mm
(525-575)

głębokość
siedziska



500 mm
(600 mm)

wysokość
oparcia

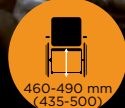

460-490 mm
(435-500)

wysokość
siedziska



-9° - +16°

kąt siedziska



86° - 133°

kąt oparcia



160 kg

Max.
obciążenie



ca. 39 kg

waga



Crashtest
Max. 160 kg



Rozwiąza-
niem na
miarę



DYNAMIC

NETTI III HD

Wzmocniona wersja Netti III umożliwia wiele specjalistycznych rozwiązań

Wózek jest dopuszczony do obciążenia do 160 kg.
Jest bardzo stabilny i wyposażony we wzmocnione koła napędowe i sterujące, podwójne siłowniki gazowe do pochylania siedziska oraz siedzisko z funkcją przesuwania.
W przypadku jeszcze wyższego obciążenia, można zastosować Netti III XHD.

HEAVY
DUTY



WYSOKI KOMFORT I DOBRE WSPARCIE

- Szerokość siedziska od 350 do 600 mm. Możliwość poszerzenia o 12 mm z każdej strony przy szerokościach od 350 do 450 mm.
- Maksymalne obciążenie 160 kg.
- Podwójny siłownik gazowy do pochylania siedziska zapewnia dodatkową stabilność.
- Wysokiej jakości poduszka oparcia w standardzie. Model Netti Smart dla użytkowników o zwiększonym zapotrzebowaniu na komfort. Ergonomicznie ukształtowane, precyzyjnie umiejscowione podparcie lędźwiowe oraz 120 mm prowadnica boczna, zapewniające zwiększoną stabilność tułowia.



350-600 mm

szerokość
siedziska



400-500 mm
(525-575)

głębokość
siedziska



500 mm
(600 mm)

wysokość
oparcia



460-490 mm
(480-530)

wysokość
siedziska



-9° - +16°
(-10° - +35°)

kąt siedziska



86°-133°

kąt oparcia



160 kg

max
obciążenie



ca. 36 kg

waga



Crashtest
Max. 160 kg



Rozwiązanie
indywidualne



DYNAMIC




Niezawodne i solidne podnóżki Grandis

Standardowe podnóżki pozycjonujące Netti Grandis stanowią kompleksowe i indywidualne rozwiązanie. Redukują nacisk na guzy kulszowe i zmniejszają siły ścinające.



Kąt pochylenia siedziska 45°

Dla użytkowników, którzy muszą szczególnie często zmieniać pozycję siedzącą i dbać o maksymalne odciążenie, możemy zaoferować wózek Netti III HD z 45° kątem pochylenia siedziska – czyli 10° do przodu i 35° do tyłu.

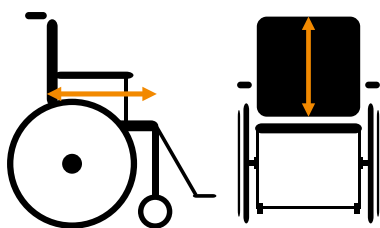

Dla użytkowników, którzy potrzebują dużej głębokości siedziska lub wysokiego oparcia.

Dla użytkowników, którzy potrzebują większej głębokości siedziska, można wybrać opcję do 575 mm. Dzięki temu można zapewnić prawidłowe ułożenie. Standardowe przedłużenie oparcia można również ustawić do wysokości 700 mm. Jeżeli dłuższą poduszkę oparcia odpowiednio wyreguluje się w górę, można również uzyskać pełne wsparcie.



Pochylenie siedziska i oparcia regulowane przez użytkownika

Dźwignie do uruchamiania pochylenia siedziska i oparcia można zamontować na podłokietniku



Dynamic System

Dzięki systemowi dynamicznemu Netti Netti III HD staje się idealnym wózkiem inwalidzkim dla użytkowników z zaburzeniami ruchowymi. Wózek dostosowuje się do użytkownika. Zagłówki, oparcie, siedzisko i podnóżki dopasowują się i pochłaniają ruchy wyprężne.



Uniwersalny uchwyt na urządzenia, np. do tlenu

Elastyczne rozwiązanie z regulowanym systemem mocowania, zapewniającym stabilne umieszczenie urządzeń medycznych, np. do tlenu lub odsysania. Kompatybilny z wieloma różnymi urządzeniami.

NETTI III XHD & NETTI III XXHD

Maksymalne odciążenie dla pacjentów bariatrycznych

XHD oznacza „ekstra mocna nośność” i wózek jest przystosowany do obciążenia 200 kg. Posiada regulację kąta oparcia i siedziska, ponieważ użytkownicy z większą wagą muszą częściej zmieniać pozycję, aby zmniejszyć ucisk.
To wyposażenie nie idzie na żadne kompromisy

XTRA
HEAVY
DUTY



500-750 mm

szerokość
siedziska



400-500 mm

głębokość
siedziska



500 mm
(600 mm)

wysokość
oparcia



450 / 475 mm

wysokość
siedziska



-9° - +16°

kąt siedziska



86° - 133°

kąt oparcia



200 kg

max
obciążenie



ca. 36,2 kg

waga



Specjalna
konstrukcja



Crashtest
Max. 160 kg



SB 500-600 mm

WZMOCNIONY WÓZEK INWALIDZKI O MAKSYMALNEJ NOŚNOŚCI DO 200 KG.


- Wzmocnione koła napędowe
- Wzmocnione koła skrętne
- Podwójny siłownik gazowy do mechanizmu regulacji kąta siedziska zwiększający stabilność wózka
- Podwójny siłownik gazowy do mechanizmu regulacji kąta oparcia zwiększający stabilność wózka
- Wzmocnione zawiasy oparcia
- Wzmocnione uchwyty podłokietników
- Stabilizator zagłówka
- Osłona na ubranie z aluminium
- Wzmocnione wysuwane elementy do regulacji głębokości siedziska z przodu
- W pełni wzmocniona płyta siedziska
- Wzmocniona rama dla większej stabilności
- Szerokie poduszki podłokietników (420x80 mm)
- Niezawodne i solidne podnóżki Grandis

NETTI III XHD & NETTI III XXHD



Standardowa stabilizacja zagłówka

Idealna w przypadku szczególnie dużego obciążenia zagłówka lub całej jednostki oparcia. Umożliwia bezpieczne przymocowanie zagłówka do rur oparcia, aby zapobiec jego obracaniu się.

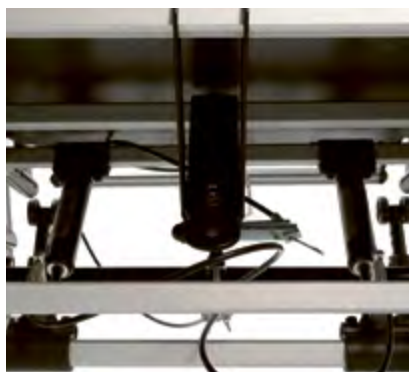

Podwójny siłownik w standardzie

W celu zwiększenia stabilności i ułatwienia obsługi, do regulacji pochylenia siedziska i oparcia zamontowano dwa siłowniki.



Uniwersalny uchwyt na urządzenia, np. do tlenu

Do użytku z urządzeniami do tlenoterapii lub ssakami, itp. Elastyczne rozwiązanie z regulowanym systemem mocowania do stabilnego mocowania urządzeń medycznych. Kompatybilne z różnymi urządzeniami.



Dodatkowa stabilność

Poduszka oparcia Netti Stabil zapewnia tułowi dodatkową stabilność. 170 mm bocznego prowadzenia dla większej stabilności. Dobre możliwości łączenia z bocznym podparciem Stable




Niezawodne i solidne podnóżki Grandis

Standardowe podnóżki pozycjonujące Grandis to element kompleksowego, spersonalizowanego rozwiązania. Odpowiednie ułożenie nóg zmniejsza nacisk na guzy kulszowe i minimalizuje siły ścinające.



Podnóżek

Blokowany podnóżek jako standard od szerokości siedziska 650 mm. Dla szerokości siedziska 500-600 mm dostępny jako opcja

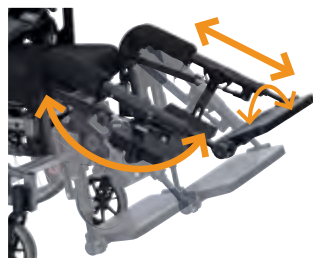

SB 500-600 mm

Dynamiczne podnóżki i zagłówek

Podnóżki i zagłówek mogą być dynamiczne. Wózek pochłania w ten sposób ruchy wyprostne.



Wysoka nośność

Max 200 kg



Swoboda ruchu prowadzi do lepszej pozycji siedzącej

Międzynarodowe badania dowodzą, że mniejsza częstotliwość korekt pozycji siedzącej prowadzi do bardziej stabilnej i odprężonej postawy. Ułatwia to aktywne uczestnictwo w życiu codziennym – zwłaszcza w kontaktach społecznych z rodziną i przyjaciółmi.

*inspire
joy of life*



NETTI DYNAMIC BASE

Nadaje się do siedzisk kubełkowych i innych rozwiązań niestandardowych.

Strona 53



NETTI DYNAMIC CED

Kompaktowy wózek inwalidzki wielofunkcyjny

Strona 53



NETTI DYNAMIC III HD

Wielofunkcyjny wózek inwalidzki z szeroką gamą akcesoriów.

Strona 53



NETTI DYNAMIC ADAPTPRO

Zdrowe siedzenie w wózku w pełni dynamicznym

Strona 22



NETTI DYNAMIC SYSTEM



**Opatentowane
rozwiązania**



**System
Modułowy**



**Udokumentowany
efekt**

Wolność ruchu zwiększa jakość życia

W przypadku konwencjonalnego wózka inwalidzkiego, utrzymanie prawidłowej pozycji siedzącej u użytkowników ze spastyką i innymi ruchami wyprostnymi jest często trudne. Istnieje ryzyko, że ciało zostanie wypchnięte z wózka przez skurcze, co prowadzi do złej pozycji siedzącej i dużego nacisku na ciało użytkownika.

System Netti Dynamic to wysoce zaawansowany i opatentowany system wspomagania ruchu dla użytkowników z porażeniem mózgowym lub dystonią. Silne skurcze i przykurcze mięśniowo-kostne mogą prowadzić do zwichnięć stawów, co utrudnia prawidłowe korzystanie z wózka i uniemożliwia stabilną pozycję siedzącą. Dodatkowo, osoby te często muszą być ponownie układane przez opiekunów w prawidłowej pozycji.

Ponadto, siły powstające podczas ruchów wyprostnych mają wpływ na całą konstrukcję wózka i prowadzą do jego znacznego obciążenia.

Istotą systemu Netti Dynamic jest to, że absorbuje on ruchy. Oznacza to, że system siedziska, oparcia i podnóżków podąża za mimowolnymi ruchami użytkownika. Dzięki temu, podczas fazy wyprostu, zmniejsza się zwiększone napięcie

mięśni, a z czasem może nastąpić zmniejszenie występowania skurczów.

Wózek ten można zatem określić jako dynamiczny, ponieważ dostosowuje się do ruchów zarówno górnej, jak i dolnej części ciała.

Przeprowadzone przez nas testy wykazały, że zmniejszenie częstotliwości korekt pozycji siedzącej ma działanie relaksujące i sprzyja uczestnictwu w codziennym życiu z rodziną i przyjaciółmi.


Dzięki opatentowanemu systemowi Netti Dynamic, użytkownik po skurczach wraca do swojej pierwotnej i wygodnej pozycji siedzącej.



Dynamiczne komponenty

Współdziałanie podnóżków, oparcia, siedziska i zagłówka zapewnia wygodne siedzenie. Kiedy użytkownik wykonuje ruchy wyprostne nogami, ma to również wpływ na kąt pochylenia bioder. Z tego powodu ważne jest, aby płyta siedziska również dostosowywała się do ruchu.

Istotą systemu Netti Dynamic jest to, że ruchy są natychmiast wychwytywane (absorbowane). Oznacza to, że system siedziska i oparcia, a także podnóżki, podążają za mimowolną aktywnością użytkownika. W rezultacie, w fazie wyprost, można zmniejszyć zwiększone napięcie mięśni, a z czasem może nastąpić zmniejszenie występowania skurczów.

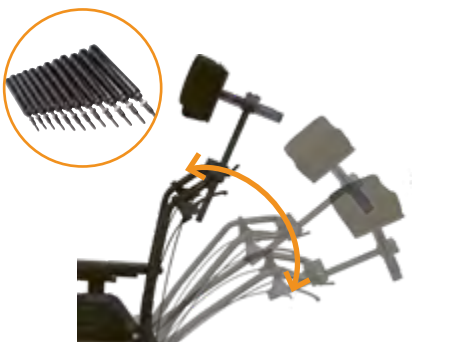

Dynamiczne oparcie

Oparcie dopasowuje się zarówno do niewielkich, jak i ekstremalnych ruchów tułowia, aż do całkowitego odchylenia oparcia do tyłu. Powstałe siły są aktywnie absorbowane przez wózek..



Dynamiczny zagłówek

Zagłówek dostosowuje się do ruchów głowy użytkownika i jednocześnie je amortyzuje dzięki siłownikom gazowym, zachowując pierwotne ustawienie wysokości i głębokości. Daje to użytkownikowi najlepszą podstawę do uczestniczenia w życiu społecznym. Zmniejsza to również obciążenie głowy i szyi użytkownika




Dynamiczna płyta siedziska

Płyta siedziska dostosowuje się do ruchów wyprostnych w stawie biodrowym. Zapobiega to zsuwaniu się użytkownika do przodu i aktywnie przeciwdziała złej pozycji siedzącej..



Dynamiczne podnóżki

Dynamiczne podnóżki mają duże znaczenie, ponieważ umożliwiają użytkownikowi utrzymanie prawidłowej pozycji siedzącej przez długi czas. Są elastyczne pod względem kąta kolan, długości i ułożenia stóp.

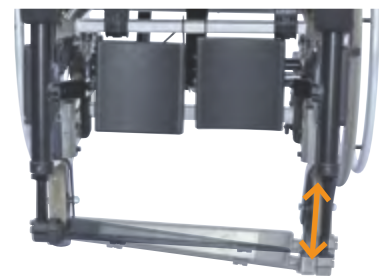

Zalety dynamicznego wózka inwalidzkiego

- W każdej chwili prawidłowa pozycja siedząca i rozkład nacisku, ponieważ użytkownik po skurczach jest automatycznie prowadzony z powrotem do swojej pierwotnej pozycji.
- Zmniejszone ryzyko zsuwania się do przodu
- Mniejsza potrzeba ponownego pozycjonowania.
- Długotrwałe utrzymanie optymalnej pozycji siedzącej dzięki dostosowywaniu się dynamicznych komponentów wózka.
- Poprawa ogólnej funkcjonalności (np. pozycji głowy).
- Długoterminowe zmniejszenie intensywności i częstotliwości zaburzeń ruchowych
- Działanie regulujące napięcie mięśni dzięki ruchom dynamicznych komponentów wózka

Grupa docelowa


- Porażenie mózgowe (CP)
- CP spastyczne
- CP dyskinetyczne
- CP ataktyczne
- Athetoza
- Dystonie
- Choroba Huntingtona
- Choroba Parkinsona
- Zespoły otępienne
- Urazy czaszkowo-mózgowe
- Urazy rdzenia kręgowego

NETTI DYNAMIC SYSTEM



NETTI DYNAMIC BASE

Nadaje się do siedzisk kubełkowych i innych rozwiązań niestandardowych

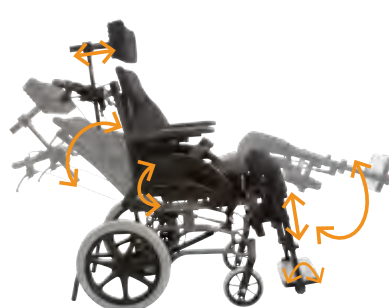

NETTI DYNAMIC CED

Kompaktowy wózek inwalidzki wielofunkcyjny



NETTI DYNAMIC III HD

Wielofunkcyjny wózek inwalidzki z szeroką gamą akcesoriów



NETTI DYNAMIC ADAPTPRO

Lepszy rozkład nacisku, minimalne zsuwanie i minimalne siły ścinające. Strona 22.

- | | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| ✦ Netti V | ✦ Netti III | ✦ Netti 4U CED |
| ✦ Netti V Base | ✦ Netti III HD | ✦ Netti 4U Base |
| | ✦ Netti III XHD | ✦ Netti AdaptPro |

DYNAMIC ELEMENTS

W zależności od indywidualnych objawów użytkownika i konkretnego celu, dynamiczne komponenty mogą być również stosowane pojedynczo

Dostosowanie wózka do użytkownika, a nie na odwrót

Mamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu spersonalizowanych rozwiązań. W przypadkach, gdy nasze standardowe produkty i akcesoria nie spełniają potrzeb użytkownika, nasz zespół doświadczonych techników i terapeutów zajęciowych może indywidualnie dopasować wózek lub akcesoria.

*inspire
joy of life*

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA SPECJALNE

Wózki i akcesoria produkowane na indywidualne zamówienie.

Strona 56

NETTI BED

la użytkowników, którzy są mobilizowani w pozycji leżącej.

Strona 58

NETTI III EL POCHYLENIE OPARCIA O 180°

Dla użytkowników, którzy potrzebują długich okresów odpoczynku.

Strona 60

NETTI DYNAMIC IQ

Unikalny projekt elektrycznego wózka inwalidzkiego od TA
z dynamicznym siedziskiem od Netti.

Strona 61

NETTI BARIATRIC

Dla użytkowników otyłych. Dla szerokości siedziska do 1000 mm
i wagi użytkownika do 450 kg.

Strona 62



Indywidualne rozwiązania specjalne

Poniżej znajdują się przykłady indywidualnie dopasowanych wózków i akcesoriów. Chętnie opracujemy wraz z Państwem rozwiązania dostosowane do potrzeb konkretnego użytkownika.



Dwuczęściowy podnóżek



Podnóżka z oparciem bocznym



Podnóżka z podparciem podudzi



Wyściełany półstolik z prowadnicą boczną.



Długie podparcia podudzi z pasami.



Zagłówek z podwójnymi prowadnicami bocznymi.





Wózek inwalidzki z masywną tapicerką

Wszystkie części ramy są wyściełane, aby wyeliminować ryzyko obrażeń u użytkownika.



Wózek inwalidzki dla bardzo małych użytkowników.



Wózek z różnymi rozwiązaniami specjalnymi

Wózek z tapicerką na siedzisku i oparciu oraz wyściełaną podnóżką. Na przykład dla użytkowników, którzy nie mogą zgiąć nóg.



Wózek inwalidzki dla osoby o asymetrycznej budowie ciała

Po lewej stronie zamontowano dodatkowe peloty podtrzymujące, aby odciążyć plecy, a po prawej stronie dodano dodatkową tapicerkę. Zapewniono również rozszerzone wsparcie dla lewej kończyny górnej i głowy, a także miękkie wyściełanie po prawej stronie.



Wózek z różnymi rozwiązaniami specjalnymi

Podnóżki, odwodzenie i stolik zostały wykonane na specjalne zamówienie

Dla osób, które można przemieszczać wyłącznie w pozycji leżącej

Netti Bed jest zbudowany na ramie Netti III, a jego długość i szerokość można indywidualnie dopasować.

Netti Bed jest dostępny w wielu różnych konfiguracjach, np. z 2- lub 3-częściowym siedziskiem/leżanką i funkcjami elektrycznymi



 **Netti**® Bed
COMFORT

Identyfikacja potrzeb użytkownika

Jest to produkt wykonany ręcznie na zamówienie, dlatego prosimy o skorzystanie z naszego formularza dopasowania. Znajdą tam Państwo pomoc i dodatkowe informacje.



450-750 mm

szerokość
siedziaka



1750-2000 mm

długość



Na życzenie

wysokość
oparcia



750 mm

standardowa
wysokość
siedziaka



500-950 mm

elektryczna
regulacja
wysokości
siedziaka



Na życzenie

Max waga
użytkownika

Pochylenie oparcia o 180°

Dla użytkowników, którzy potrzebują szerokiego zakresu ustawień kąta oparcia i okresów odpoczynku. Ta funkcja oszczędza użytkownikowi wielokrotnego przenoszenia się z łóżka na wózek. Dzięki temu, mimo leżącej pozycji, może pozostać mobilny i uczestniczyć w życiu społecznym.



Jako opcję specjalną oferujemy funkcję leżenia 180° w wózku Netti III Electric. Łączymy w ten sposób wszystkie zalety kompaktowego i łatwego w manewrowaniu wózka Netti III EL z możliwością pełnej funkcji leżącej.

Unikalny projekt elektrycznego wózka inwalidzkiego od TA z dynamicznym siedziskiem od Netti

Dodatkowa mobilność dla użytkowników z mimowolnymi ruchami, z prędkością 6 km/h i optymalnym zasięgiem 40 km. Unikalne zawieszenie na wszystkich kołach zapewnia niezwykle komfortową i spokojną jazdę. Ułatwia również pokonywanie nierówności, krawężników i większych przeszkód. Idealna obsługa i komfort



NETTI DYNAMIC IQ - DYNAMICZNY ELEKTRYCZNY WÓZEK INWALIDZKI

Wózek jest standardowo wyposażony w pełną dynamiczną konfigurację z dynamicznym siedziskiem i dynamicznym cylindrem oparcia. W zależności od potrzeb użytkownika, możesz wybrać między oparciem o kącie 15° a elastycznym oparciem o kącie 40°

- Dynamiczna płyta siedziska
- Dynamiczne oparcie
- Dynamiczne podnóżki (opcja)
- Dynamiczny zagłówek (opcja)

Zalety

- Wózek podąża za ruchami użytkownika
- Mniejszy dyskomfort podczas skurczów.
- Lepsza kontrola postawy.
- Zmniejszone ryzyko zsuwania się z wózka.
- Mniejsza potrzeba ponownego pozycjonowania.
- Lepsze samopoczucie użytkownika.
- Utrzymanie pozycji przez dłuższy czas.

Indywidualne dopasowanie, również dla użytkowników o większej wadze

Nasi technicy i doradcy mogą dostosować wózki inwalidzkie do większości potrzeb. W ten sposób Netti może zaoferować wzmocnione wózki o szerokości siedziska do 1000 mm i dla wagi użytkownika do 450 kg. Dotyczy to modeli 450T i 450F.

Wózek jest przystosowany do dużej wagi użytkownika, ale oprócz tego bardzo ważne jest, aby siedzisko i oparcie mogły być precyzyjnie dopasowane do ciała, ponieważ wiele osób otyłych ma problemy z kręgosłupem. Z tego powodu system siedzenia uwzględnia zarówno dużą wagę użytkownika, jak i optymalny rozkład nacisku. Wózek jest dostępny w wersji elektrycznej, w której siedzisko i oparcie można regulować niezależnie od siebie.

Netti® Bariatric



szerokość
siedziska



max. waga
użytkownika



Netti 450T

Elektryczna regulacja kąta siedziska, podnóżków i oparcia




Netti 450F

Oparcie z możliwością ręcznej regulacji w 3 kątach.

Współpraca dla optymalnych rezultatów

Nasz zespół, składający się z doświadczonych techników, pracowników biurowych i przedstawicieli handlowych, pomoże Państwu w znalezieniu, opisanii i wyprodukowaniu odpowiedniego rozwiązania, tak aby użytkownik był właściwie zaopatrzony.

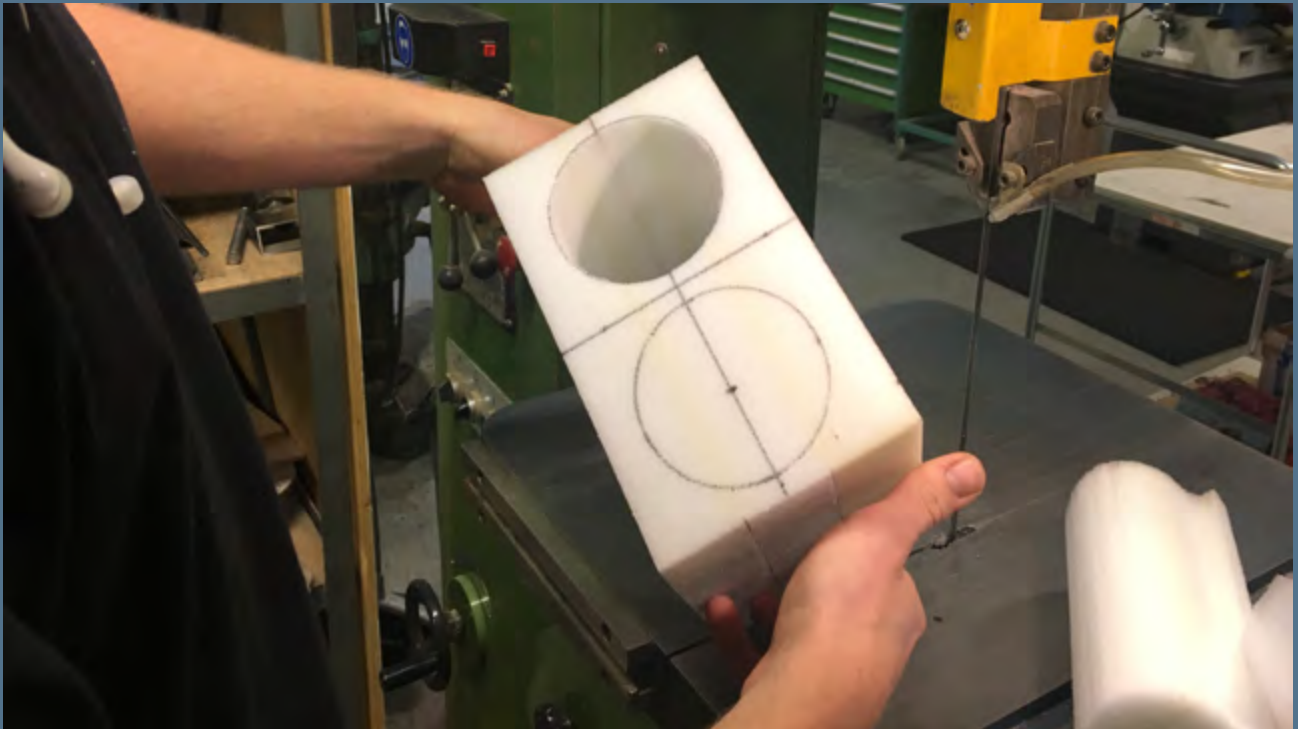



Dzięki akcesoriom możesz dopasować wózek do swoich potrzeb

Nasz program akcesoriów do wózków Netti jest wyjątkowy. Posiadając wózek Netti, nie jesteś ograniczony do jednego rozwiązania. Dzięki naszym standardowym i specjalnym akcesoriom możesz skonfigurować wózek, który jest idealnie dopasowany do indywidualnych potrzeb użytkownika.

*inspire
joy of life*

PODNOŻKI

Strona 66

|

STABILIZACJA MIEDNICY

Strona 68

|

WSPARCIE DLA RAMION

Strona 71

|

OPARCIE

Strona 72

|

STABILIZACJA GÓRNEJ CZĘŚCI TUŁOWIA

Strona 73

|

ZAGŁÓWKI

Strona 75

|

SAMODZIELNOŚĆ

Strona 76

|

FUNKCJE ELEKTRYCZNE

Strona 77

|

NETTI W TRASIE

Strona 79

|

DOMOWE WSPOMAGANIE ODDYCHANIA

Strona 80

|

HAMULCE I UCHWYTY HAMULCOWE

Strona 82

|

ROZWIĄZANIA TERAPEUTYCZNE

Strona 83

|

DODATKOWY NAPĘD

Strona 84

|

RAMPY

Strona 88

Podnóżki


Dobre zaopatrzenie w wózek inwalidzki zawsze zaczyna się od nóg. Podnóżki są swego rodzaju fundamentem zaopatrzenia w wózek inwalidzki. Służą one na przykład do zainicjowania i utrzymania optymalnej pozycji siedzącej przez dłuższy czas. Z tego powodu Netti oferuje liczne rozwiązania w zakresie podnózek, aby sprostać indywidualnym potrzebom użytkowników wózków inwalidzkich.



Podnóżki Grandis

Dla wszystkich wózków Netti ze skręcanymi, wysuwanymi elementami. Podnózek pozycjonujący Netti Grandis jest przeznaczony do kompleksowych, indywidualnych rozwiązań. Zmniejsza nacisk i siły ścinające, co czyni go idealnym dla użytkowników z przykurczami, asymetrią, stopą końsko-szpotałą czy słońiowaczną.

Charakteryzuje się prostą obsługą dzięki uchwytom, czytelnym skalom i stożkowemu, wysuwanemu elementowi. Posiada regulację kąta, w tym ogranicznik kąta, oraz wielostronnie regulowane podparcia podudzi i stóp.

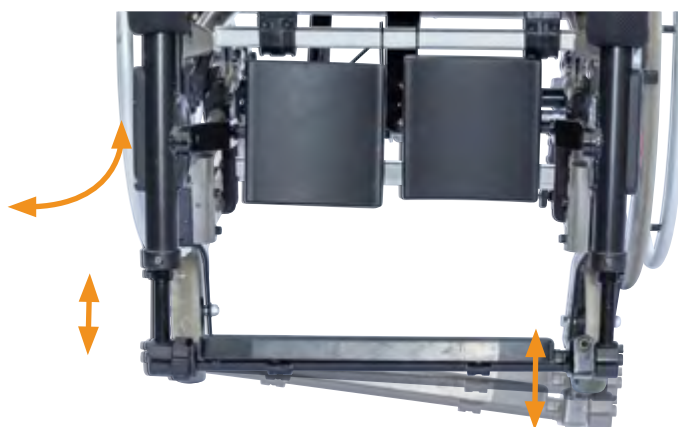

Dynamiczne podnóżki

Dla wózków z serii Netti III, Netti AdaptPro, Netti 4U CED, Netti 4U Base, Netti V oraz Netti Dynamic. Dynamiczne podnóżki są niezwykle ważne, aby użytkownik mógł utrzymać prawidłową postawę siedzącą przez dłuższy czas. Są one elastyczne pod względem kąta zgięcia w kolanie, długości oraz pozycji stopy.



Podnóżki z regulacją kąta

Nasze podnóżki z regulacją kąta mają ergonomiczną konstrukcję oraz automatyczną kompensację długości podudzia



Uniwersalne podnóżki

Uniwersalne podnóżki mają płynną regulację kąta i są dobrym rozwiązaniem dla użytkowników z przykurczami kolan, ponieważ można je ustawić pod kątem mniejszym niż 90°



Podnóżki elektryczne

Dla serii III i V. Możliwe są również podpórki pod stopy oraz platformy na stopy



Podparcie podudzia z zawiasem

Dzięki zawiasom podparcie łydki można w razie potrzeby odchylić do tyłu. Jest to rozwiązanie zalecane dla użytkowników ze sztywnymi mięśniami nóg, np. ze sztywnymi mięśniami ud.



Poduszka na podparcie podudzia

Dla użytkowników o bardzo wrażliwej i łatwo ulegającej uszkodzeniom skórze, dostępna jest opcjonalna podkładka podparcia podudzi



Wyściółka na podnóżki

Większość rozwiązań podnóżków oferuje miękką wyściółkę, która jest dostępna dla osób siedzących bez obuwia lub wrażliwych na ucisk



Wyściółka do mocowania podparcia podudzia

Dla użytkowników o bardzo wrażliwej i łatwo ulegającej uszkodzeniom skórze, dostępna jest opcjonalna poduszka na mocowanie podparcia podudzia z regulacją kąta.



Zapiętek

Jeśli stopy i kostki wymagają lepszego wsparcia, na podnóżkach z regulacją kąta można zamontować zapiętek. Dodatkowo, paski stabilizujące stopy mogą unieruchomić kostkę i stopę na podbiciu.



Pasek stabilizujący stopę

Pasek stabilizujący stopę służy do dyskretnej stabilizacji stóp, aby przede wszystkim zapobiec ich zsuwaniu się do przodu (np. w przypadku tzw. „stopy końsko-szpotawej”).



Pasek na kostkę.

Paski na kostki służą do stabilizacji stóp, jednocześnie umożliwiając użytkownikowi pewien zakres ruchu (np. w przypadku hipermotorycznych zaburzeń ruchowych, elastycznych deformacji stawu skokowego).



Pasek na łydkę Bodypoint

Pasek na łydkę zapewnia elastyczne i szerokie podparcie dla podudzi. Pozwala to na uzyskanie niezbędnej stabilizacji oraz zapobiega powstawaniu odleżyn.



Podpórka dla osób po amputacji, przeznaczona do podnóżków Grandis

Podparcie dla amputowanych z regulacją kąta, wysokości i głębokości płyty podudzia. Podpórka jest przeznaczona dla osób po amputacji kończyny poniżej kolana, które wymagają specjalnego wsparcia..



Box na stopy

Zalecany dla niespokojnych użytkowników. Koszyk jest wypełniony pianką i pokryty wytrzymałą ekoskórą, która jest łatwa do czyszczenia. Dzięki uchwytnym zamykającym koszyk można łatwo zamontować i zdjąć. Zaleca się użycie dystansów do kółek skrętnych, aby zwiększyć stabilność.



Płyta podnóżka

Bardzo stabilna płyta pod stopy, która jest łatwa w montażu. Gdy nie jest używana, można ją złożyć do góry i zablokować



Stabilizacja miednicy

Wsuwanie się w wózek inwalidzkim lub odchylenie od optymalnej pozycji siedzącej wraz z upływem czasu to jedno z największych wyzwań w przypadku wielofunkcyjnych wózków inwalidzkich. Ryzyko wystąpienia odleżyn i innych obrażeń sprawia, że stabilizacja miednicy jest niezwykle ważna.

W zależności od potrzeb i możliwości użytkownika, można zastosować odpowiednie tapicerki lub specjalne pasy, aby pomóc w długotrwałym utrzymaniu optymalnej pozycji siedzącej.



Komfortowa tapicerka dla wózków z serii Netti V i Netti III

Służy do zmniejszenia szerokości siedziska wózka oraz stabilizacji miednicy użytkownika. Wykonany jest z pianki



Komfortowa tapicerka do wózków Netti 4U CED oraz Base

Służy do zmniejszenia szerokości siedziska oraz stabilizacji miednicy użytkownika. Podkładka wykonana jest z pianki formowanej wtryskowo o grubości 13 mm. Podłokietnik można również odchylić do tyłu wraz z podkładką.



Poduszki komfortowe do Netti 4U CE Plus

Piankowa podkładka służy do zmniejszenia szerokości siedziska o 20/40 mm oraz do stabilizacji miednicy użytkownika.



Poduszki komfortowe do wózka Netti 4U CE

Używane do zmniejszenia szerokości siedziska wózka i stabilizacji miednicy użytkownika. Składają się z pianki na drewnianej podstawie.



Stabilizatory miednicy

Oferujemy serię pasów Netti i Bodypoint do stabilizacji miednicy.



Stabilna pozycja siedząca dzięki komfortowej płycie siedzenia

Komfortowa płyta siedziska wspiera działanie poduszki w celu odciążenia nacisku i umożliwia głębsze zagłębienie się miednicy. Dzięki owalnemu otworowi w płycie guzy kulszowe mogą zagłębić się w poduszkę. Stabilizuje to pozycję siedzącą i zapobiega tendencji do zsuwania się do przodu.



Siedzisko przesuwne

Może być polecane jako pomoc w łatwym transferze i pozycjonowaniu użytkownika. Siedzisko można wysuwać i wsuwać, gdy użytkownik siedzi na wózku. Zapewnia to, że użytkownik siedzi w pełni z tyłu wózka. Siedzisko przesuwne jest idealne dla osób z przykurczami kolan lub korzystających z podnośnika.



Do 90 mm elastyczności szerokości siedziska


Szerokość siedziska wózka Netti jest bardzo elastyczna, ponieważ można ją regulować, wkładając poduszki komfortowe i zestaw poszerzający podłokietniki.

Netti 4U CE:	-20 / 40 mm
Netti 4U CE PLUS:	+20 / 40 mm -20 / 40 mm
Netti 4U CED:	+25 mm -20 / 40 mm
Netti 4U Base:	+25 mm -20 / 40 mm
Netti III:	+24 mm -25 / 50 mm
Netti V:	+25 / 50 mm -25 / 50 mm
(Zintegrowane rozwiązanie)	



Blokada przechyłu siedziska (Blokada kąta nachylenia siedziska)

Blokuje funkcję przechyłu siedziska i jest zalecana dla niespokojnych użytkowników oraz podczas transportu samochodem.

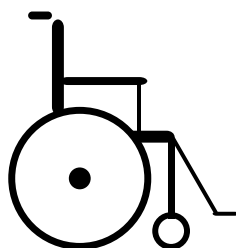

Ogranicznik kąta nachylenia siedziska

Dla Netti III, V i Netti 4U Zmniejsza zakres przechyłu (nachylenia) do przodu lub do tyłu.



Wysuwane elementy z dodatkowym odwiedzeniem +50 mm

Są stosowane u użytkowników z dużym odwiedzeniem [bioder/nóg], razem z szerszymi o 50 mm podnóżkami, a często także z podpórkami pod kolana i uda.

Może być również sensowne użycie dystansów do kółek skrętnych. Nie można ich zamontować w modelach Netti 4U CE i CE PLUS.



Klin abdukcyjny

Aby zapobiec zwinięciu bioder i ściskaniu kolan (spowodowanemu napięciem mięśni), można zamocować klin abdukcyjny, który rozpycha uda. Dostępny w 4 różnych rozmiarach.



Pas abdukcyjny

Do pozycjonowania i stabilizacji miednicy.



Podpórka pod kolana i uda

Poprawia podparcie kolan i ud w przypadku dużego odwiedzenia.

*inspire
joy of life*

Wsparcie dla ramion

Wózki inwalidzkie Netti są wyposażone w podłokietniki, które różnią się w zależności od modelu. Wszystkie podłokietniki Netti oferują regulację głębokości i wysokości.

Dostępny jest szeroki wybór poduszek podłokietników, aby zapewnić indywidualne i optymalne rozwiązanie.



Poduszki podłokietników

Dostępne w różnych długościach i szerokościach.

335 x 58 mm	420 x 80 mm (Szeroki)
385 x 58 mm	525 x 80 mm (Prosty)
445 x 68 mm	525 x 80 mm (Zaokrąglony)

Miękkie poduszki do podłokietników

Dla poduszek podłokietników w rozmiarach 385x58 mm i 420x80 mm oferujemy miękkie nakładki z obiciem 3D lub Easy Care. W przypadku wszystkich innych rozmiarów chętnie wykonamy je na specjalne zamówienie.



Podłokietnik z wyściełanym półstołem dla Netti III i V

Elastyczne pozycjonowanie ramienia zapewnia podparcie i odciążenie. Stoł ma regulację wysokości i głębokości. Błat stołu można podnieść, aby ułatwić wchodzenie i wychodzenie z wózka.



Podłokietnik dla osób z porażeniem połowicznym

Zalecane dla osób z porażeniem połowicznym, obrotowe i z możliwością blokady.



Poduszka dla osób z porażeniem połowicznym

Z miękkim wypełnieniem z pianki Cospoflex.



Regulacja podłokietników

- Zdefiniuj kąt nachylenia oparcia.
- Ustawienie prawidłowej wysokości: ramię powinno stanowić przedłużenie tułowia, a przedramię ma leżeć na podłokietniku, zgięte w łokciu pod kątem 90°. Upewnij się, że bark jest rozluźniony
- Ustawienie prawidłowej głębokości: poduszka podłokietnika powinna zapewniać optymalne i szerokie wsparcie dla przedramienia.

Moduł oparcia

Wózki inwalidzkie Netti oferują wiele rozwiązań w zakresie modułu oparcia. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego modułu można odpowiedzieć na indywidualne potrzeby użytkownika wózka. Pozwala to na właściwe wsparcie w przypadku deformacji kręgosłupa (hiperkifoza, skolioza itp.) lub mimowolnych ruchów tułowia (spastyczność, ataksja itp.). Indywidualne i dobre podparcie tułowia stanowi podstawę dla funkcjonalnej pozycji głowy.



Dodatkowa wysokość oparcia

Dla wyższych osób oparcie można wydłużyć do 600 mm. Modele Netti Smart, Stabil i Super Stabil są dostępne z oparciem o wysokości 600 mm. Jeśli masz już poduszkę o standardowej wysokości, potrzebujesz jedynie pokrowca na oparcie o wysokości 600 mm. Opcja ta nie jest dostępna w modelach Netti 4U CE i Base.




Sztywne aluminiowe oparcie

Dla użytkowników, którzy potrzebują sztywniejszego podparcia pleców. Wysokość 500 mm lub 600 mm z przedłużeniem oparcia. Do wszystkich wózków inwalidzkich Netti z wyjątkiem Netti 4U CE i Base.



Oparcie Libertas

Ruchomość oparcia w zakresie 15° dla zwiększenia komfortu siedzenia. Użytkownik siedzący na wózku może wykonywać niewielkie ruchy wyprostne tułowia, co pozwala mu samodzielnie zaspokoić naturalną potrzebę zmiany pozycji siedzącej. Trzy siły cylindrów do wyboru: 80, 120 lub 160 Newtonów.

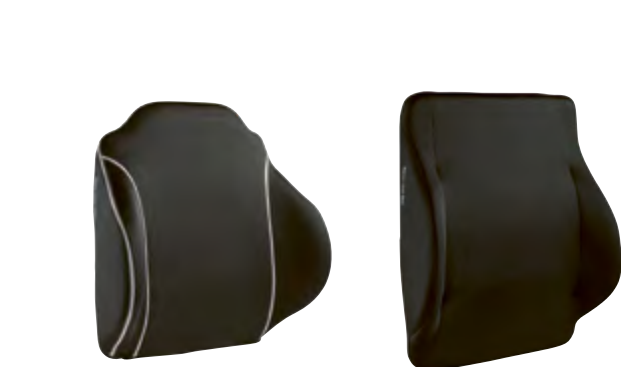


Poduszka oparcia ze stabilizacją boczną

Netti Uno ma stabilizację boczną o wysokości 100 mm, Netti Smart 120 mm, a Netti Stabil 170 mm. Netti Super Stabil ma wzmocnioną stabilizację boczną o wysokości 170 mm.



Systemy pasów

W szczególnych przypadkach można zastosować pasy tułowia. Dobór odpowiedniego pasa może wspierać indywidualne cele terapeutyczne.

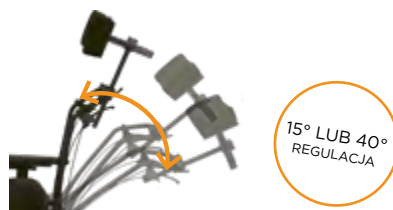

Dynamiczny moduł oparcia Netti

Elastyczne oparcie, które współpracuje z siedziskiem. Oparcie dopasowuje się zarówno do niewielkich, jak i ekstremalnych ruchów wyprostnych tułowia, aż do całkowitego przechyłu całego modułu oparcia. Może być używany jako pojedynczy, dynamiczny element.

Wybierz spośród różnych sił cylindrów, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla użytkownika.

Stabilizacja tułowia

Do korekty nieprawidłowych i skośnych ustawień, a także przy ograniczonej stabilności pleców, można zastosować klin pod plecy lub poduszkę lędźwiową. Wkłada się je pomiędzy oparcie z rzepem a poduszkę oparcia. U osób z ograniczoną stabilnością może być konieczne dodatkowe wsparcie.



Boczna poduszka korygująca

Boczna poduszka korygująca zapewnia bezpośrednie podparcie ciała, a tym samym dodatkową stabilizację, uzupełniając poduszkę oparcia. Dzięki elastycznemu adapterowi i przegubowi kulowemu poduszkę można optymalnie ustawić.



Boczne peloty Stabil

Dla naszych poduszek oparcia Netti Stabil i Super Stabil oferujemy dodatkowe peloty boczne. Jest ono precyzyjnie dopasowywane do rury oparcia, a następnie naciska na prowadnicę boczną poduszki, aby zapewnić jeszcze większą stabilność. Dostępna jest dodatkowa



Boczna poduszka Basic

Dla Netti 4U CE, CE PLUS i Base

Poduszka ma regulację szerokości, a także wysokości i głębokości.



Oparcie na rzep z wycięciem na peloty piersiowe

Nie można montować w modelach Netti 4U CE i Netti V.




Poduszka lędźwiowa

Do łatwego i indywidualnego dopasowania w przypadku hiperlordozy.



Klin pod plecy

W celu poprawy postawy przy łagodnych zmianach skoliozycznych kręgosłupa.

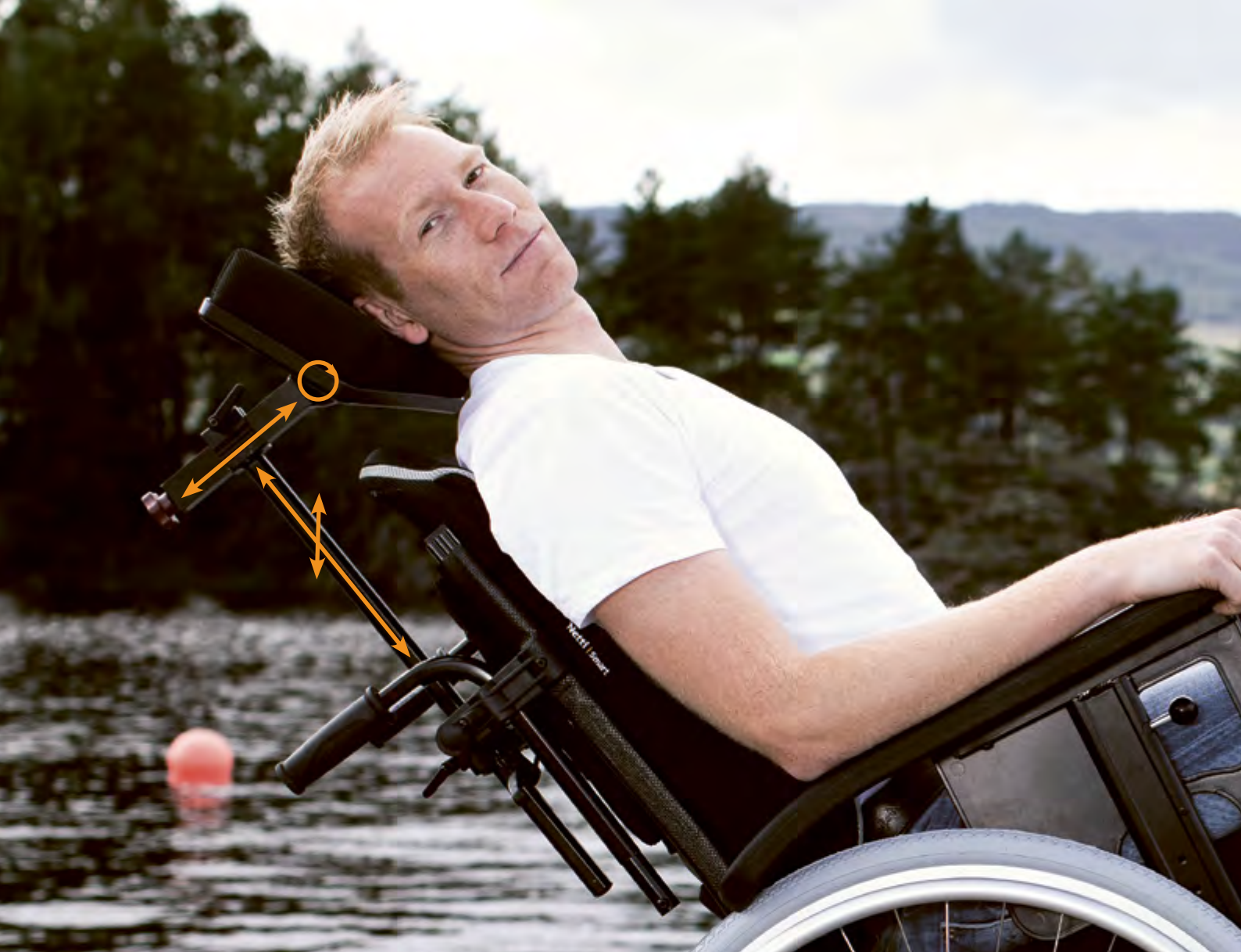

Akcesoria do zagłówka



Dodatkowy pokrowiec do zagłówków Mini, A, B i C

Wymienny pokrowiec, można prać w temperaturze 60 stopni



Poduszka pod głowę z elastyczną taśmą

Poduszka pod głowę odciąża kark. Można ją łatwo przymocować za pomocą gumki.



Komfortowa poduszka do zagłówka

Zalecane dla lepszego podparcia i odciążenia głowy i karku podczas korzystania z zagłówka C



Pionowy statyw do zagłówka

Dostępny w 3 różnych długościach.

- 200 mm
- 300 mm
- 500 mm



Poziomy drążek do zagłówka

Dostępny w 5 różnych długościach:

- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 380 mm



Zagłówek/Stabilizacja oparcia

Idealne w przypadku szczególnego obciążenia zagłówka lub rur oparcia (np. w wyniku spastyczności lub transportu w pojeździe). Montuje się na adapterze zagłówka. Pasuje do rodziny wózków Netti III.

Zagłówek

Zagłówki Netti można regulować na wysokość, głębokość i na boki, aby zapewnić optymalne dopasowanie.



Netti Relaxo Kopfstütze

Bietet guten Halt beim Verstellen der Rückenlehne. Für Netti AdaptPro Familie erhältlich.

Netti Dynamic Kopfstütze

Nimmt die Kräfte auf und dämpft sie, so dass keine Verletzungen des Kopfes und Nackens entstehen können.



Zagłówek A

Dla osób z ograniczoną kontrolą i stabilnością głowy. Dostępny również z opaską na czoło (patrz poniżej).

Zagłówek B

Dla użytkowników, którzy potrzebują podparcia w pozycji przechylonej

Zagłówek C

Pozwala na zmianę pozycji spoczynkowej głowy.



Zagłówek D

Ergonomiczny kształt, który wspiera naturalną krzywiznę karku. Właściwości rozkładające nacisk.

Zagłówek E z regulowaną prowadnicą boczną

Z regulowaną prowadnicą boczną.

Zagłówek F z podparciem pod brodę



Zagłówek A z opaską na czoło

Doskonały dla osób o bardzo małej stabilności w odcinku szyjnym kręgosłupa.

Zagłówek Savant

Zagłówek Savant ma funkcjonalną regulację, dzięki czemu zapewnia dobre podparcie przy maksymalnej swobodzie ruchu oraz nieograniczonym postrzeganiu wzrokowym i słuchowym. Jako dodatkowe podparcie z przodu można zamontować opaskę na czoło. Dostępny również z dodatkową prowadnicą boczną.



Zagłówek Mini z prowadnicami bocznymi dla dzieci.

Axion adapter zagłówek

Obrotowy adapter do zagłówek umożliwia obrót o 60° lub 90° w bok. Axion pozwala na swobodne obracanie się zagłówek, co zwiększa zakres ruchów użytkownika. Adapter jest doskonały dla osób z ograniczoną kontrolą głowy, ograniczoną swobodą ruchu lub ograniczonym polem widzenia.

Samodzielność



Napęd jednoręczny

Dla użytkowników, którzy mogą używać tylko jednej ręki. Warto wziąć pod uwagę także możliwość zastosowania hamulca jednoręcznego.



Osłona szprych

Zapobiega przedostawaniu się rąk użytkownika do szprych koła. Jest dostarczana w wersji przezroczystej i na życzenie klienta można ją ozdobić naklejkami.



Pokrycie na obręcz napędową

Zalecane dla użytkowników z ograniczoną zdolnością chwytania, ponieważ gumowa powierzchnia zapewnia pewny chwyt.



Uchwyt do regulacji pochylenia siedziska i kąta oparcia

Można go zamontować pod prawym lub lewym podłokietnikiem. Jeśli użytkownik chce samodzielnie regulować kąt oparcia i pochylenie siedziska, uchwyt montuje się pod podłokietnikiem. Dostępne dla rodzin wózków Netti III i V.



Przedłużenie ramy

dla Netti III i Netti 4U Family
Umożliwia przesunięcie kół napędowych do tyłu, gdy pożądana jest większa głębokość siedziska. Zapewnia większą stabilność, biorąc pod uwagę środek ciężkości. W przypadku przedłużenia ramy niezbędne są dłuższe zabezpieczenia przed przewróceniem, a w rodzinie Netti III także hamulce na dolnej rurze ramy.



Koła napędowe w wielu rozmiarach dla różnych wysokości siedzenia

Oferujemy szeroki wybór rozmiarów kół, aby osiągnąć optymalną wysokość siedziska i dostosować wózek do jego przeznaczenia.

Funkcje elektryczne

Dla niektórych użytkowników sterowanie elektryczne kątem oparcia, pochyleniem siedziska i podnóżkami może być bardzo korzystne, ponieważ oznacza większą samodzielność i lepszą jakość życia. Daje to użytkownikowi możliwość samodzielnej zmiany pozycji siedzącej w dowolnym momencie. Funkcje elektryczne można zamontować w wózkach Netti III i V.



Elektryczne pochylenie siedziska
dla Netti III i V

Elektryczna regulacja oparcia
dla Netti III i V

**Elektryczne górne części
podnóżków**
dla Netti III i V



Pilot sterujący
Symbole wizualne dla łatwego zrozumienia i obsługi

Mocowanie do pilota sterującego
Jest zalecany, gdy użytkownik ma samodzielnie obsługiwać funkcje elektryczne

Zestaw elektryczny
W przypadku niektórych konfiguracji wózek Netti III lub Netti V w wersji manualnej może zostać przekształcony w wózek elektryczny. Chętnie udzielimy szczegółowych informacji na temat tego zestawu akcesoriów.

A full-page photograph of a rural landscape at sunset. In the foreground, two white sheep stand in a field of tall grass and dark rocks. In the background, there is a body of water and distant mountains under a sky with soft, colorful clouds. The text "inspire joy of life" is written in a white, cursive font in the lower right quadrant.

*inspire
joy of life*

Netti w podróży



Zestaw mocujący

Zalecane do transportu samochodem



Zabezpieczenie przed wywrotką z pedałem

Standard w rodzinie Netti III. Opcja w rodzinie Netti 4U. Wspomaganie przechylania wózka, przydatne przy pokonywaniu przeszkód. Może być obrócone do góry przez osobę towarzyszącą podczas pchania wózka. Zabezpieczenie przed wywrotką ma regulację wysokości i głębokości.




Stojak na kroplówkę

Do kroplówek, żywienia dojelitowego i podawania leków. Stojak montuje się na rączce do pchania i jest dostarczany z dwoma zdejmowanymi haczykami.



E-Drive

Poczuj wolność, jaką daje E-Drive, i ułatw sobie codzienne życie. E-Drive jest bardzo łatwy w obsłudze za pomocą joysticka lub można go wyposażyć w sterowniki dla osób towarzyszących. E-Drive nadaje się do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

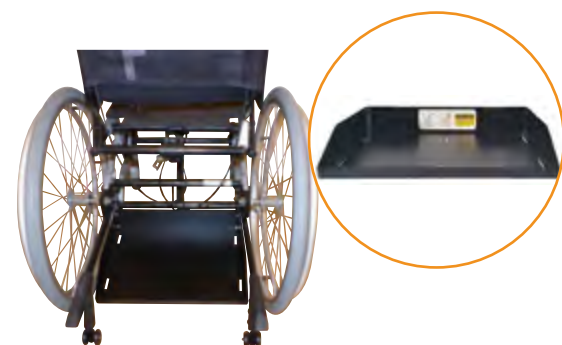

Uniwersalny kosz transportowy

Ten uniwersalny kosz transportowy umożliwia elastyczne mocowanie różnych urządzeń medycznych lub innych ładunków w modelach Netti 4U CED, Netti 4U CED XL lub Netti 4U Base. Więcej informacji na stronie 81.



Uniwersalny uchwyt na urządzenia

Do mocowania koncentratorów tlenu lub ssaków w wózkach Netti III i V Family. Więcej informacji na stronie 80.

Domowa wentylacja dla lepszej jakości życia, mobilności i samodzielności


Uniwersalny uchwyt na urządzenia

Do zastosowania z np. koncentratorami tlenu lub ssakami. Elastyczne rozwiązanie z regulowanym systemem mocowania do stabilnego montażu urządzeń medycznych. Kompatybilne z wieloma różnymi urządzeniami. Dostępne dla szerokości siedzisk od 350 do 750 mm

Wytłoczenie w dnie uniwersalnego uchwytu na urządzenia ma kształt prostokątny i jest wyposażone w profilowaną wkładkę, którą można obrócić o 180°, aby pomieścić okrągłą butlę tlenową.

Opcjonalnie dostępna jest dodatkowa płyta osłaniająca. Dzięki niej zyskujesz kolejną płaszczyznę, którą można wykorzystać jako dodatkowy uchwyt na sprzęt.

Urządzenia są zabezpieczane za pomocą kątowych elementów mocujących. Można dokupić dodatkowe zestawy tych elementów – jeden zestaw składa się z 4 sztuk. Maksymalne obciążenie wynosi 10 kg

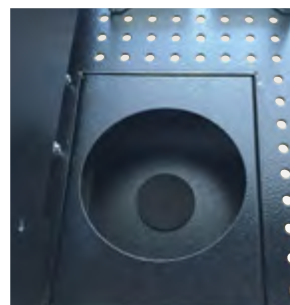

Prowadzenie urządzeń medycznych jest wysoce ryzykowne. Dlatego ważne jest, aby korzystać z bezpiecznego i niezawodnego rozwiązania. Producenci wyrobów medycznych mają bardzo precyzyjne wytyczne dotyczące ich transportu (np. bez drgań, poziomo, swobodny dostęp do kabli, niezakłócone pole widzenia itp.).

Uniwersalny uchwyt na urządzenia firmy Netti został gruntownie przetestowany zgodnie z wytycznymi MPG (ustawa o wyrobach medycznych). Następujące produkty mogą być w niego wyposażone: Netti III HD, Netti III EL, Netti V i Netti XHD.

NETTI III HD
NETTI III XHD
NETTI III EL
NETTI V



NETTI 4U CED NETTI 4U BASE

Uniwersalny kosz transportowy

Ten uniwersalny kosz transportowy umożliwia elastyczne zastosowanie różnych urządzeń medycznych lub innych ładunków w modelach Netti 4U CED, Netti 4U CED XL lub Netti 4U Base. Wózek jest konfigurowany

z przedłużeniem ramy i wyjątkowo długimi podporami antywywrotkowymi. Maksymalne obciążenie uniwersalnego kosza transportowego wynosi 6 kg.

Hamulce i uchwyty hamulcowe

Dla wózków inwalidzkich Netti dostępne są różne typy hamulców.

Standardowy hamulec jest montowany na ramie i hamuje bezpośrednio na kole.

Jeśli użytkownik nie jest w stanie sam hamować, należy zamontować hamulec bębnowy/hamulec dla osoby towarzyszącej. Hamulce te znajdują się w piaście koła napędowego. Dla użytkowników z ograniczoną sprawnością lub siłą w palcach można zamontować w wózku dłuższą dźwignię hamulca.

Ponadto, dla modeli Netti III i V dostępny jest również hamulec jednoręczny.



Hamulec bębnowy

Możliwy do zamontowania we wszystkich wózkach.



Dłuższa dźwignia hamulca dla Netti III i 4U

Dłuższa dźwignia hamulca zapewnia lepszą obsługę hamulca. Dodatkowo hamulec jest łatwiejszy w obsłudze przy mniejszym nakładzie siły.

150 mm Netti III, HD, EL

250 mm Netti III, HD, EL


310 mm Netti 4U



Hamulec jednoręczny

Dla użytkowników, którzy mogą używać hamulca tylko jednostronnie, oferujemy hamulec bębnowy z linką, obsługiwany za pomocą hamulca użytkownika. Na życzenie oferujemy także mechaniczny hamulec centralny.

Rączki i uchwyty do pchania

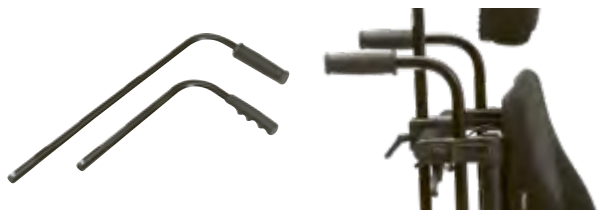

Rączka do pchania

Dostępne w długości 300 lub 500 mm. Standardowa długość to 300 mm.



Uchwyt do pchania z regulacją wysokości

Zalecany dla użytkowników, którzy są pchani przez osobę towarzyszącą. Umożliwia łatwą regulację kąta nachylenia uchwytu do pchania, co jest przydatne, gdy z wózka korzysta kilka osób o różnym wzroście.

Stoliki terapeutyczne do aktywności i odciążenia

Stoliki terapeutyczne i podpórki pod ramiona pełnią w indywidualnym zaopatrzeniu w wielofunkcyjny wózek inwalidzki różne funkcje. Mogą służyć jako blisko położona do tułowia powierzchnia do podparcia kończyn górnych w przypadku np. niedowładu połowicznego (hemipareza) lub czterokończynowego (tetrapareza), jako platforma robocza w aktywnej opiece lub jako miejsce do odstawiania jedzenia, napojów itp.



Wzmocniony i odchylany

Stolik można łatwo odchylić na bok, aby ułatwić transfer lub dostęp do użytkownika. Możliwe jest zablokowanie stolika w wybranej pozycji.



Wzmocniony i blokowany

Blokada umożliwia bezpieczne ustawienie stolika w pożądanej pozycji.



Uniwersalny

Jest pchany wyłącznie przez podłokietniki. Dla szerokości siedziska od 550 mm stolik jest wyposażony w obramowanie.



Wzmocniony

Łatwy do zamocowania i zdjęcia, ze stabilnym blatem.



Podkładka na stolik

Przy dłuższym korzystaniu ze stolika, na jego blacie należy zamocować miękką podkładkę. Podkładka wykonana jest z miękkiej pianki, pokrytej łatwym do czyszczenia materiałem Skai. Mocowanie odbywa się za pomocą rzepów.



Wyściełany stolik na połowę szerokości dla modeli Netti III i V

Elastyczne, składane podparcie pod ramię zapewnia stabilizację i odciążenie. Stolik ma regulowaną wysokość i głębokość.



Szerokie podłokietniki

Przy korzystaniu z szerokich podłokietników może być konieczne użycie szerszego stolika. Po więcej informacji skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Napęd sterowany obręczą, zapewniający łatwą jazdę o własnych siłach

E-Move to pierwszy na rynku napęd sterowany obręczą, który można dostosować do faktycznych potrzeb użytkownika. Aby to zrobić, użytkownik musi przejechać w linii prostej przez maksymalnie 50 sekund. Po kliknięciu w oprogramowaniu programującym, E-Move sam rekomenduje optymalne ustawienia dla danego użytkownika. W razie potrzeby, późniejsze dokładne dostosowanie parametrów jest bardzo proste.

Indywidualne dostosowanie jest niezwykle proste, nawet jeśli użytkownik ma różną siłę w obu ramionach, może używać tylko jednego, obręcze wymagają różnej czułości, potrzebna jest dodatkowa moc podczas jazdy do przodu lub do tyłu, lub trzeba dopasować siłę reakcji przy skręcaniu obręczy.

Opcja „Drugi profil jazdy” pozwala na szybką zmianę charakterystyki jazdy. Inną kombinację ustawień parametrów, której potrzebuje użytkownik, można przypisać do drugiego profilu. Nie ogranicza się to do alternatyw „wewnątrz pomieszczeń” i „na zewnątrz”, ale do tego celu jest bardzo przydatne.



Akcesoria i opcje konfiguracji dla E-Move

Maksymalna waga użytkownika

Maksymalna waga użytkownika to owo 130 kg w wersji standardowej (zależnie od typu wózka). Wersja HD (Heavy-Duty) umożliwia obciążenie do 150 kg, ponieważ obręcze i szprychy są wykonane z wytrzymałego materiału.

Elastyczny uchwyt

Ułatwia dostęp do włącznika/wyłącznika oraz przełącznika profilu jazdy. Elastyczny uchwyt jest dostępny w długościach 150 mm lub 210 mm.

Akumulatory

Bateria niklowo-metalowo-wodorkowa (NiMH), 24 V x 6,7 Ah (standard)

Bateria litowo-jonowa (Li-Ion), 25 V x 11,8 Ah

Maksymalny zasięg na w pełni naładowanej baterii

Okolo 18 km z baterią NiMH.

Okolo 30 km z baterią litowo-jonową.

Zgodnie z normą ISO 7176-4.

Adapter samochodowy

Do ładowania baterii w samochodzie, na łodzi, w przyczepie kempingowej lub kamperze.

Wyjście: 230 V AC, 50 Hz, 150 W.

Drugi profil jazdy

To udogodnienie pozwala użytkownikowi wybrać inny profil z innymi właściwościami jezdnyimi.

Decydujesz, które właściwości (parametry) chcesz zdefiniować inaczej w drugim profilu.

Ośłona na szprychy

Dostępne w średnicach 20, 22, 24 i 26 cali.

Średnica koła

Dostępne w średnicach 20, 22, 24 i 26 cali.

Opony

Dostępne z profilem drobnoziarnistym, jako opony pełne z bieżnikiem w jodełkę, drobnoziarnistym / z elastycznym węzem, z grubym bieżnikiem 1 cal lub z grubym bieżnikiem 1 3/8 cala, w zależności od średnicy koła. Więcej informacji znajdziesz w formularzu zamówienia.

Ciągi

Dostępne w wersjach: stal nierdzewna, Poly Compact, Poly Gel i Max Grip.

Nie musisz się już martwić asymetrią siły ramion ani innymi indywidualnymi cechami.

Oprogramowanie E-Move umożliwia precyzyjne dostosowanie parametrów. Bezpieczeństwo zawsze jest priorytetem. Dlatego wszystkie ustawienia dla prawego koła są również zapisywane w lewym i odwrotnie. Kalibracja nigdy nie była tak prosta. Oba koła można skalibrować w ciągu minuty. System jest nie tylko szybki, ale także bezpieczny, niezwykle precyzyjny i trwały.

W standardowej wersji jest przeznaczony dla maksymalnej wagi użytkownika 130 kg, a jako wersja wzmocniona (Heavy-Duty) jest dostępny dla maksymalnej wagi użytkownika 150 kg.



Wspomaganie napędu – sterowanie za pomocą joysticka lub przez osobę towarzyszącą

Doświadcz swobody z E-Drive i ułatw sobie codzienne życie.

E-Drive jest niezwykle prosty w obsłudze za pomocą joysticka lub może być wyposażony w sterowanie dla osoby towarzyszącej. Napęd E-Drive doskonale sprawdza się zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Napęd E-Drive można indywidualnie dostosować, co przekłada się na wyższą jakość dla użytkownika. Za pomocą joysticka lub oprogramowania komputerowego można z łatwością ustawić parametry takie jak: przyspieszanie, zwalnianie, czułość reakcji na obracanie obręczy napędowych, czułość joysticka, oraz wybrać jeden z trzech trybów jazdy: Sport, Standard lub Łagodny.



Akcesoria i opcje konfiguracji dla E-Drive

Maksymalna waga użytkownika

Maksymalna waga użytkownika to 125 kg w wersji standardowej (zależnie od typu wózka). Wersja HD (Heavy-Duty) umożliwia obciążenie do 150 kg, ponieważ obręcze i szprychy są wykonane z wytrzymałego materiału.

Akumulatory

Bateria niklowo-metalowo-wodorkowa (NiMH), 24 V x 6,7 Ah (standard).
Opcjonalnie dostępna jest bateria litowo-jonowa (Li-Ion), 25 V x 11,8 Ah, która zapewnia większy zasięg.

Maksymalny zasięg na w pełni naładowanej baterii

Około 18 km z baterią NiMH.
Około 32 km z baterią litowo-jonową.
Zgodnie z normą ISO 7176-4.

Adapter samochodowy

Do ładowania baterii w samochodzie, na łodzi, w przyczepie kempingowej lub kamperze.
Wyjście: 230 VAC, 50 Hz, 150 W.

Joystick

Standardowo joystick do obsługi przez użytkownika

jest montowany po prawej stronie. Dostępne są następujące alternatywy: montaż po lewej stronie lub skierowany w stronę osoby towarzyszącej

Sterowanie dla osoby towarzyszącej

Sterowanie dla osoby towarzyszącej, po prawej stronie.

Opony

Dostępne jako opony pneumatyczne z drobnym bieżnikiem lub w wersji PU.

Ośłona na szprychy

Dostępne w średnicach 20, 22, 24 i 26 cali.

Średnica koła

Dostępne w średnicach 16, 20, 22, 24 i 26 cali.

Umiejscowienie baterii

Standardowo bateria umieszczona jest w torbie za oparciem wózka inwalidzkiego.

Ułatw sobie codzienne życie.

Napęd E-Drive zapewnia więcej swobody i ułatwia codzienne życie. Liczne opcje konfiguracji gwarantują bezpieczne, optymalne wrażenia z jazdy i łatwe użytkowanie. Wózek inwalidzki porusza się bez wysiłku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Wersja standardowa napędu E-Drive jest przeznaczona dla użytkowników o maksymalnej wadze 125 kg. Dostępna jest również wersja wzmocniona (Heavy-Duty), która obsługuje maksymalną wagę użytkownika do 150 kg.



A woman with blonde hair, wearing a black and white jacket, blue jeans, and grey boots, is sitting in a wheelchair on a metal ramp. She is smiling and looking towards the camera. The ramp is made of metal and has a black mat on it. The background shows a wooden building with a door and a potted plant.

*inspire
joy of life*

RAMPY

Łatwe do złożenia – proste w obsłudze



Rampa składa się na pół wzdłuż, co ułatwia jej transport. Ma 800 mm szerokości i jednolitą powierzchnię do jazdy.

Te rampy są najlżejsze na rynku i dostępne w długościach: 610, 920, 1220 oraz 1520 mm.

Wszystkie rampy wykonano z konstrukcji aluminiowej z antypoślizgową powłoką najwyższej jakości.



szerokość rampy
800 mm



długość rampy
610-1520 mm



max. obciążenie
300 kg



waga
4,5-10 kg

Wielokrotnie składana – innowacyjna rampa dla wózków inwalidzkich

Dzięki nowemu, opatentowanemu zawiasowi, rampę można w razie potrzeby rozdzielić na dwie oddzielne szyny. Zapewnia to optymalną stabilność przy maksymalnym obciążeniu rampy. Rampa jest składana i można ją transportować jak zwykłą walizkę, co ułatwia jej przechowywanie i przenoszenie.

Wszystkie rampy są wykonane z aluminium i pokryte antypoślizgową powłoką najwyższej jakości. Mają idealną dla wózków inwalidzkich szerokość 800 mm.

Dostępne długości: 1520, 1830, 2130, 2440, 3050 i 3660 mm.



Szerokość rampy
800 mm



Długość rampy
1520-3660 mm



Max. obciążalnie
520-2130 mm, 300 kg
2440-3660 mm, 250 kg



waga
13,6-33,3 kg

Konstrukcja wózka i poduszki uzupełniają się wzajemnie

Poduszki Netti stanowią uzupełnienie dla wielu funkcji wózków inwalidzkich Netti. Razem tworzą optymalne rozwiązanie, zapewniając stabilizację miednicy w wielu punktach, umożliwiając optymalną swobodę ruchów górnej części ciała oraz gwarantując skuteczne rozłożenie nacisku.

Jeśli potrzebne jest większe wsparcie boczne poduszki oparciowej lub inna konstrukcja, chętnie oferujemy również poduszki siedziska i oparcia wykonane na zamówienie. Zapraszamy do dalszych konsultacji.

Dzięki naszym nowo opracowanym poduszkom siedziska Netti Precision™ oferujemy wysokiej jakości produkty, które stanowią uzupełnienie poduszek Netti Uno i Sit. Poduszki siedziska Netti Precision™ są łatwe, szybkie i bezpieczne w użyciu. Więcej informacji na stronach 94-95.

A photograph of a light brown horse grazing in a field of tall, dry grass. In the background, there is a calm blue lake under a clear sky. The text 'inspire joy of life' is written in a white, cursive script over the lower part of the horse and the grass.

*inspire
joy of life*

NETTI **PODUSZKA SIEDZISKA**

Wysokiej jakości poduszki o dobrych właściwościach rozkładających nacisk.

NOWOŚĆ: Poduszka siedziska Netti Precision™ - ochrona skóry następnej generacji z technologią Ergomise™

Strona 93



NETTI **PODUSZKA OPARCIA**

Indywidualne i regulowane rozwiązania, które zapewniają większą kontrolę tułowia i lepszą pozycję siedzącą.

Strona 98



RIDE® DESIGNS **PODUSZKA SIEDZISKA**

Innowacyjna koncepcja dla największych wyzwań w opiece.

Strona 102



RIDE® DESIGNS **SYSTEM OPARCIA**

Połączenie maksymalnego podparcia z największym możliwym stopniem indywidualizacji.

Strona 104





*inspire
joy of life*

Poduszka z unikalnymi rozwiązaniami

- Gotowy do natychmiastowego użycia
- Optymalny rozkład nacisku
- Optymalna wentylacja
- Stabilny temperaturowo
- Właściwości stabilizujące
- Poduszka na oparcie z prostym i stabilnym mocowaniem na rzep
- Poduszki na oparcie z regulacją wysokości
- Duży wybór szerokości siedziska
- Niska waga
- Zaprojektowany z myślą o łatwym przenoszeniu / transferze
- Zmywalny / nadający się do prania i przyjazny dla środowiska

Prawdziwa stabilność dla większej aktywności



NEU

Netti Precision 1

Wydajna poduszka do siedzenia z technologią Ergomise™, która proaktywnie chroni skórę i zwiększa komfort.



NEU

Netti Precision 2

Z technologią Ergomise™ dla użytkowników z wrażliwą skórą i wysokim ryzykiem uszkodzeń skóry lub z już istniejącymi obrażeniami.



Netti Uno Seat

Wielowarstwowa poduszka do siedzenia z dobrym rozkładem nacisku.



Netti Sit

Wielowarstwowa poduszka do siedzenia ze zintegrowanym wsparciem bocznym, wodoodpornym pokrowcem pośrednim i dobrym rozkładem nacisku.



Netti Dry

Higieniczny pokrowiec Easy Care, który pasuje do wszystkich poduszek Netti.



Ride® Forward

Dla użytkowników ze specjalnymi wymaganiami co do bocznego prowadzenia i wsparcia.



Ride® Java Seat

Redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci. Bardzo wysoka stabilność siedzenia. Również dla użytkowników ze średnim do wysokiego ryzykiem uszkodzeń skóry.



Netti Kyphotic

Specjalnie zaprojektowana wielowarstwowa poduszka na oparcie dla osób z utrwaloną hiperkyfozą.



Netti Uno Back

Jednoczęściowa poduszka piankowa ze zintegrowanym prowadzeniem bocznym. Łatwa regulacja wysokości.



Netti Smart

Bardzo dobry rozkład nacisku i prowadzenie boczne 120 mm. Z elementami designu optycznego dla łatwego pozycjonowania.



Netti Stabil

Poduszka na oparcie podobna do Netti Smart, ale z dłuższym prowadzeniem bocznym - 170 mm. Dla użytkowników z boczną niestabilnością tułowia.




Netti Super Stabil

Dla użytkowników ze specjalnymi wymaganiami co do bocznego prowadzenia i wsparcia. Podobnie jak poduszka na oparcie Netti Stabil, ale ze wzmocnionym prowadzeniem bocznym.



Ride® Java Back

Regulowane nachylenie oparcia i indywidualnie dopasowany kontur tułowia zapewniają zrównoważone wsparcie, a jednocześnie swobodę ruchów.

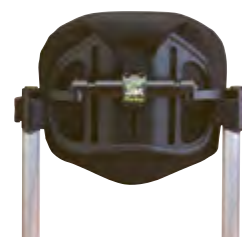

Ride® Java Decaf back

Odczuwalne wsparcie ze wszystkimi opcjami regulacji oparcia Ride Java i dodatkowymi funkcjami, specjalnie zaprojektowane dla dzieci.

Poduszka do siedzenia Netti Precision™ - ochrona skóry nowej generacji Netti Precision™

Dzięki technologii Ergomise™ opracowaliśmy wydajne poduszki do siedzenia, które proaktywnie chronią skórę i zwiększają komfort.

Połączyliśmy wieloletnie doświadczenie w dziedzinie siedzenia na wózkach inwalidzkich z najnowocześniejszą technologią i opracowaliśmy naszą przełomową poduszkę do siedzenia Netti Precision: prostą, szybką i bezpieczną w użyciu.

- Gotowy do natychmiastowego użycia
- Nie wymaga indywidualnego dopasowania
- Bezobsługowy
- Higieniczny: wkład można prać w pralce w temperaturze 65°C i szybko schnie
- Brak ryzyka błędnego użycia, ponieważ nie są wymagane żadne ustawienia

od supermiękkich po twarde. Stopniowane stopnie twardości zapewniają odpowiednią stabilność miednicy, a także najnowocześniejszy rozkład i odciążenie nacisku.

Ergomise™ Technology


Dzięki technologii Ergomise™ produkujemy poduszki z inteligentnymi strefami i warstwami -



więcej
informacji
my-netti.de


Profilaktyka przeciwoodleżynowa i stabilny mikroklimat.

Testy porównawcze przeprowadzone przez Uniwersytet w Pittsburgu pokazują zalety materiału Netti Precision™ w porównaniu do 14 innych, podobnych poduszek.

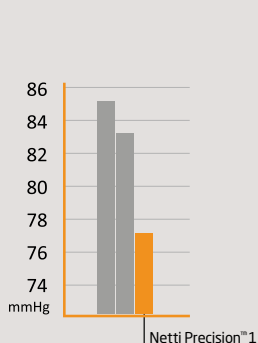


Odciążenie nacisku

Pomiary nacisku pokazują, że poduszka do siedzenia Netti Precision™ 1 skutecznie odciąża obszary wysokiego ryzyka, takie jak kość ogonowa i kości kulszowe. Przewyższają one nawet wyraźnie inne poduszki odciążające nacisk w redukcji szczytowego ciśnienia.

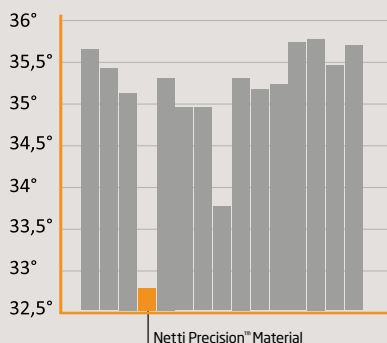

Kontrola temperatury.

Materiał Netti Precision™ utrzymuje niską temperaturę, a tym samym zmniejsza ryzyko urazów. Według instytutu badawczego Uniwersytetu w Pittsburgu, temperatura na styku między użytkownikiem a materiałem Netti Precision™ po 3 godzinach wynosi zaledwie 32,7°C. W przypadku porównywalnych poduszek temperatura ta wynosi od 33,7°C do 35,7°C.

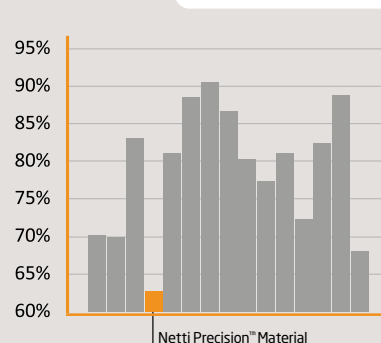

Kontrola wilgoci

Testy Uniwersytetu w Pittsburgu pokazują, że materiał Netti Precision™ po 3 godzinach wykazuje poziom wilgotności wynoszący zaledwie 62%. W przypadku 14 porównywalnych poduszek w teście, średnia wynosiła 81,2%. Porównywalnie niska wilgotność materiału Precision™ przyczynia się do ochrony skóry, a tym samym zmniejsza ryzyko odleżyn.

Netti Precision™ 1



Netti Precision™ 2



Grupa docelowa



- Dla użytkowników ze zwiększonym ryzykiem uszkodzeń skóry i odleżyn

- Optymalne rozłożenie i odciążenie nacisku.
- Ukierunkowana ochrona obszarów kostnych.
- Podparcie miednicy dla stabilnej i funkcjonalnej pozycji siedzącej.
- Skuteczne zapadanie się zmniejsza ryzyko zsuwania się do przodu.
- Dostępna z poszewką Stella+ poprawiającą mikroklimat lub zmywalną poszewką EasyCare+.

Grupa docelowa

- Dla użytkowników o bardzo wrażliwej skórze i wysokim ryzyku uszkodzeń skóry lub z już istniejącymi obrażeniami.

- Doskonałe rozłożenie i odciążenie nacisku
- Specjalne strefy odciążające kość ogonową i dno miednicy.
- Stabilne podparcie miednicy dla zdrowej pozycji siedzącej.
- Skuteczne zapadanie się zmniejsza ryzyko zsuwania się do przodu.
- Dostępna z poszewką Stella+ poprawiającą mikroklimat lub zmywalną poszewką EasyCare+.

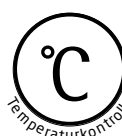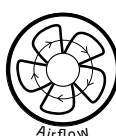

Netti Sit



Sofort einsetzbar



Stabilisierend




Optimale Druckverteilung



Temperaturstabil

Zsuwaniu się do przodu przeciwdziała zastosowanie bardziej miękkiej pianki w tylnej części wkładki.

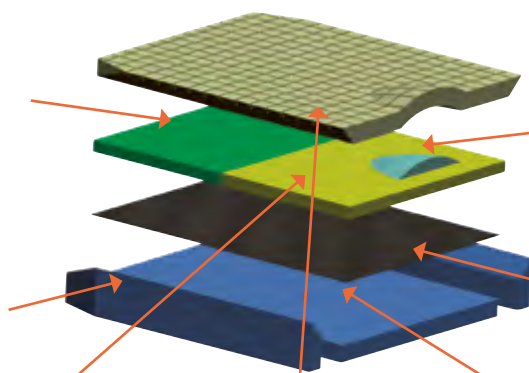

Zintegrowana abdukcja poprawia pozycję siedzącą.

Prowadnice boczne zapewniają większą stabilność i powierzchnię kontaktu.


Elastyczny materiał poprawia nośność warstwy podstawowej i zmniejsza całkowitą wagę.

Sztywna pianka w warstwie przedniej i środkowej stabilizuje uda i przednią krawędź poduszki do siedzenia.

Nacięta pianka wierzchnia zmniejsza napięcie powierzchniowe i sprawia, że użytkownik szybko zapada się w poduszkę, dzięki czemu nacisk jest szybko rozłożony.


Wysoka nośność warstwy podstawowej zapobiega zapadaniu się i zwiększa stabilność.

- Gotowa do użycia od razu!
- Dobre rozłożenie nacisku i właściwości stabilizujące.
- Dopasowana do konkretnego użytkownika już w momencie dostawy – nie wymaga dodatkowej regulacji ani ustawień.
- Dostarczana z wodoodporną, ale oddychającą poszewką wewnętrzną, która chroni piankową poduszkę (w przypadku poszewki zewnętrznej 3D).
- Właściwości pianki są dostosowane do rozmiaru poduszki, a tym samym do wagi użytkownika.
- Oddychająca poszewka 3D, łatwa w czyszczeniu poszewka Easy Care lub stabilizująca temperaturę poszewka °C.

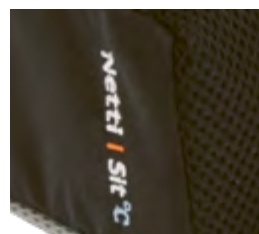

°C

Stabilny temperaturowo, oddychający, elastyczny i odporny na zużycie. Materiał stabilizujący temperaturę pod poszewką 3D. Materiał ten stabilizuje się przy 32°C, co oznacza, że oddaje ciepło i izoluje, gdy temperatura wzrasta/spada powyżej/poniżej tej granicy. Poszewka °C opóźnia i zmniejsza proces nagrzewania się skóry i tkanek.

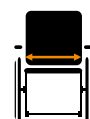

szerokość
siedziska
250-750 mm



głębokość
siedziska
300-550 mm




wysokość
80 mm

Netti Uno Seat



- Gotowa do użycia od razu!
- Dopasowana do konkretnego użytkownika już w momencie dostawy – nie ma potrzeby żadnej regulacji i ustawień.
- Twardość pianki jest dostosowana do rozmiaru poduszki, a tym samym do wagi użytkownika.
- Oddychająca poszewka 3D lub łatwa w czyszczeniu poszewka Easy Care.

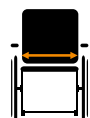

szerokość
siedziska
350-600 mm




głębokość
siedziska
400-500 mm



wysokość
80 mm

Miękka pianka wierzchnia zapewnia szybkie zapadanie się w poduszkę, aby szybko rozłożyć nacisk.

Twardsza pianka w warstwie przedniej i środkowej stabilizuje przednią krawędź poduszki do siedzenia.

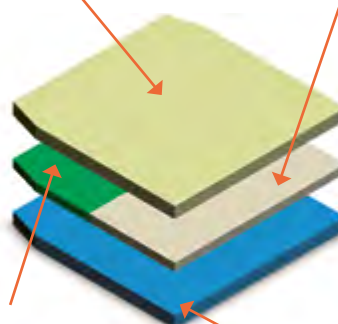

Zsuwaniu się do przodu przeciwdziała zastosowanie bardziej miękkiej pianki w tylnej części wkładki.

Pianka bazowa o wyższej gęstości zapobiega zapadaniu się.



Netti Dry



- Higieniczna poszewka Easy Care
- Odpowiednia do wszystkich poduszek do siedzenia Netti
- Zachowuje właściwości poduszki w zakresie rozkładania nacisku i wentylacji
- Gotowa do użycia od razu



szerokość
siedziska
250-600 mm



głębokość
siedziska
300-550 mm

Właściwości poduszek lędźwiowych Netti



- Miękka pianka zapewnia dobre zapadanie się i rozłożenie nacisku.
- Unikalny design zapewnia swobodę ruchów ramion.
- Swoboda ruchów rąk dzięki niskim prowadnicom bocznym.
- Oddychająca poszewka 3D, alternatywnie zmywalna poszewka Easy Care.
- Dużo miejsca w okolicy bioder, aby zapewnić stabilną pozycję siedzącą.
- Stabilizacja boczna 100, 120 lub 170 mm – w zależności od wersji poduszki.
- Ergonomiczny kształt i precyzyjnie umiejscowione wsparcie lędźwiowe dla lepszej stabilności ciała.



Tył ma składaną część z rzepem (tzw. „Flip-Over”), co pozwala na unieruchomienie poduszki w wybranej pozycji. Dzięki temu krzesło prezentuje się elegancko także od tyłu. Zintegrowana kieszeń do przechowywania. Dolna część składanej klapki może być również umieszczona pod poduszką do siedzenia, aby zakryć przerwę między poduszką oparcia a poduszką siedziska.



Na tylnej stronie znajduje się 6 półksiężyców, aby umożliwić dokładne ustawienie poziomej pozycji poduszki. System ten zapewnia również prawidłowe ułożenie poduszki po praniu.




Jeśli posiadasz już poduszkę oparcia o wysokości 500 mm, wystarczy, że dokupisz poszewkę 600 mm oraz przedłużenie oparcia. Przekazanie wózka nowym użytkownikom staje się dzięki temu łatwe i ekonomiczne. Netti Smart, Netti Stabil oraz Netti Super Stabil są oferowane z wysokością oparcia 600 mm.


Netti Kyphotic



- Gotowa do użycia od razu!
- Dla użytkowników z zakrzywionym kręgosłupem
- Wsparcie wzdłuż kręgosłupa.
- Wielowarstwowa pianka umożliwia lepsze zapadanie się.
- Niskie wsparcie boczne
- Indywidualnie regulowana wysokość (bezstopniowo).
- Poduszka oparcia w połączeniu z pasami na rzepy zapewnia lepszą wyprostowaną pozycję siedzącą, co pozwala na lepsze spożywanie posiłków, poprawia oddychanie i zwiększa aktywność.
- Wysokość 500 mm (możliwość indywidualnego dostosowania).

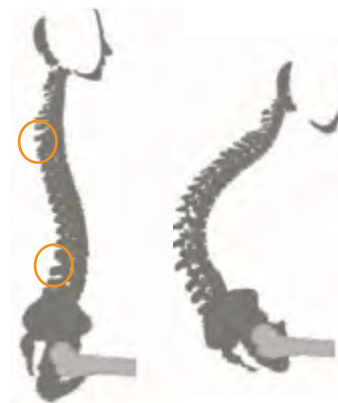

- Ergonomicznie ukształtowany, aby dopasować się do skrzywienia kręgosłupa. W środkowej części znajduje się wycięcie, które umożliwia maksymalne odciążenie wzdłuż krzywizny kręgosłupa.
- Niskie wsparcie boczne z oddychającą poszewką 3D. Niskie wsparcie boczne zapewnia komfort oraz swobodę ruchów ramion i rąk.
- Po usunięciu dolnej części podstawy poduszkę można umieścić i wyrównać bezpośrednio z poduszką do siedzenia.
- Unikalny design zapewnia swobodę ruchów ramion.
- Wielowarstwowy rdzeń piankowy (PU) o właściwościach odciążających nacisk.
- Poszewka Stella o doskonałych właściwościach oddychających i elastycznych.
- Elastyczny materiał umożliwia użytkownikowi zapadanie się w poduszkę i korzystanie z jej właściwości dobrego rozłożenia nacisku.
- Zaprojektowany specjalnie dla dolnej części skrzywionego kręgosłupa.

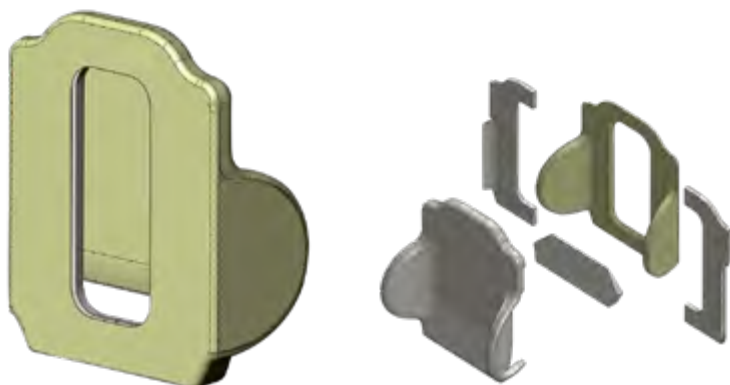

Netti Uno Back





- Gotowa do użycia od razu!
- Dobra i twarda poduszka pod plecy ze wsparciem lędźwiowym.
- Stabilizacja boczna 100 mm.
- Indywidualna, bezstopniowa regulacja wysokości.
- Wysokość oparcia 500 mm.
- Oddychająca poszewka 3D lub łatwa w czyszczeniu poszewka Easy Care.



Netti Smart




- Gotowa do użycia od razu!
- Dla użytkowników z większymi potrzebami w zakresie komfortu.
- Wielowarstwowa pianka.
- Ergonomiczne wsparcie lędźwiowe.
- Stabilizacja boczna 120 mm.
- Bezstopniowa regulacja wysokości.
- Wysokość oparcia 500 lub 600 mm.
- Dużo miejsca w okolicy bioder, aby zapewnić stabilną pozycję siedzącą.
- Ergonomicznie ukształtowane i precyzyjnie umiejscowione wsparcie lędźwiowe dla zwiększonej stabilności górnej części ciała.
- Oddychająca poszewka 3D lub łatwa w czyszczeniu poszewka Easy Care.

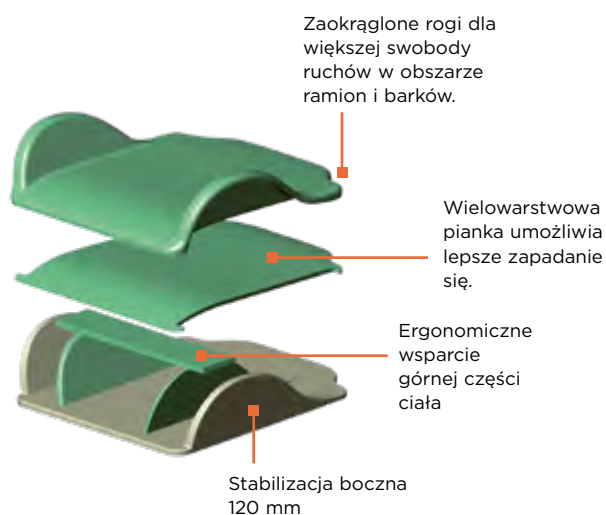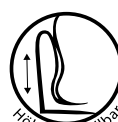

Netti Stabil





- Doskonałe możliwości indywidualnego dopasowania.
- Dla większego komfortu i dobrego samopoczucia.
- Wielowarstwowa pianka umożliwia lepsze zapadanie się.
- Ergonomicznie ukształtowane i precyzyjnie umiejscowione wsparcie lędźwiowe dla zwiększonej stabilności górnej części ciała.
- Stabilizacja boczna 170 mm dla większej stabilności.
- Dużo miejsca w okolicy bioder, aby zapewnić stabilną pozycję siedzącą.
- Dobre możliwości łączenia ze wsparciem bocznym Stable.
- Indywidualna, bezstopniowa regulacja wysokości.
- Wysokość oparcia 500 mm lub 600 mm.
- Oddychająca poszewka 3D lub łatwa w czyszczeniu poszewka Easy Care.

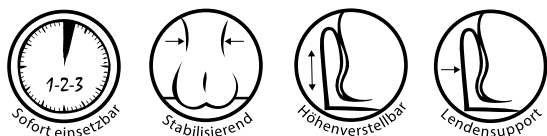

Netti Super Stabil



- Gotowa do użycia od razu!
- Dla większego komfortu i stabilności.
- Wielowarstwowa pianka – lepsze zapadanie się.
- Wzmocniona stabilizacja boczna 170 mm dla większej stabilności.
- Dobre możliwości łączenia ze wsparciem bocznym Stable.
- Indywidualna, bezstopniowa regulacja wysokości.
- Wysokość oparcia 500 lub 600 mm.
- Dwie poduszki lędźwiowe dają możliwość dowolnej regulacji wsparcia lędźwiowego oraz obszaru bocznego lub służą do wyrównania lekkiej kifozy.
- Oddychająca poszewka 3D lub łatwa w czyszczeniu poszewka Easy Care.

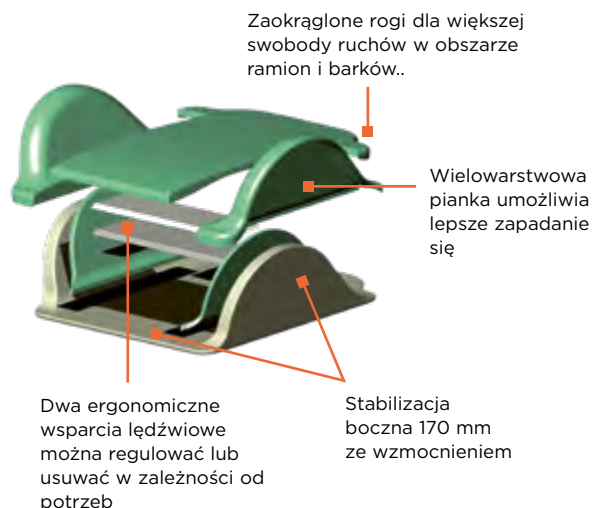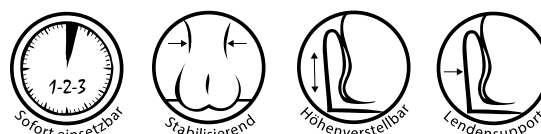

Zasada bezpiecznego obciążenia – przemysł strategii siedzenia

Zasada, na której opierają się poduszki do siedzenia Ride® Designs, to wzajemne oddziaływanie świadomego obciążania i odciążania określonych obszarów ciała.


W obszarze miednicy znajdują się wrażliwe miejsca, które charakteryzują się stosunkowo cienką warstwą tkanki nad wystającymi częściami kości. Są to przede wszystkim guzy kulszowe, krętarze większe oraz kość krzyżowa/guziczna. Obszary te są u wielu użytkowników wózków inwalidzkich bardzo podatne na powstawanie zaczerwienień, uszkodzeń skóry i ran. Z tego powodu te „obszary wysokiego ryzyka” muszą być odciążone („zasada odciążania”).

Z drugiej strony, inne obszary, takie jak proksymalne części ud czy mięśnie pośladkowe, mogą lepiej tolerować obciążenia naciskowe, ponieważ nad strukturami kostnymi znajduje się grubsza warstwa tkanki. Poprzez specyficzne wyprofilowanie poduszek do siedzenia dochodzi do zdefiniowanego obciążenia tych obszarów („zasada obciążania”).

W badaniach naukowych udowodniono znaczące efekty zasady „offload” w zakresie rozkładu i odciążenia nacisku, zasięgu funkcjonalnego oraz kompresji tkanek.

Porównanie różnych rozwiązań

Dwa nowe badania uniwersyteckie dostarczają przekonujących dowodów na rzecz filozofii safe-load firmy Ride® Designs.

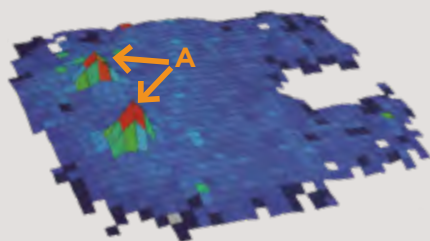

Prawidłowo ustawiona poduszka pneumatyczna:

Poszczególne komory powietrzne zmniejszają stabilność lub kontrolę posturalną, a szczytowe wartości nacisku pojawiają się głównie w obszarach wysokiego ryzyka, szczególnie na guzach kulszowych (A).



Graficzne przedstawienie na poduszce do siedzenia Java:

Bezpieczne i stabilne wsparcie dla mniej wrażliwych obszarów oraz maksymalne odciążenie obszarów wysokiego ryzyka

- A. Guzy kulszowe
- B. Krętarz większy
- C. Kość krzyżowa i kość ogonowa
- D. Krocze

Ride® Forward



- Poduszka do siedzenia Ride® Forward obejmuje miednicę podtrzymującymi konturami i jednocześnie zmniejsza nacisk w obszarach ryzyka wokół wystających części kości. Poprawa kontroli posturalnej idzie w parze z optymalną ochroną skóry.
- Poduszka wykonana z pianki lepkością elastyczną dopasowuje się do indywidualnego kształtu ciała i zapewnia optymalne rozłożenie nacisku.
- Wysokiej jakości poszewka zewnętrzna, dzięki swojej trójwymiarowej strukturze, przyczynia się do doskonałej regulacji wilgoci i cyrkulacji powietrza.
- Opatentowana koncepcja Ride® Designs („zasada odciążania”) przyczynia się do zmniejszenia nacisku, nie pomijając stabilności siedzenia.
- Do dalszego dostosowania (np. w przypadku asymetrii) można użyć klinów miednicowych. Dzięki swoim właściwościom stabilizującym i odciążającym, poduszka do siedzenia Ride® Forward jest odpowiednia dla użytkowników o umiarkowanych lub wysokich wymaganiach dotyczących siedzenia na wózku inwalidzkim.
- Szerokości siedziska od 250 mm do 500 mm
- Głębokości siedziska od 250 mm do 500 mm

Ride® Java Seat




- Dzięki specjalnemu wyprofilowaniu poduszki do siedzenia z wycięciem na wystające części kości, możliwe jest niemal całkowite odciążenie obszarów wysokiego ryzyka.
- Dzięki koncepcyjnej budowie poduszki z twardą, wyprofilowaną podstawą i miękką nakładką piankową, odciążenie to idzie w parze z bardzo dobrą stabilnością siedzenia.
- Siedząc na Ride® Java, dochodzi do znacznie mniejszej deformacji tkanek, co w rezultacie zmniejsza ryzyko uszkodzeń skóry.
- Do dalszego dopasowania można używać klinów wsparcia bocznego/przyśrodkowego, klinów miednicowych oraz podkładek wyrównujących zagłębienia.
- Pomimo dużej możliwości adaptacji, poduszka do siedzenia przekonuje swoją prostotą, ponieważ nie wymaga żadnych dodatkowych ustawień ani konserwacji.
- Specjalna konstrukcja poduszki i oddychająca poszewka zewnętrzna zapobiegają gromadzeniu się ciepła i prowadzą do optymalnej regulacji wilgoci.
- Dzięki swoim właściwościom odciążającym i stabilizującym oraz łatwej obsłudze, poduszka do siedzenia Ride® Java spełnia najwyższe wymagania.
- Szerokości siedziska od 350 mm do 500 mm
- Głębokości siedziska od 350 mm do 500 mm

Biomechanicznie ukształtowany

Opatentowana konstrukcja Ride® Java Back zapewnia niezbędną elastyczność w celu dokładnego dopasowania do miednicy i tułowia. Zapewnia doskonałe wsparcie i umożliwia mobilność użytkownika.



- Opatentowana, biomechaniczna konstrukcja oparcia Java Back zapewnia elastyczność umożliwiającą łatwe i niezależne optymalizowanie wsparcia miednicy oraz równoważenie tułowia. Użytkownik doświadcza komfortu i stabilności w spoczynku, bez pogorszenia funkcji i mobilności.
- Oparcie Java Back można specjalnie wygiąć, aby wspierać unikalne kontury ciała użytkownika bez utraty głębokości siedziska, a także zapewnić precyzyjny kontakt podtrzymujący wzdłuż miednicy, odcinka lędźwiowego i piersiowego kręgosłupa.
- Smukła konstrukcja i użycie wysokiej jakości materiałów przyczyniają się do lepszej regulacji wilgoci.

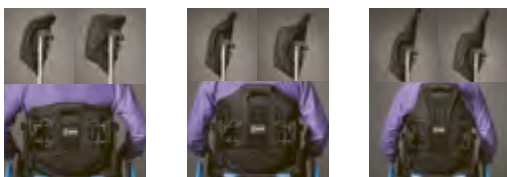

Dostępne trzy wysokości i dwie głębokości w każdym rozmiarze

- Głębokości: Regular = 75 mm, Deep = 150 mm

Grupa docelowa

- Niewielka do umiarkowanej asymetria postawy
- Znaczące zapotrzebowanie na wielkopowierzchniowe, boczne wsparcie tułowia
- Kompatybilne ze wszystkimi wózkami inwalidzkimi Netti z wyjątkiem Netti 4U CE.



Dostosowanie do użytkownika

- Nachylenie oparcia o 20°
- Zakres regulacji głębokości siedziska 50 mm

Niesamowicie elastyczne dla precyzyjnego dopasowania.

Opatentowana, biomechaniczna konstrukcja systemu oparcia Ride® Java Decaf zapewnia maksymalną elastyczność dzięki specjalnemu mocowaniu oparcia. Dzięki możliwości regulacji wysokości, głębokości, kąta i rotacji, najcięższe anomalie postawy mogą być sensownie i bezpiecznie wspierane lub korygowane. System oparcia Java Decaf zapewnia największą efektywność w połączeniu z poduszką do siedzenia Ride®.



szerokość siedziska
250-375 mm



wysokość oparcia
Regular: 250/300 mm
Wysoki: 325/375 mm



- Wspiera indywidualną postawę.
- Może być indywidualnie dostosowywany niezależnie od szerokości wózka inwalidzkiego (tylko do szerokości oparcia 350 mm).
- Wysokiej jakości materiały wspierają regulację wilgoci.
- Oparcie Java Decaf jest regulowane we wszystkich wymiarach, dzięki czemu może być indywidualnie dostosowane również dla rosnących dzieci i młodzieży.



Grupa docelowa

- Dzieci i młodzież z lekkimi do zaawansowanych anomaliami postawy.
- Znaczne zapotrzebowanie na obszerną, boczną stabilizację tułowia.
- Kompatybilne ze wszystkimi wózkami inwalidzkimi Netti o szerokości siedziska od 250 do 350 mm.

inspire joy of life

Dlaczego „radość życia” jest dla nas
ważna?

Ponieważ to najważniejszy powód, dla
którego tu jesteśmy!

Życie codzienne ma sprawiać radość.
Dla naszych pracowników, dla naszych
dystrybutorów, a w szczególności dla
użytkowników wózków inwalidzkich,
którzy korzystają z naszych rozwiązań i
dla których nieustannie tworzymy coraz
lepsze rozwiązania.

Niezależność
Zdrowie
Mobilność
Bezpieczeństwo
Interakcje społeczne



Zrozumieć Netti

Mając 35 lat doświadczenia w branży, naszą kluczową kompetencją jest siedzenie i pozycjonowanie.

Grupa docelowa i rozwiązania

Młodzież - Młodzi dorośli - Dorośli - Seniorzy

Neurologia

- Netti III Family
- Netti AdaptPro
- Netti V Family
- Seating System

Geriatrya

- Netti 4U Family
- Netti V Family
- Seating System

Dynamiczne siedzenie

- Netti Dynamic Family
- Seating System

Bariatrya

- Netti XHD
- Netti XXHD
- Netti 450 T
- Netti 450 F
- Netti 4U CED XL
- System siedziska

Mały szczegół, który robi wielką różnicę

inspire joy of life

Jedzenie, picie, oddychanie, mycie, komunikacja, wyjście na zewnątrz, pójście do lekarza lub apteki
zmniejszenie bólu, zwiększenie funkcjonalności, zwiększenie mobilności, poprawa postawy
poprawa stanu skóry (zapobieganie odleżynom), bezpieczne użytkowanie, np. unikanie wysuwania się

5 Kroków Siedzenia

Struktura w celu zapewnienia jakości

 **MYCAMPUS**

Education on a higher level

Źródło wiedzy



WSKAZANIA Netti III jest wielofunkcyjnym wózkiem inwalidzkim przeznaczonym dla osób z częściową lub całkowitą niepełnosprawnością ruchową i/lub umysłową. Zapewnia to środki, dzięki którym osoba niepełnosprawna, która wymaga możliwości zmiany pozycji siedzącej z aktywności na odpoczynek skorzysta z funkcji pochylania i odchylania. Jest przeznaczony dla użytkowników potrzebujących komfortu i ulgi. Połączenie system siedziska z ergonomicznym rozwiązaniem w konstrukcji ramy oferuje wiele możliwości adaptacji i regulacji. Niepełnosprawność może mieć wiele przyczyn. Netti III posiada regulację kąta nachylenia siedziska i oparcia, pozwala zatem na zmiany pozycji użytkownika, dla zwiększenia mobilności lub w celu korekty postawy (stabilizacji), kiedykolwiek jest to niezbędne ze względu na poniżej wymienione ograniczenia funkcjonowania niezależnie od przyczyn ich występowania: • ograniczenie lub brak możliwości ruchowych, • ograniczenie lub brak siły mięśni, • ograniczenia zakresu ruchów, • brak lub ograniczenie stabilności, • porażenie połowiczne, • zaburzenie reumatoidalne, • urazy czaszkowo-mózgowe, • amputacje, • inne zaburzenia neurologiczne lub geriatryczne.

PRZECIWSKAZANIA: Z silną spastycznością mięśniową zalecamy Dynamiczny System Netti, który oferuje dodatkowe wzmocnienie dostosowane do potrzeb użytkowników z tymi zaburzeniami. Zignorowanie tego zalecenia może w niesprzyjających warunkach doprowadzić do deformacji lub uszkodzeń części metalowych w okolicy wspornika oparcia i/lub podłokietników i wsporników nóg.

WSKAZANIA Netti 4U CE to wielofunkcyjny wózek inwalidzki dla osób częściowo lub całkowicie unieruchomionych z niepełnosprawnością fizyczną i / lub umysłową. Niepełnosprawności te mogą mieć wiele przyczyn. Netti 4U CE ma regulowany kąt siedzenia i oparcia, co ułatwia zmianę pozycji, mobilizację lub korektę postawy, wszędzie tam, gdzie występują przeszkody funkcjonalne. • ograniczona lub brak mobilności, • ograniczona moc mięśni lub jej brak, • ograniczony zasięg ruchu, • brak lub ograniczona stabilność tułowia i ciała, • hemiplegia, • zaburzenia typu reumatycznego

• urazy czaszkowo-mózgowe, • amputacje, • inne zaburzenia neurologiczne lub geriatryczne.

PRZECIWSKAZANIA: Netti 4U CE nie jest odpowiedni dla osób o silnie nasilonej spastyczności mięśni. W takim przypadku zalecamy system dynamiczny Netti, który oferuje konstrukcję ramy zgodną z wzorcem ruchu użytkownika. Zignorowanie tej porady może w niesprzyjających okolicznościach prowadzić do deformacji lub złamania części metalowych w konstrukcji wózka.

WSKAZANIA Netti 4U CE Plus jest wielofunkcyjnym wózkiem inwalidzkim przeznaczonym dla osób z częściową lub całkowitą niepełnosprawnością ruchową i/lub umysłową. Niepełnosprawności te mogą mieć wielorakie podłoża. Netti 4U CE Plus posiada regulację kąta nachylenia siedziska i oparcia, pozwala zatem na zmiany pozycji użytkownika, dla zwiększenia mobilności lub w celu korekty postawy (stabilizacji), kiedykolwiek jest to niezbędne ze względu na poniżej wymienione ograniczenia funkcjonowania niezależnie od przyczyn ich występowania: • ograniczenia lub brak możliwości ruchowych, • ograniczenia lub brak siły mięśni, • ograniczenia zakresu ruchów, • brak lub ograniczenie stabilności, • porażenie połowiczne, • zaburzenia reumatoidalne, • urazy czaszkowo-mózgowe, • amputacje, • inne zaburzenia neurologiczne.

PRZECIWSKAZANIA: Netti 4U CE Plus jest niewskazany dla osób z silną spastycznością mięśniową. W tym przypadku rekomendujemy Netti Dynamic System, który oferuje dodatkowe wzmocnienia ramy, podłokietników i wsporników nóg, dostosowane do potrzeb użytkowników z tymi zaburzeniami.

Zignorowanie tego zalecenia może w niesprzyjających warunkach doprowadzić do deformacji lub uszkodzeń części metalowych w okolicy wspornika oparcia i/lub podłokietników i wsporników nóg.

WSKAZANIA Netti 4U CED, CED S, CED XL to wielofunkcyjny wózek inwalidzki dla osób częściowo lub całkowicie unieruchomionych z niepełnosprawnością fizyczną i / lub umysłową. Niepełnosprawności te mogą mieć wiele przyczyn. Netti 4U CED, CED, CED S, CED XL ma regulowany kąt siedzenia i oparcia, co ułatwia zmianę pozycji, mobilizację lub korektę postawy, wszędzie tam, gdzie występują przeszkody funkcjonalne. • ograniczona lub brak mobilności, • ograniczona moc mięśni lub jej brak, • ograniczony zasięg ruchu, • brak lub ograniczona stabilność tułowia i ciała, • hemiplegia, • zaburzenia typu reumatycznego, • urazy czaszkowo-mózgowe, • amputacje, • inne zaburzenia neurologiczne lub geriatryczne.

PRZECIWSKAZANIA: Netti 4U CED, CED S i CED XL nie są przeznaczone dla osób z silnie wzmocnioną spastycznością mięśniową. W takim przypadku polecamy system Netti Dynamic, który oferuje konstrukcję ramy podążającą za wzorcem ruchu użytkownika. Ignorowanie tej porady może w niekorzystnych okolicznościach doprowadzić do odkształcenia lub pęknięcia metalowych części w okolicy rury plecowej, podpórki pod nogi lub podłokietnika.

WSKAZANIA: Netti V to wielofunkcyjny wózek inwalidzki z nachylnym i odchylanym oparciem do transportu częściowo lub całkowicie unieruchomionych osób w wieku nastoletnim lub dorosłych z niepełnosprawnością fizyczną i/lub umysłową. Netti V posiada modułowy system, który można dostosować do potrzeb użytkownika. Zapewnia on funkcję nachylania i odchylania oparcia, która umożliwia osobom niepełnosprawnym zmianę pozycji siedzącej w zależności od wykonywanej czynności (np. dla aktywności i wypoczynku). Jest przeznaczony dla użytkowników potrzebujących komfortu i ulgi. Połączenie systemu siedzenia i ergonomicznego rozwiązania w konstrukcji ramy oferuje wiele możliwości adaptacji i regulacji.

PRZECIWSKAZANIA: Netti V nie powinien być używany, jeśli: użytkownik wykonuje silne ruchy mimowolne. Dla takich użytkowników zaleca się stosowanie systemu Netti Dynamic.


WSKAZANIA: Netti AdaptPro to wielofunkcyjny wózek inwalidzki komfortowy z funkcją przechyłu (tilt) i odchyleń oparcia (recline), przeznaczony do transportu na kołach dla częściowo lub całkowicie unieruchomionych nastolatków i dorosłych osób z niepełnosprawnościami fizycznymi i/lub umysłowymi. Netti AdaptPro posiada system modułowy, który można dostosowywać i regulować zgodnie z potrzebami użytkownika. Umożliwia osobie niepełnosprawnej, która wymaga możliwości zmiany pozycji siedzącej z aktywnej na spoczynkową, skorzystanie z funkcji przechyłu i odchyleń oparcia. Został zaprojektowany z myślą o użytkownikach potrzebujących komfortu i odciążenia. Połączenie systemu siedziska i ergonomicznego rozwiązania w konstrukcji ramy oferuje wiele możliwości adaptacji i regulacji.

WSKAZANIA: Netti Dynamic AdaptPro to wózek inwalidzki z funkcją przechyłu (tilt) i odchyleń oparcia (recline), przeznaczony do transportu na kołach dla częściowo lub całkowicie unieruchomionych nastolatków i dorosłych osób z niepełnosprawnościami fizycznymi i/lub umysłowymi, które mogą również cierpieć na niekontrolowane ruchy. Netti Dynamic AdaptPro umożliwia kontrolowane ruchy w otwartym łańcuchu kinetycznym (OK-C). Wózki komfortowe statyczne mogą być wyposażone w komponenty dynamiczne. Kontrolowany ruch OK-C skutkuje tym, że: dystalne segmenty mogą się poruszać z umiarkowanym oporem, a OK-C pomaga odzyskać kontrolę nad segmentami proksymalnymi, zwłaszcza gdy użytkownik nie jest w stanie zahamować ruchów mięśni z powodu swojego stanu zdrowia. Netti Dynamic AdaptPro posiada system modułowy, który można dostosowywać i regulować zgodnie z potrzebami użytkownika.

WSKAZANIA: Netti Dynamic System to zaawansowany środek wspomagający mobilność dla użytkowników dotkniętych niekontrolowanymi (mimowolnymi) ruchami, które powodują dyskomfort / urazy, utratę pozycji / funkcji lub uszkodzenie sprzętu, stanowiąc wyzwanie dla wytrzymałości wózka inwalidzkiego. Opatentowany system Netti Dynamic System umożliwia i dostosowuje się do użytkownika podczas mimowolnego ruchu oraz pomaga naprowadzić użytkownika z powrotem do prawidłowej pozycji. Wózek inwalidzki jest dynamiczny i będzie podążał za ruchami zarówno górnej, jak i dolnej części ciała użytkownika.



*inspire
joy of life*

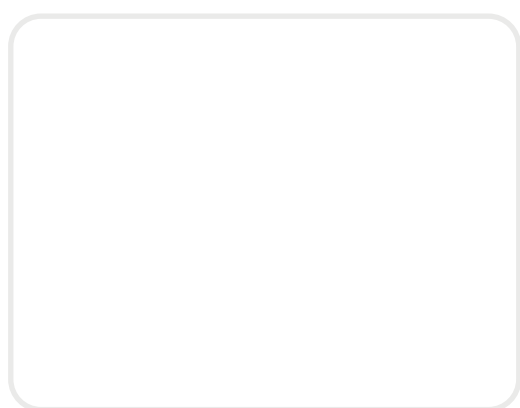

PRODUCENT:

ALU REHAB AS BEDRIFTSVEGEN 23 N-4353 KLEPP STASJON NORWAY

PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: MDH SP. Z O.O., UL. MARATOŃSKA 104, 94-007 ŁÓDŹ, POLSKA

DZIAŁ HANDLOWY: TEL. +48 42 676 32 54, MDH.REHABILITACJA@MEYRAGROUP.COM

WYDANIE 09.2025