



WÓZKI RĘCZNE

Standard-, Lekkie-, Multifunkcyjne-

 **MEYRA**[®]

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA
LUB ETYKIETĄ.

WÓZKI RĘCZNE



DANE TECHNICZNE
STRONA 18

STANDAROWE
SKŁADANE

 **MEYRA®**



STRONA 9
BUDGET
WERSJA MAGAZYNOWA
9.050

LEKKIE
WÓZKI

 **MEYRA®**



STRONA 10
FORMAT
WERSJA MAGAZYNOWA
3.940



STRONA 11
EUROCHAIR²
WERSJA MAGAZYNOWA
2.750



STRONA 12
EUROCHAIR² PRO
2.850



STRONA 13
EUROCHAIR
WERSJA MAGAZYNOWA
1.750

MULTIFUNKCYJNE
WÓZKI

 **MEYRA®**



STRONA 14
SOLERO LIGHT
LAGERVARIANTE
9.072

XXL-
WÓZKI

 **MEYRA®**



STRONA 16
EUROCHAIR² XXL
2.850



STRONA 17
EUROCHAIR² HD
2.850

PIECZĘĆ MEYRA ZA
INDYWIDUALNOŚĆ



MY INDIVIDUAL



więcej informacji:
www.meyra.de/my-individual

W naszych staraniach, aby zapewnić mobilność każdemu człowiekowi, w MEYRA zawsze przywiązywano ogromną wagę do indywidualnie dopasowanych produktów. Tak indywidualne, jak są wymagania, takie też są opracowywane przez nas rozwiązania. Niezależnie od tego, czy dotyczą one szczególnie ciężkich użytkowników o wadze do 300 kg, czy osób z określonymi ograniczeniami układu mięśniowo-szkieletowego – tworzymy propozycje idealnie dopasowane do konkretnej niepełnosprawności.

Dzięki wysoko wykwalifikowanemu zespołowi, który zajmuje się wyłącznie indywidualnymi rozwiązaniami, w ciągu ostatnich kilku lat jeszcze bardziej rozwinęliśmy linię INDIVIDUAL. Obok produkcji seryjnej stworzono w ten sposób kilka tysięcy indywidualnych rozwiązań. Każde zlecenie jest szczegółowo planowane we współpracy z terapeutami i technikami ortopedycznymi, a następnie profesjonalnie realizowane przez nasz zespół produkcyjny składający się z inżynierów i techników. Produkcja odbywa się przy użyciu nowoczesnego sprzętu CAD, co gwarantuje jakość MEYRA, do której przywykli nasi klienci.

UŁATWIONE ZAMAWIANIE:



GWARANCJA I CERTYFIKATY ISO



UWAGA

Warunkiem udzielenia gwarancji na ramę i krzyżak jest prawidłowe użytkowanie wózka inwalidzkiego, które zakłada regularną, fachową konserwację. W szczególności wyklucza się uszkodzenia spowodowane poluzowanymi śrubami lub nakrętkami oraz wypracowane otwory mocujące pasów siedziska i oparcia, powstałe na skutek częstej wymiany pokrowców. Ponadto nie wolno dokonywać żadnych zmian w elementach nośnych.

Wyłączone z gwarancji są uszkodzenia powierzchni, w szczególności zarysowania lakieru lub inne mechaniczne uszkodzenia powierzchni oraz zabrudzenia.

Pojęcie „dopuszczalna masa użytkownika” należy wyraźnie odróżnić od pojęcia „dopuszczalna masa całkowita” wózka inwalidzkiego, które jest równoznaczne z sumą:

- a) dopuszczalnej masy użytkownika
- b) masy własnej wózka
- c) ładunku dodatkowego

WÓZEK	MODEL	DOPUSZCZALNĄ MASĘ UŻYTKOWNIKA	ISO 10542-2	ISO 7176-19
BUDGET wersja magazynowa	9.050	130 kg	-	CHECK
FORMAT wersja magazynowa	3.940	130 kg	-	CHECK
EUROCHAIR² wersja magazynowa	2.750	130 kg	-	CHECK
EUROCHAIR² PRO	2.850	130 kg	-	CHECK
EUROCHAIR² XXL	2.850	160 kg / 200 kg	-	CHECK
EUROCHAIR² HD	2.850	300 kg	-	-
EUROCHAIR wersja magazynowa	1.750	130 kg	-	CHECK
SOLERO LIGHT wersja magazynowa	9.072	130 kg	-	CHECK

JAKOŚĆ MEYRA

TORY TESTOWE I TESTY ZDERZENIOWE

Wszystkie wózki inwalidzkie są dokładnie testowane na torze testowym. Dopiero po pomyślnym zakończeniu wewnętrznych kontroli jakości wózek zostaje dopuszczony do sprzedaży. Dodatkowo, przed wprowadzeniem na rynek nowych modeli, przeprowadzany jest test zderzeniowy, aby zapewnić, że wózek może być używany jako zamiennik fotela samochodowego. Więcej informacji na temat testów zderzeniowych znajdują Państwo na naszej stronie internetowej:

www.meyra.de/infozentrum/crash-test

TEST WYTRZYMAŁOŚCI MEYRA

MEYRA testuje swoje produkty ponad standardy norm. Przeprowadzamy testy wytrzymałości i niezawodności z obciążeniem przekraczającym wymagania normatywne. To jest unikalne i gwarantuje spełnienie naszych wysokich wymagań jakościowych wobec naszych wózków inwalidzkich.

TO JEST WYMAGANE:	JAK PRZEPROWADZAMY TESTY:
Double-Drum Test zgodnie z obowiązującą normą prawną DIN EN 21856 DIN EN 12183."	Double-Drum Test zgodnie z obowiązującą normą prawną oraz dodatkowymi procedurami testowymi MEYRA ISO 7176-8
200.000 Lastwechsel	200.000 – 300.000 Lastwechsel
bez przeciążenia	z 10% przeciążeniem
-	Dodatkowy test warunków skrajnych



OBRAZY KLINICZNE CHORÓB I WYMAGANIA FUNKCJONALNE



STAN ZDROWIA

urazowe uszkodzenie mózgu SM, ALS, ciężka demencja	-	-	-	-	-	-	-	-
udar (mózgu) choroba Parkinsona	-	-	-	-	-	-	-	-
amputacje nóg z powodu chorób zwyrodnieniowych	-	-	-	-	-	-	-	-
zaburzenia geriatryczne konieczność długotrwałego stosowania	-	-	-	-	-	-	-	-
otyłość z powikłaniami	-	-	-	-	-	-	-	-
stany pooperacyjne lub urazy krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
zaburzenia geriatryczne krótkoterminowe stosowanie	-	-	-	-	-	-	-	-
Zastosowanie kliniczne i instytucjonalne do transferu oraz krótkoterminowego wykorzystanie	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUDGET 9.050 Lagervariante	FORMAT 3.940 Lagervar- iante	EUROCHAIR 1.750 Lagervariante	EUROCHAIR ² 2.750 Lagervariante	EUROCHAIR ² PRO 2.850	EUROCHAIR ² XXL 2.850	EUROCHAIR ² HD 2.850	SOLERO LIGHT 9.072 Lagervariante
WYMAGANIA FUNKCJONALNE W RÓŻNYCH DZIEDZINACH MEDYCYNY	lekkie	lekkie	lekkie	lekkie na indywidualne zamówie- nie + XXL	Multifunk- cyjne			
Opieka paliatywna	-	-	-	-	-	-	-	-
Geriatra	-	-	-	-	-	-	-	-
Neurologia	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortopedia, traumatologia	-	-	-	-	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-	-	-	-	-



WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE WWW.MEYRA.DE LUB U
AUTORYZOWANEGO SPRZEDAWCY W TWOJEJ OKOLICY.

CZĘŚCI WSPÓLNE

KOMPATYBILNOŚĆ CZĘŚCI

Bardzo ekonomiczne rozwiązanie dzięki maksymalnej kompatybilności części – to idea modułowego systemu MEYRA. System modułowy jest już integralną cechą rodziny EUROCHAIR i sprawdził się również w pozostałej części sektora wózków manualnych. Szeroka jednolitość poszczególnych części używanych w naszych wózkach inwalidzkich gwarantuje również większą elastyczność i minimalny poziom zapasów.



CZĘŚCI

Boczek, standard

Boczek z regulacją wysokości

Hamulec dociskowy

Wydłużenie dźwigni hamulca

Hamulec bębnowy²⁾

Podnózek

Podnózek zdejmowany, odchylany

Podnózek dla osoby po amputacji

Rura oparcia

Tapicerka oparcia

Tapicerka oparcia¹⁾

Krzyżakowa konstrukcja

Kółka przednie

Koła napędowe

Kółka podporowe

Stolik terapeutyczny

Stolik terapeutyczny połówkowy

Uchwyt na kule

Pas bezpieczeństwa

Oświetlenie odblaskowe

Oslony na szprychy

						
BUDGET wersja magazynowa 9.050	FORMAT wersja magazynowa 3.940	EUROCHAIR wersja magazynowa ¹ 1.750	EUROCHAIR² wersja magazynowa 2.750	EUROCHAIR² PRO 2.850	EUROCHAIR² XXL 2.850	SOLERO LIGHT wersja magazynowa 9.072
☐	☐	☐	☐	☐	☐	-
☐	☐	☐	☐	☐	☐	-
☐	☐	☐	☐	☐	☐	-
☐	☐	☐	☐	☐	☐	-
☐	☐	☐	☐	☐	☐	-
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
-	-	-	☐	☐	☐	-
-	-	☐	☐	☐	☐	-
-	-	☐	☐	☐	☐	-
-	-	☐	☐	☐	☐	-
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	-
☐	☐	☐	☐	☐	do SB 53 cm	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	-
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	-
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

¹⁾ Modele 1.XXX używają cięższej śruby mocującej
²⁾ ewentualnie różne mocowania

WSKAZANIA/PRZECIWSKAZANIA

BUDGET, FORMAT

W przypadku wystąpienia podczas używania wózka inwalidzkiego reakcji alergicznych, zaczerwienienia skóry lub/i odleżyn należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Aby uniknąć alergii wskutek kontaktu z wózkiem inwalidzkim, zalecamy jego używanie tylko w ubraniu. Wózek inwalidzki służy jako środek pomocniczy osobom mającym duże trudności z chodzeniem lub niezdolnym do samodzielnego poruszania się wskutek np.: paraliżu, uszkodzenia lub deformacji kończyn, utraty kończyn, uszkodzenia lub usztywnienia stawów, innych chorób (znaczne lub całkowite ograniczenie mobilności/zdolności chodzenia przy strukturalnych lub/i funkcjonalnych uszkodzeniach kończyn dolnych, np. wskutek amputacji, odniesionych obrażeń, zaburzeń ruchu na podłożu mięśniowo-szkieletowym lub neuronalno-mięśniowo-szkieletowym itd.). Wózka inwalidzkiego nie wolno używać w przypadku niezdolności utrzymania pozycji siedzącej. Wózka inwalidzkiego nie wolno używać bez osoby towarzyszącej w poniższych przypadkach: zaburzenia równowagi, zaburzenia percepcji, znaczny brak kończyn w obu ramionach, usztywnienie/uszkodzenie stawów w obu ramionach, niewystarczająca zdolność widzenia lub jej brak.

EUROCHAIR 2, EUROCHAIR 2 PRO, EUROCHAIR, EUROCHAIR 2XXL

W przypadku wystąpienia podczas używania wózka inwalidzkiego reakcji alergicznych, zaczerwienienia skóry lub/i odleżyn należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Aby uniknąć alergii wskutek kontaktu z wózkiem inwalidzkim, zalecamy jego używanie tylko w ubraniu. Wózek inwalidzki służy m.in. jako środek pomocniczy osobom mającym duże trudności z chodzeniem lub niezdolnym do samodzielnego poruszania się wskutek np. paraliżu, uszkodzenia lub deformacji kończyn, utraty kończyn, uszkodzenia lub usztywnienia stawów oraz innych chorób. (Znaczne lub całkowite ograniczenie mobilności/zdolności chodzenia przy strukturalnych lub/i funkcjonalnych uszkodzeniach kończyn dolnych (np. wskutek amputacji, odniesionych obrażeń, zaburzeń ruchu na podłożu mięśniowo-szkieletowym lub neuronalno-mięśniowo-szkieletowym itd.)). Wózka inwalidzkiego nie wolno stosować bez osoby towarzyszącej w przypadku występowania silnych zaburzeń równowagi, zaburzeń percepcji, znacznego braku kończyn w obu ramionach, usztywnienia/uszkodzenia stawów w obu ramionach, niewystarczającej zdolności widzenia lub jej braku oraz niemożności utrzymania pozycji siedzącej. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat powyższych i innych zagrożeń związanych z niniejszym produktem, prosimy zwrócić się do lekarza, terapeuty lub specjalistycznego sprzedawcy.

SOLERO LIGHT

W przypadku wystąpienia podczas używania wielofunkcyjnego, wielopozycyjnego wózka inwalidzkiego reakcji alergicznych, zaczerwienienia skóry lub/i odleżyn należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Aby uniknąć alergii wskutek kontaktu z wielofunkcyjnym, wielopozycyjnym wózkiem inwalidzkim, zalecamy jego używanie tylko w ubraniu. Wielofunkcyjny, wielopozycyjny wózek inwalidzki służy pomocą osobom z zaburzeniami funkcjonalnymi lub psychicznymi, które nie mogą przez dłuższy czas przebywać w spionizowanej pozycji siedzącej w tradycyjnym wózku inwalidzkim, względnie muszą regularnie i często zmieniać pozycje ułożeniowe i przebywają przez dłuższy czas w wielofunkcyjnym, wielopozycyjnym wózku inwalidzkim wskutek m. in. niżej wymienionych zaburzeń: znaczne lub całkowite ograniczenie mobilności/zdolności chodzenia przy strukturalnych lub/i funkcjonalnych uszkodzeniach kończyn dolnych (np. wskutek amputacji, odniesionych obrażeń, zaburzeń ruchu na podłożu mięśniowo-szkieletowym lub neuronalno-mięśniowo-szkieletowym); zaburzenia przy utrzymywaniu pozycji siedzącej, stabilności podczas siedzenia lub/ i choroby układu krwionośnego (np. niedociśnienie ortostatyczne); znaczna lub całkowita utrata siły mięśniowej; w znacznym stopniu ograniczona stabilność ciała lub jej utrata, choroby neurologiczne, takie jak urazy czaszkowo-mózgowe, stwardnienie rozsiane (SM), stwardnienie zanikowe boczne (ALS), zaawansowana demencja; porażenie połowiczne, choroby geriatryczne, choroby reumatyczne oraz inne choroby neurologiczne i geriatryczne. Wielofunkcyjnego, wielopozycyjnego wózka inwalidzkiego nie wolno używać w przypadku niezdolności utrzymania pozycji siedzącej. Wielofunkcyjnego, wielopozycyjnego wózka inwalidzkiego nie wolno używać bez osoby towarzyszącej w poniższych przypadkach: zaburzenia równowagi, zaburzenia percepcji, znaczny brak kończyn w obu ramionach, usztywnienie/uszkodzenie stawów w obu ramionach, niewystarczająca zdolność widzenia lub jej brak, w przypadku osób, których postura ciała uniemożliwia optymalne dopasowanie wózka inwalidzkiego; w przypadku osób, u których mogłyby wystąpić problemy wskutek kąta nachylenia siedziska i spowodowanego tym zwiększenia natężenia przepływu krwi z żył kończyn dolnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat powyższych i innych zagrożeń związanych z niniejszym produktem, prosimy zwrócić się do lekarza, terapeuty lub specjalistycznego sprzedawcy.

BUDGET

9.050

WERSJA

MAGAZYNOWA

PROFIL UŻYTKOWNIKA:

fl osoby poruszające się samodzielnie lub prowadzone przez opiekuna

fl Reumatyzm

fl Opieka geriatryczna

EKONOMICZNY I INNOWACYJNY

Model BUDGET dzięki łatwej obsłudze w codziennym użytkowaniu jest dobrze przystosowany do użytku domowego i stacjonarnego.

- Przednia wysokość siedziska regulowana na widelcu bez konieczności wymiany części
- Komfortowy, łatwo zdejmowany boczek
- Standardowa regulacja środka ciężkości z jednorazową optymalizacją zwrotności dla osoby obsługującej
- Rama składana krzyżakowo
- Napęd ręczny za pomocą ciągów / możliwość pchania przez opiekuna
- Podnóżki odchylane na boki do wewnątrz i na zewnątrz, regulowany kątowo dzielony stopień podnóżka
- Blokowane, odchylane boczki z podłokietnikami
- Koła tylne z systemem szybkiego demontażu
- Hamulec dociskowy lub bębnowy dla opiekuna (opcja)



hamulec dociskowy



Blokowane boczki odchylane do tyłu



Podnóżki zdejmowane i odchylane na bok



Plecy z wygięciem

Komfortowy, łatwo zdejmowany boczek

Przednia wysokość siedziska regulowana bez wymiany części.

Wysokość siedziska z przodu / z tyłu:

470–510mm / 440 – 490 mm

Głębokość siedziska: 430 mm

Kolor ramy: srebrna



maksymalna waga użytkownika
130 kg



waga wózka
od 19,6 kg



szerokości siedziska
380 – 510 mm



FORMAT WERSJA MAGAZYNOWA 3.940

PROFIL UŻYTKOWNIKA

fl Opieka domowa i stacjonarna

fl Opieka geriatryczna

fl Reumatyzm

PERFAKCYJNY DLA WIELU UŻYTKOWNIKÓW

Doskonale nadaje się na początek samodzielnej mobilności. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na indywidualne dopasowanie FORMAT wspiera wstawanie i transfer, ponieważ wysokość siedziska można dostosować do wzrostu użytkownika.

- Rama składana krzyżakowo
- Oparcie pleców z regulacją napętości
- Regulowane na wysokość raczki do pchania wózka
- Blokowane, odchylane do tyłu boczki, chowane za oparciem
- Odchylane podnóżki
- Regulowana wysokość siedziska
- Podłokietniki regulowane na wysokość
- Koła tylne z systemem szybkiego demontażu
- Hamulec dociskowy lub hamulec bębnowy dla opiekuna (opcja)
- regulowane kątowno platforma podnóżka, możliwość regulacji środka ciężkości (w standardzie)
- Możliwość połączenia z rodziną wózków EUROCHAIR firmy MEYRA system modułowy



Regulowane na wysokość
uchwyty do pchania
w standardzie.



Podłokietniki
regulowane
na wysokość
w standardzie



Opcjonalny pakiet
bezpieczeństwa: odbłaski
na koła, kółka podporowe,
pas bezpieczeństwa oraz
uchwyt na kule



Regulowane na wysokość raczki do pchania wózka w standardzie

Wysokiej jakości, standardowo wyposażony w oparcie z regulacją napiętości

Podłokietniki regulowane na wysokość w standardzie

Wysokość siedziska z przodu / z tyłu:
470 – 510 mm / 440 – 490 mm
Głębokość siedziska: 400 – 430 mm

Koła napędowe aluminiowe 24"

Zdejmowane, odchylane podnóżki



**maksymalna
waga
użytkownika**
130 kg



**waga
wózka**
od 17,5 kg



**szerokość
siedziska**
380 – 510 mm



EUROCHAIR²

WERSJA MAGAZYNOWA 2.750

LEKKA KONSTRUKCJA DO UNIWERSALNEGO ZASTOSOWANIA

EUROCHAIR² wspiera samodzielną mobilność dzięki precyzyjnej regulacji siedziska, oparcia i podwozia dostosowanych do użytkownika. Prosta obsługa, lepsze właściwości łatwego toczenia przy niewielkich siłach napędu oraz zmniejszona waga ułatwiają codzienne użytkowanie.

- Składany i dostosowywany do indywidualnych potrzeb
- Boczek: regulowany na wysokość, odchylany do tyłu, odchylany na bok, odpinany
- Regulacja kąta natarcia widelców kółek
- Boczek z regulownym na wysokość i głębokość podłokietnikiem
- Oparcie pleców z regulacją napiętości pasami
- Szeroki asortyment akcesoriów i szybka dostępność części zamiennych dzięki modułowemu systemowi MEYRA

PROFIL UŻYTKOWNIKA

- fl Do stałego, codziennego użytku
- fl Do optymalnej opieki przy wielu chorobach dzięki dużym możliwościach regulacji
- fl Przeznaczony głównie do użytku domowego, ale także w klinikach rehabilitacyjnych do osiągnięcia celów terapeutycznych
- fl Duży wybór szerokości siedziska



pakiet bezpieczeństwa oraz poduszka na siedzisko w zestawie



boczek z regulownym na wysokość i głębokość podłokietnikiem



podwójny krzyżak



Poduszka i oparcie czarne

Wysokość siedziska regulowana: 470–520 mm

Głębokość siedziska regulowana: 400 – 490 mm

Regulacja środka ciężkości

Zdejmowane, odchylane podnóżki, regulowana katowo platforma podnóżka, w zestawie pas pod łydki



maksymalna waga użytkownika
130 kg



waga wózka
od 17,5 kg



szerokość siedziska
380 – 530 mm



EUROCHAIR² PRO 2.850

PROFIL UŻYTKOWNIKA

- fl Pełne wyposażenie do stałego użytkowania
- fl Optymalne wsparcie przy wielu schorzeniach dzięki szerokiemu zakresowi regulacji
- fl Głównie do użytku domowego, ale także w klinikach rehabilitacyjnych do realizacji celów terapeutycznych
- fl Do zastosowania z różnymi rodzajami napędu
- fl Komponenty HEMI

FUNKcjONALNY

EUROCHAIR² PRO wspiera samodzielną mobilność dzięki precyzyjnemu, stopniowemu dopasowaniu do użytkownika. Charakteryzuje się komfortowym, dopasowanym siedzeniem, prostą obsługą boczaków i podnóżków oraz dobrymi właściwościami łatwego toczenia przy niewielkich siłach napędu.

- Regulowane na wysokość, odchylane do tyłu boczki, zdejmowane
- Składany, podwójny krzyżak
- Podłokietniki z regulacją wysokości i głębokości
- Hamulec dociskowy, bębnowy dla opiekuna (opcja)
- Odchylany, zdejmowany podnóżek
- Regulacja środka ciężkości
- Doskonałe dostosowanie do różnych warunków użytkowania, ponieważ wysokość siedziska może być wyregulowana na stałym poziomie niezależnie od rozmiaru kół



koła przednie 180mm, PU



regulowany na wysokość boczki z podłokietnikiem regulowanym na głębokość



regulacja środka ciężkości



Regulowane oparcie w standardzie

Głębokość siedziska 400 – 490 mm
regulowana wysokość siedziska

Podnóżki odpinane i odchylane. Platformy podnóżków regulowane pod kątem, w zestawie pojedynczy pas łydkowy.



Maksymalna waga użytkownika
130 kg



Rwaga wózka
od 17,5 kg



szerokość siedziska
300 – 530 mm



EUROCHAIR

WERSJA MAGAZYNOWA 1.750

PROFIL UŻYTKOWNIKA

- fl do codziennej mobilności użytkownika
- fl dla optymalnego wsparcia wielu schorzeń dzięki szerokim możliwościom regulacji
- fl głównie do użytku domowego, ale także w klinikach rehabilitacyjnych do realizacji celów terapeutycznych
- fl Duży wybór szerokości siedziska

INDYWIDUALNE DOSTOSOWANIE

EUROCHAIR oferuje wiele możliwości regulacji bez konieczności wymiany części, dzięki czemu jest idealny do indywidualnego dopasowania do potrzeb użytkownika. Pozycja kół napędowych może być regulowana zarówno poziomo, jak i pionowo, co zapewnia jeszcze większą elastyczność.

Szybka regulacja, szeroka gama akcesoriów oraz niska waga ułatwiają codzienne użytkowanie i obsługę.

- Wersja podstawa z możliwością konfiguracji
- Optymalna opieka w przypadku wielu schorzeń
- szeroki zakres regulacji i personalizacja
- przyjazna obsługa
- wiele opcji regulacji i dopasowania bez konieczności wymiany części
- składany, łatwy do transportu
- rozbudowany system modułowy



Regulacja kąta natarcia



Rączki z regulacją wysokości (opcja)



wiele opcji regulacji i dopasowania bez konieczności wymiany części



Regulowany na wysokość, zdejmowany, odchylany boczek z podłokietnikiem

Wysokość siedziska z przodu / z tyłu:
430 – 510 mm / 430 – 530 mm
Głębokość siedziska: 400 – 460 mm

Do wyboru dwa kolory ramy

Odchylane, zdejmowane podnóżki, regulowana kątowo stopień podnóżka



Maksymalna waga użytkownika
130 kg



waga wózka od 15 kg (z hamulcem dociskowym)



szerokość siedziska
380 – 530 mm



SOLERO LIGHT WERSJA MAGAZYNOWA 9.072

PROFIL UŻYTKOWNIKA

- fl Opieka geriatryczna w ośrodkach dla seniorów i domach opieki oraz w środowisku domowym
- fl W przypadku zaburzeń funkcji fizycznych, które wymagają dobrej, wspierającej pozycji siedzącej
- fl Dobre dopasowanie i umożliwienie mobilności dla osób poruszających się samodzielnie

ŁATWA OBSŁUGA

Wąska konstrukcja wózka SOLERO LIGHT ułatwia manewrowanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak wąskie korytarze, drzwi czy małe pomieszczenia.

- Łatwa obsługa
- Płynna, bezstopniowa regulacja kąta siedziska i oparcia przy pomocy sprężyn gazowych
- Hamulec dociskowy, opcjonalnie hamulec bębnowy
- Możliwość montażu wszystkich rodzajów napędów dodatkowych
- Kompaktowa i niska wysokość siedziska
- Regulowana szerokość i głębokość siedziska
- Regulowany w trzech płaszczyznach zagłówek
- Podłokietniki regulowane na wysokość i zdejmowane
- Zwiększona stabilność dzięki specjalnej konstrukcji ramy



regulowane na wysokość i głębokość podłokietniki



poprzeczna barierka do pchania (opcja)



Zagłówek z regulowanymi poduszkami bocznymi i przegubem kulowym (opcja)



kąt nachylenia siedziska od -2 do +25°

Wysokość siedziska z poduszką: 440 / 520 mm
Głębokość siedziska: 420 – 480 mm

Podnóżki regulowane pod kątem i blokowane, odpinane, odchylane na bok oraz unoszone i odchylane do góry



maksymalna
waga
użytkownika
130 kg



Rollstuhl-
Leergewicht
ab 38 kg



szerokość
siedziska
430 – 460 mm /
480 – 510 mm



XXL
DLA SPECJALNYCH
WYMAGAŃ

EUROCHAIR² XXL 2.850

MAKSYMALNA STABILNOŚĆ

EUROCHAIR² XXL ułatwia jazdę dzięki licznym możliwościom regulacji podwozia. Ergonomicznie korzystny kąt chwytu odciąża stawy barkowe. Poprawiona wydajność zwiększa samodzielność i wspomaga optymalne wykorzystanie dostępnych sił napędowych. To prowadzi do łatwiejszego poruszania się i większej zwrotności.

Dzięki wyposażeniu w poprzeczny drążek i/lub jednoczęściowy podnóżek użytkownik otrzymuje maksymalne wsparcie w utrzymaniu prawidłowej pozycji siedzącej.

PROFIL UŻYTKOWNIKA

- fl Odpowiedni dla osób o dużej masie ciała do 200 kg
- fl Opieka długoterminowa z dużym zapotrzebowaniem na indywidualne dostosowanie w celu samodzielnej mobilności.
- fl Przede wszystkim do użytku domowego, ale także w klinikach rehabilitacyjnych w celu osiągnięcia celów terapeutycznych
- fl Do zastosowania z różnymi rodzajami napędu

- Składany
- Szczególnie stabilny, dostępny w 5 szerokościach siedziska
- Oparcie pleców z regulacją napiętości pasami
- Bębnowy hamulec dla opiekuna (opcja)
- Wąs tylny oraz kółka podporowe w standardzie



jednoczęściowy podnóżek



Zwiększona stabilność dzięki zastosowaniu podwójnego krzyżaka



Regulowana wysokość boczka z regulowanym na głębokość podłokietnikiem w standardzie



Wysokość siedziska z przodu / z tyłu
460 – 520 mm
głębokość siedziska: 430 / 460 / 490 mm

Szczególnie wytrzymały

Uchylnie, odpinane podnóżki



Maksymalna waga użytkownika
160 kg (wersja wzmocniona 200 kg)



waga wózka
od 19 kg



szerokość siedziska
480 – 650 mm



EUROCHAIR² HD 2.850

PROFIL UŻYTKOWNIKA

- fl Odpowiedni dla osób o dużej masie ciała do 300 kg
- fl Opieka i transfer użytkownika oraz osoby towarzyszącej jest ułatwiony
- fl W domach dla osób starszych i domach opieki, ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych lub w domu, aby wspierać cele terapeutyczne

SZCZEGÓLNE WYMAGANIA

Wózek EUROCHAIR² HD jest specjalnie zaprojektowany dla osób o dużej masie ciała, umożliwiając im samodzielne poruszanie się oraz zapewniając komfortową opiekę i transport zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz bez barier. Jego konstrukcja wspiera niezależną mobilność poprzez indywidualne dopasowanie siedziska, oparcia do potrzeb użytkownika. Dodatkowo, poprzeczny drążek do pchania oraz jednoczęściowy stopień podnóżka gwarantują maksymalne wsparcie w pozycji siedzącej, co zwiększa komfort i stabilność podczas użytkowania.

- wzmocnione oparcie, pas bezpieczeństwa i uchwyt tylnych bocznych
- Składany, konstrukcja krzyżakowa
- konstrukcja ramy wykonana z wysokowytrzymałej stali
- Jednoczęściowy podnóżek
- Podłokietniki zdejmowane, składane do tyłu
- Hamulec bębnowy dla opiekuna
- Wąs tylny oraz kółka podporowe w standardzie



Jednoczęściowy podnóżek



Zwiększona stabilność dzięki zastosowaniu podwójnego krzyżaka



Wzmocniony pas bezpieczeństwa



wysokość siedziska z przodu / z tyłu
500 / 475 mm lub 475 / 450 mm
głębokość siedziska: 460 / 500 mm

Wzmocniona wersja do 300 kg masy użytkownika w zestawie:

- Wzmocniony pas podtrzymujący plecy
- Wzmocniony pas siedziska
- Jednoczęściowy stopień podnóżka
- Hamulec bębnowy
- Poprzeczna sztanga do pchania



Maksymalna
waga
użytkownika
300 kg



waga
wózka
od 35 kg



szerokość
siedziska
700 – 800 mm




DANE TECHNICZNE

Tolerancje wymiarowe ± 10 mm, $\pm 2^\circ$, dane mogą ulec zmianie w wyniku modyfikacji konstrukcyjnych

	BUDGET WERSJA MAGAZYNOWA 9.050	FORMAT WERSJA MAGAZYNOWA 3.940	EUROCHAIR ² WERSJA MAGAZYNOWA 2.750	EUROCHAIR ² PRO 2.850	EUROCHAIR WERSJA MAGAZYNOWA 1.750
Szerokość siedziska (mm)	380 / 400 / 430 / 460 / 480 / 510	380 / 400 / 430 / 460 / 480 / 510	380 / 400 / 430 / 460 / 480 / 500 / 530	300 / 320 / 340 / 360 / 380 / 400 / 430 / 460 / 480 / 500 / 530	380 / 400 / 430 / 460 / 480 / 500 / 530
Szerokość wózka gotowego do jazdy (mm)	560 / 580 / 610 / 640 / 660 / 690	560 / 580 / 610 / 640 / 660 / 690	580 / 600 / 630 / 660 / 680 / 700 / 730	500 / 520 / 540 / 560 / 580 / 600 / 630 / 660 / 680 / 700 / 730	560 / 580 / 610 / 640 / 660 / 680 / 710
Szerokość wózka po złożeniu (mm)	280	280	310	310	280
Głębokość siedziska (mm)	430	400 – 430	variabel 400 – 490	400 / 430 / 460 / 490	400 – 460
Wysokość siedziska (cm)	-	-	-	-	-
Wysokość siedziska z przodu (mm)	470 – 510	470 – 510	regulowana 470 – 520	regulowana 390 – 560	regulowana 430 – 510
Wysokość siedziska z tyłu (mm)	440 – 490	440 – 490		variabel 390 – 520	regulowana 430 – 530
Całkowita wysokość (mm)	960	960	930	regulowana 790 – 1.050	960
Wysokość oparcia (cm)	420	420	400 / 420 / 440	400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500	400 / 420
Kąt nachylenia oparcia (°)	-	-	-	-	-
Kąt nachylenia siedziska (°)	-	-	-	-	-
Wysokość podłokietników (mm)	210,5	215	210 – 260	210 – 260	ab 230
Długość podnóżka (mm)	-	-	-	-	-
Długość z / bez podnóżka (mm)	1.040	1.040	1.050 ⁴⁾	1.050	ab 1.000
Maksymalna waga użytkownika (kg)	130	130	130	130	130
Masa netto (kg)	18,5	17,5	17,5	17,5	15 ⁵⁾
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	148,5	147,5	147,5	147,5	150
Waga transportowa (kg)	11,5	10,5	-	10	-
Koło napędowe (mm) (cale)	610 (24")	610 (24")	616 (24")	22" 24"	600 (24")
Stabilność statyczna (również przy zaciągniętym hamulcu) (°)	-	-	-	-	-
Test hamulców według normy (°)	-	-	7°	-	7°
Wymiary po spakowaniu (mm)	-	-	-	-	-

SOLERO LIGHT WERSJA MAGAZYNOWA 9.072	EUROCHAIR ² XXL 2.850	EUROCHAIR ² HD 2.850
430 – 460 / 480 – 510	480 / 500 / 530 / 580 / 650	700 / 750 / 800
min. 620	680 / 700 / 730 / 780 / 850	920 / 970 / 1.020
	310	310
420 – 480	430 / 460 / 490	460 / 500
440 / 520	-	-
-	regulowana 460 – 520	475 / 500
-	variabel 460 – 520	475 / 450
1.040 – 1.180	930	960
530 – 560	400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500	430
0° – 45°	-	-
(-2°) – 25°	-	-
210 – 270	210 – 260	230 – 330
-	-	-
1.180 / 910	max. 1.070 / max. 840	max. 1.140 / max. 880
130	160 / 200 / 300	300
38	19	34
168	179 / 219	334
23	12	27,5
610 (24")	610 (24")	610 (24")
-	-	-
-	-	-
-	-	-

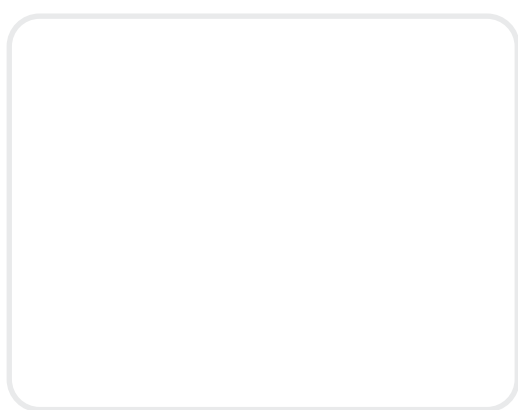

PRODUCENT:

MEYRA GMBH, KLEISTSTRABE 49, 32457 PORTA WESTFALICA, NIEMCY

PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ:

MDH SP. Z O.O., UL. MARATOŃSKA 104, 94-007 ŁÓDŹ, POLSKA

DZIAŁ HANDLOWY:

TEL. +48 42 676 32 54, MDH.REHABILITACJA@MEYRAGROUP.COM