





## DBAJ O AKUMULATORY!

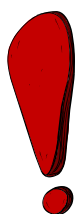

**UWAGA!** składowanie akumulatorów powinno być w suchym, czystym i najlepiej chłodnym miejscu. Ponieważ akumulatory są dostarczone naładowane, czas składowania jest ograniczony.




Akumulatory mogą być przechowywane 1 miesiąc, jeżeli znajdują się w wózku i są odłączone od elektroniki, po tym czasie należy je ładować, bez ładowania akumulatory mogą wykazywać znaczne ograniczenia trwałości oraz niezawodności.

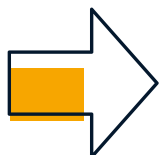


Akumulatorów nie demontujemy z urządzenia, mogą być ładowane w otwartym kartonie pod kontrolą zgodnie z przepisami BHP.



Ładowanie może odbywać się w miejscu przechowywania, jeśli temperatura jest powyżej 1 stopnia C.

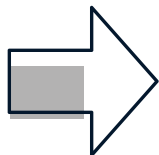

Akumulatory ładujemy co dwa tygodnie w chwili, gdy wejdą w pracę, czyli zaczną być aktywowane.

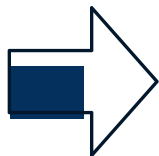

Pełne rozładowanie spowoduje przedwczesne zniszczenie akumulatora i ma znaczny wpływ na trwałość.

Dodatkowe warunki konserwacji akumulatorów i wózka opisano w instrukcji używania.

Niestosowanie się do zasad opisanych w instrukcji może w skrajnych przypadkach skutkować utratą gwarancji.

# Karta ładowania Akumulatora

Karta niezbędna w przypadku reklamacji

Lp.	Data ładowania	Temp. ładowania	Czas ładowania	Lp.	Data ładowania	Temp. ładowania	Czas ładowania
1				38			
2				39			
3				40			
4				41			
5				42			
6				43			
7				44			
8				45			
9				46			
10				47			
11				48			
12				49			
13				50			
14				51			
15				52			
16				53			
17				54			
18				55			
19				56			
20				57			
21				58			
22				59			
23				60			
24				61			
25				62			
26				63			
27				64			
28				65			
29				66			
30				67			
31				68			
32				69			
33				70			
34				71			
35				72			
36				73			
37				74			

Lp.	Data ładowania	Temp. ładowania	Czas ładowania	Lp.	Data ładowania	Temp. ładowania	Czas ładowania
75				112			
76				113			
77				114			
78				115			
79				116			
80				117			
81				118			
82				119			
83				120			
84				121			
85				122			
86				123			
87				124			
88				125			
89				126			
90				127			
91				128			
92				129			
93				130			
94				131			
95				132			
96				133			
97				134			
98				135			
99				136			
100				137			
101				138			
102				139			
103				140			
104				141			
105				142			
106				143			
107				144			
108				145			
109				146			
110				147			
111				148			



mdh sp. z o.o. ul. Maratońska 104 94-007 Łódź, telefon: 725201252 lub 603896199 mail: mdh.serwis@meyragroup.com