





KORZYSTAJ Z WÓZKA DŁUŻEJ - DBAJ O AKUMULATORY!

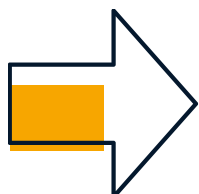


Nie dopuszczaj do całkowitego rozładowania akumulatorów! Wpływa to na ich żywotność, zmniejsza pojemność, a co za tym idzie działają one krócej.




Jeśli korzystasz z wózka aktywnie ładuj akumulatory każdego dnia.

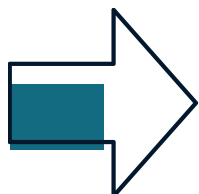

Jeśli nie korzystasz z wózka regularnie, ładuj akumulatory raz na dwa tygodnie w pełnym cyklu (dopóki nie zapali się zielona dioda na ładowarce) pozwoli to utrzymać ich żywotność.

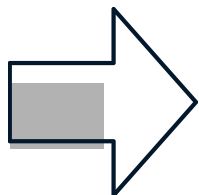

Pamiętaj, że akumulatory należy przechowywać całkowicie naładowane!

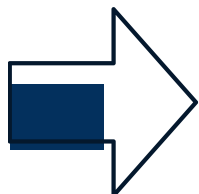

Jeśli nie planujesz korzystać z wózka przez dłuższy czas, zdemontuj akumulatory i przechowuj je w suchym i chłodnym miejscu.

Dodatkowe warunki konserwacji akumulatorów i wózka opisano w instrukcji używania.

Niestosowanie się do zasad opisanych w instrukcji może w skrajnych przypadkach skutkować utratą gwarancji.